

O compósito fluido para preenchimento em bloco mais fácil de aplicar

O compósito 3M™ Filtek™ Bulk Fill Fluido está disponível numa nova seringa ergonómica projetada para maior conforto e facilidade de injeção. Isto dá-lhe mais controlo e visibilidade para uma colocação precisa em restaurações profundas.

Reduz as bolhas e o desperdício

Praticamente nenhuma bolha ou material “run-on” durante a distribuição dá-lhe um melhor controlo.

Adeus à incerteza

O corpo da seringa verde indica o volume restante do material. Quando a sua seringa está vazia, só aparece o êmbolo branco.




Cânula dobrável

Fácil de dobrar para um melhor acesso.

Fácil de segurar e injetar

A placa triangular e o êmbolo tornam mais rápida e fácil a aderência ao dedo.

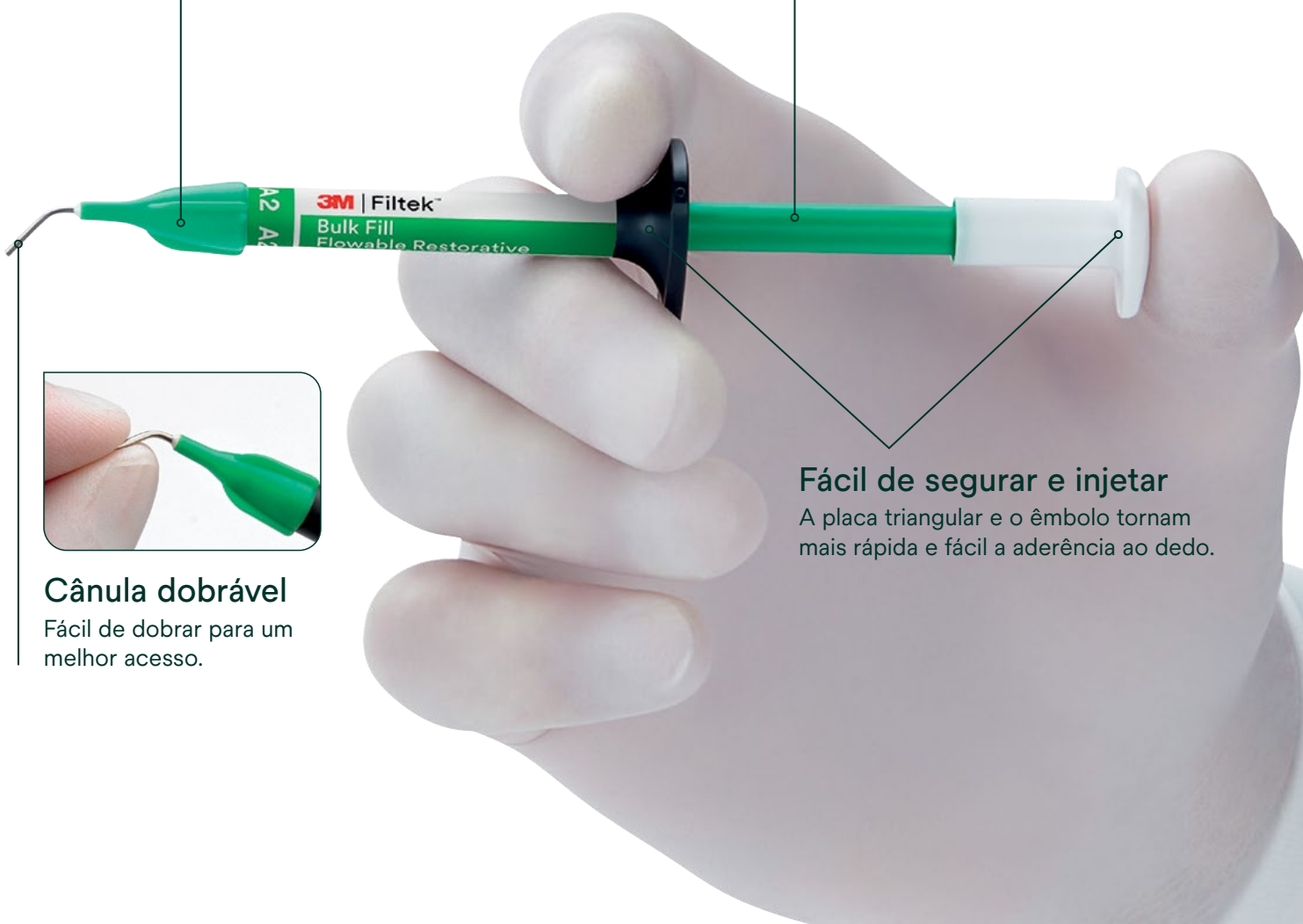

Principais benefícios

- Praticamente nenhuma bolha ou material “run-on”
- Cânula fácil de dobrar para um melhor acesso
- O design ergonómico é fácil de segurar e injetar
- Colocação injetável, num só passo, até 4mm
- Excelente adaptação e baixo stress de contração

Pode ser aquecido para moldagem por injeção

Aqueça até 70°C durante um máximo de uma hora, até 25 vezes.



Indicações

(graduais até 4mm)



Restauração Posterior simplificada



Preparar o dente e aplicar um adesivo, por exemplo, Adesivo 3M™ Scotchbond™ Universal.



Aplicar até 4 mm de 3M™ Filtek™ Bulk Fill Fluido na cavidade preparada e curar, por exemplo, com Fotopolimerizador LED 3M™ Elipar™ DeepCure-S.



Colocar uma camada de 2mm (mínimo) de revestimento de um compósito estético, como por exemplo 3M™ Filtek™ Universal Restorative, e fotopolimerizar.

Fotos clínicas gentilmente cedidas pelo Dr. Reich, Seefeld, Alemanha

Como realizar um pedido



Recargas 3M™ Filtek™ Bulk Fill Fluido

As recargas das seringas incluem: 2 seringas de 2g; 20 pontas de

Tonalidade	Referência 3M
A1	4862A1
A2	4862A2
A3	4862A3
Universal	4862U

Ref. 3M Informação sobre o produto

3740T Pontas de distribuição de 3M™ Filtek™ Bulk Fill Fluido, verde (20)



1. Incluindo pequenas restaurações oclusais que não suportam tensão.
2. Reparação de resina acrílica temporária e composta.
3. Em casos, onde pelo menos estejam da estrutura do dente coronal permanece para fornecer suporte estrutural à coroa.



Para mais informações, visite Solventum.com/pt-pt/home/

Solventum Dental Solutions KCI Clinic Spain,
S. L. U. Edificio Office Oriente,
Rua do Mar da China, nº 3 Piso 3A
1990-138 Lisboa Portugal
Solventum.com

© Solventum 2025. Solventum e o logótipo S são marcas comerciais da Solventum ou das suas afiliadas. 3M e o logótipo 3M são marcas comerciais da 3M. Todas as outras marcas comerciais pertencem aos seus respetivos proprietários.