

U krijgt de bovenhand met
onze nieuw ontworpen spuit



Nu is onze populairste flowable nog makkelijker te injecteren

3M™ Filtek™ Supreme XTE Flowable is beschikbaar in een nieuwe ergonomische spuit. Deze nieuwe spuit is ontworpen om injecteren comfortabeler te maken, en heet vanaf nu 3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative.

Dring luchtballen en materiaalverspilling terug

Vrijwel geen luchtballen en 'run-on' van materiaal meer zodat betere controle tijdens het aanbrengen mogelijk is.

Makkelijk vast te houden en te injecteren

De driehoekige vingerplaat en het grotere drukoppervlak laten toe om de grip vlot te personaliseren.

Geen foute inschattingen meer

De blauwe stamper van de spuit geeft aan hoeveel materiaal nog beschikbaar is. De spuit is volledig leeg wanneer alleen het witte gedeelte overblijft.

Buigzame canule

Eenvoudig te buigen canule voor betere toegang, zonder knikken.

Past zich uitstekend aan


Past zich uitstekend aan, behoudt zijn glans en is bestand tegen slijtage.

Veelzijdig inzetbaar

Een breed scala aan indicaties en technieken.




De populaire flowable van 3M is gemaakt met ECHTE nanotechnologie. Deze gepatenteerde technologie zorgt voor een geüniformiseerde omvang van de nanopartikels, waardoor ze uitstekend slijtbestendig zijn en hun glans beter houden.

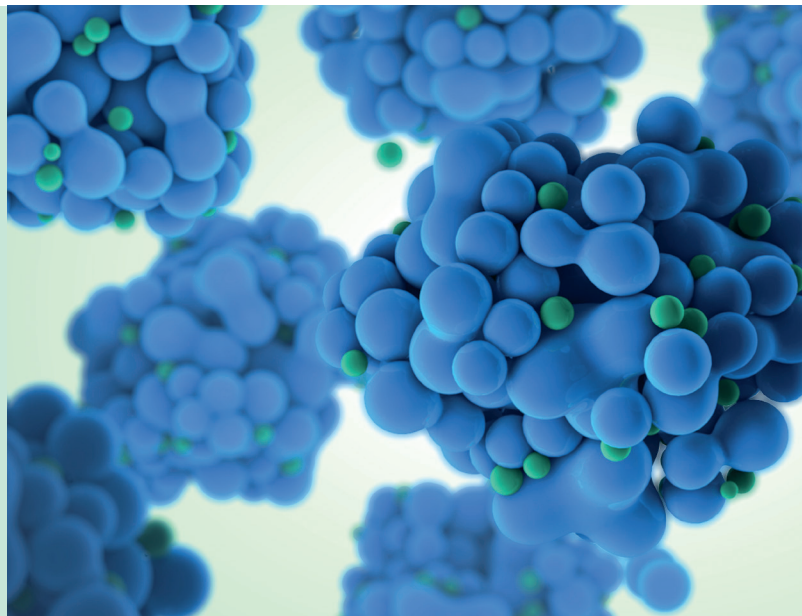

Verwarmen met vertrou-

Waarom zou u 3M composieten verwarmen?

- Verwarmde composieten zijn vloeibaarder, en makkelijker te hanteren
- Door het verwarmen kunnen 3M composieten beter aangepast worden aan de tandstructuur¹
- Door het verwarmen is er minder kracht nodig voor de extrusie²

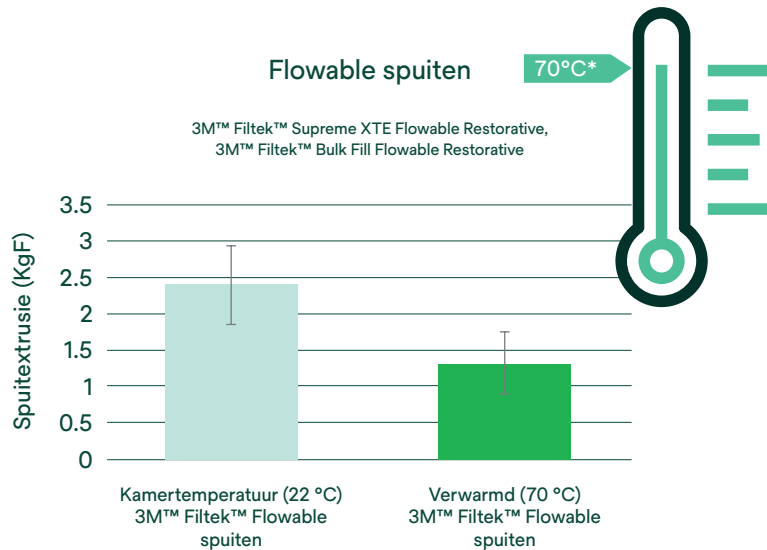

Door het verwarmen is er 46–52% minder kracht nodig voor de extrusie uit de flowable spuit

Vertrouwen op de prestaties

Fysische eigenschappen onveranderd:³

- Diametrale trekkracht
- Buigingsmodulus
- Buigsterkte
- Kleurstabiliteit
- Uithardingsdiepte



Een palet met aangepaste kleuren

3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative kleuren zijn gemaakt om precies overeen te komen met 3M™ Filtek™ Universal Restorative en 3M™ Filtek™ Supreme XTE universeel restauratiemateriaal. (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, D2)



A2

3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative



A2

3M™ Filtek™ Universal Restorative



A2B

3M™ Filtek™ Supreme XTE universeel restauratiemateriaal

Tips voor succes

U kunt Filtek Restoratives veilig opwarmen in slechts 5 minuten! Volg deze algemene richtlijnen, en raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

WEL DOEN

VERWARM flowable spuiten tot maximum 70°C (158°F) gedurende maximaal 1 uur, maximaal 25 keer.

GEBRUIK alleen commercieel beschikbare composietverwarmingsinstrumenten. RAADPLEEG de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

NIET DOEN

Gebruik GEEN hitte van een lamp, magnetron, beververwarmer of andere niet goedgekeurde warmtetoestellen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

*Aanbevolen verwarmingstemperatuur

¹ Op basis van een door 3M gesponsord in vitro onderzoek. 11 tandartsen hebben 88 Klasse II MOD-restauraties geplaatst. De gebitselementen waren microscopisch geselecteerd op aantastingen, afwijkingen en holten. De technieken en operators werden vergeleken.

² 3M Interne gegevens

³ Indien verwarmd volgens onze IFU (tot 70°C of 158°F gedurende max. 1 uur).



Klinische casussen

3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative biedt een egale overgang van het materiaal naar het gebitselement voor esthetische restauraties.



Vóór

Foto's gebruikt met toestemming van Dr. Gunnar Reich, Munchen, Duitsland



Aanbrengen van Flowable



Na

3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative past zich makkelijk aan en dicht de overgang.



Vóór

Foto's gebruikt met toestemming van Dr. Giuseppe Chiodera, Brescia, Italië



Aanbrengen van Flowable



Na

Indicaties

(Incrementeel tot 2 mm)



Klasse III



Klasse V



Minimaal invasieve tandheelkunde¹



Basis



Liner



Reparatie van kleine defecten bij indirecte restauraties



Reparatie²



Uitblokken van ondersnijdingen



Verzegelen van putjes en fissuren

Zie de gebruiksaanwijzing voor de volledige lijst van indicaties.

¹Inclusief kleine, onbelaste occlusale restauraties.

²Reparatie van tijdelijke acryl- en composietharsen.

Bestelinformatie

3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative refills
Spuitnavullingen omvatten: 2 – 2g spuitjes;
20 dispensingtips.

KLEUR	ORDERNUMMER
A1	6032A1
A2	6032A2
A3	6032A3
A3.5	6032A3.5
A4	6032A4
B1	6032B1
B2	6032B2
C2	6032C2
D2	6032D2
White	6032W
Extra White	6032XW
OA3	6032OA3

ORDERNUMMER	PRODUCTINFO.
3700T	3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative dispensingtips, 20g, Grijs (20)



Solventum Dental Solutions
Netherlands
E: infodental.nl@solventum.com
Web: go.solventum.com/dutch

Voor meer informatie, ga naar go.solventum.com/dutch

© Solventum 2025. Solventum en het S-logo zijn handelsmerken van Solventum of diens dochterondernemingen. 3M en het 3M-logo zijn handelsmerken van 3M. Alle andere hierin genoemde handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.