

Consulte las instrucciones de uso del producto para obtener información completa.



Solventum Medical Surgical
KCI Clinic Spain, S.L.U.
CL Juan Ignacio Luca de Tena 19-25
Planta 0 28027 Madrid Espana



3100022026/01

Para más información, visite Solventum.com/es-es/home/

© Solventum 2026. Solventum y el logo S son marcas de Solventum o sus afiliados. 3M y el logo 3M son marcas registradas de 3M. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus correspondientes propietarios.



passo
-por-
passo




Cemento de resina
3M™ RelyX™ Universal



Cemento de resina 3M™ RelyX™ Universal

- Cemento de resina pasta-pasta de polimerización dual
- Indicaciones para técnica adhesiva y autoadhesiva

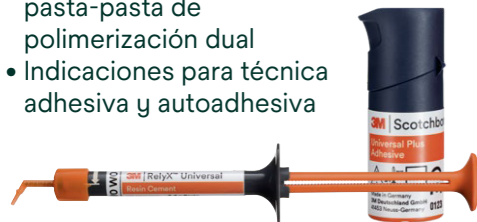


3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesivo

- Adhesivo de autograbado, grabado selectivo y grabado ácido total
- Primer MDP para circonia, metal y composite
- Primer de silano para postes de cerámica reforzados con fibra

Micro Puntas de mezcla 3M™ RelyX™ Universal con puntas de elongación



Selección de color

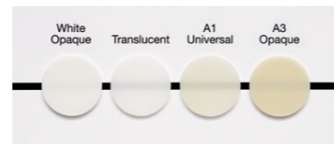

Jeringa de automezcla con autocierre

- To ensure proper function, the valve must be kept in correct closed starting position.
-
- Gire por completo hasta que se detenga.
- Aplique fuerza moderada en el centro sin doblar el émbolo.
- Deseche una pequeña cantidad de cemento.
-
-
- Guarde la jeringa sin la punta de mezcla.



Vacío
15 aplicaciones de media

Resumen de los pasos del pretratamiento

Poste de composite reforzado con fibra

Los postes de fibra 3M™ RelyX™ Fiber Post no requieren imprimación con adhesivo

Circonia, alúmina, metal

Imprimación con adhesivo opcional, recomendada para carillas, carillas oclusales y puentes adhesivos

Composite/materiales híbridos

Cerámica

Primer alternativo: aplique un primer de silano; p. ej., 3M™ RelyX™ Primer de cerámica.



Consulte el apartado 1

Siga las instrucciones de uso del material de restauración para obtener indicaciones específicas.

Opciones de pretratamiento del diente

3M™ RelyX™ Universal Resin Cement

Opción 1

1

Autoadhesivo.
Recomendado para:

- Postes
- Coronas
- Puentes

No se requiere adhesivo en el diente



Consulte el apartado
▶ **2a/2b**

Opción 2

2

Adhesivo (grabado selectivo).
Recomendado para:

- Inlays
- Onlays

Opcional para esmalte preparado



Consulte el apartado
▶ **2c**

Opción 3

3

Adhesivo (grabado ácido total).
Se utiliza para:

- Carillas oclus
- Carillas
- Puentes adh



Consulte el apartado
▶ **2d**


1 PASO-A-PASO Recomendación de pretratamiento

Poste de composite reforzado con fibra



Los postes de fibra 3M™ RelyX™ Fiber Post no requieren imprimación.

Circonia, alúmina, metal

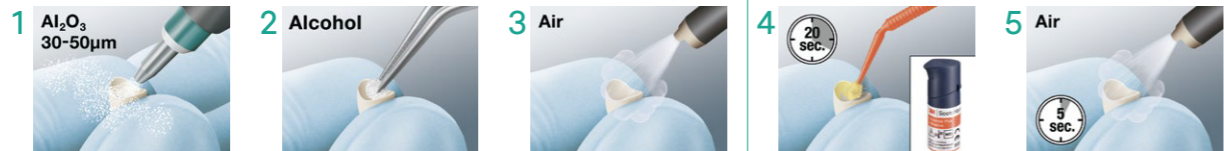

Imprimación opcional, recomendada para carillas, carillas oclusales y puentes adhesivos.

PASO-A-PASO

Cemento de resina 3M™ RelyX™ Universal

Composite/
Materiales híbridos




Cerámica







Siga las instrucciones de uso del material de restauración para obtener indicaciones específicas.

2a PASO-A-PASO Cementación autoadhesiva de poste

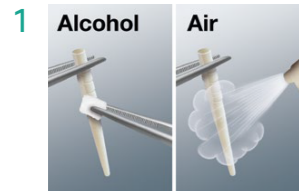


Solo postes de fibra 3M™ RelyX™ Fiber Post.
Para el pretratamiento de otros postes, consulte el apartado 1.

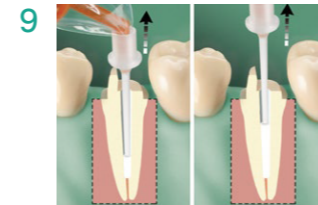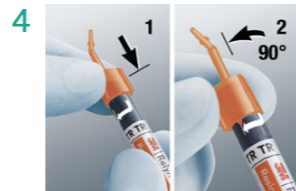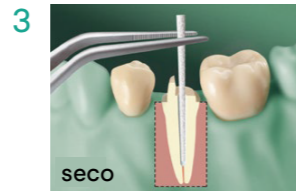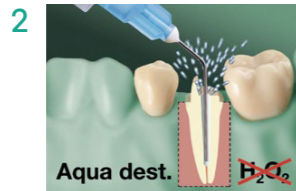


Para desbloquear la jeringa, gire completamente la punta de mezcla hasta que se detenga.



No use alta presión. Compruebe la posición de la punta de mezcla (imagen 5) si la fuerza de extrusión es elevada.

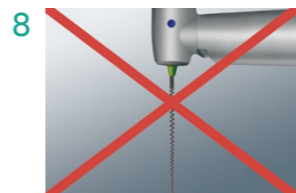

Sin léntulo.




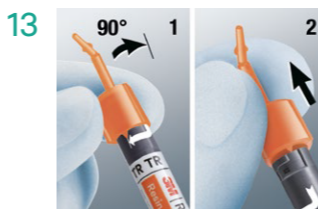


2b PASO-A-PASO Cementación autoadhesiva


PASO-A-PASO

Cemento de resina 3M™ RelyX™ Universal



1 Restauración con pretratamiento conforme al apartado 1

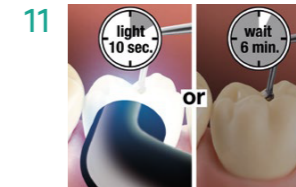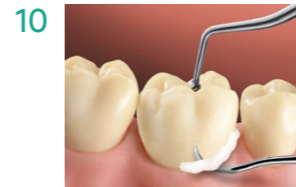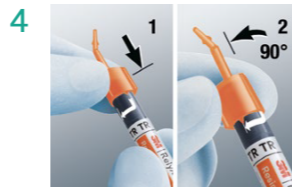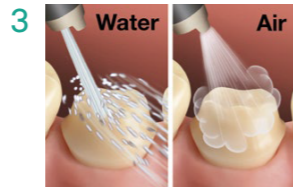

Para desbloquear la jeringa, gire completamente la punta de mezcla hasta que se detenga.

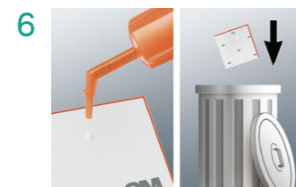

No use alta presión. Compruebe la posición de la punta (imagen 5) si la fuerza de extrusión es elevada.

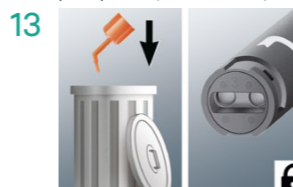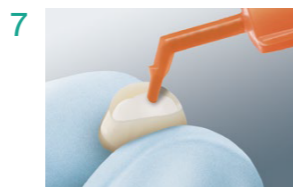


2c PASO-A-PASO Cementación adhesiva (grabado selectivo)

1 Restauración con pretratamiento conforme al apartado 1


2  15 sec.

Esmalte sin preparar para grabado selectivo. Opcional para esmalte preparado.

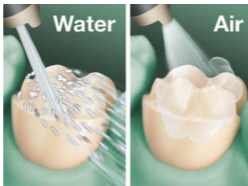3  Water Air


4  20 sec.

5  Air 5 sec.

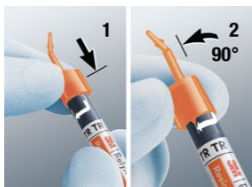6  1 2 90°

7 

Para desbloquear la jeringa, gire completamente la punta de mezcla hasta que se detenga.

8 

No use alta presión. Compruebe la posición de la punta de mezcla (imagen 7) si la fuerza de extrusión es elevada.

PASO-A-PASO


3M™ RelyX™ Universal Resin Cement

9 

10 

11  light 2-3 sec. per surface

Fotopolimerice aprox. 2 o 3 segundos por superficie (>1200 mW/cm²).

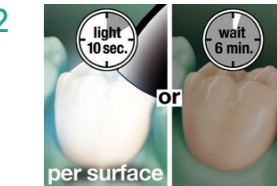
12  light 10 sec. per surface or wait 6 min.

Fotopolimerice 10 s por superficie (>1200 mW/cm²) o espere 6 minutos.


2d PASO-A-PASO

Cementación adhesiva (grabado ácido total)


1 Restauración con pretratamiento conforme al apartado 1

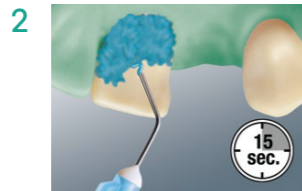



Grabado ácido total.

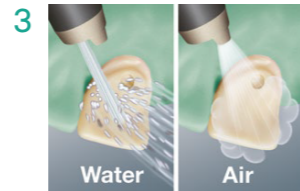

Fotopolimerice aprox. 2 o 3 segundos por superficie (>1200 mW/cm²).

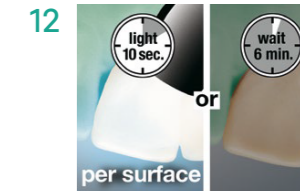

Fotopolimerice 10 s por superficie (>1200 mW/cm²) o espere 6 minutos.

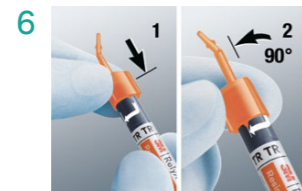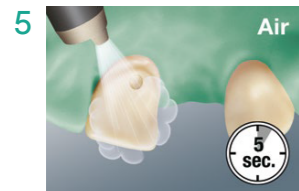

Para desbloquear la jeringa, gire completamente la punta de mezcla hasta que se detenga.



No use alta presión. Compruebe la posición de la punta de mezcla (imagen 7) si la fuerza de extrusión es elevada.

