



Apósito Transparente I.V. con Bordes Reforzados 3M™ Tegaderm™ 1610



Ficha Técnica

Descripción del producto

El Apósito Transparente I.V. con Bordes Reforzados 3M™ Tegaderm™ 1610 está compuesto por una fina película con papel protector y un adhesivo hipoalergénico sin látex. El apósito tiene una hendidura y está reforzado con material no tejido para proporcionar un mejor sellado alrededor de los catéteres y otros dispositivos. Es transpirable y permite un buen intercambio de oxígeno y vapor de humedad. Es resistente al agua e impermeable a los líquidos, las bacterias y los virus.* Un apósito intacto protege la zona frente a la contaminación externa.

Indicación de uso

Los apósitos transparentes Tegaderm™ se pueden usar para cubrir y proteger puntos de punción de catéteres y heridas, para mantener el ambiente húmedo en curación de heridas o para facilitar el desbridamiento autolítico, como apósito secundario, como protección para pieles en riesgo, para fijar dispositivos a la piel, para cubrir quemaduras de primer y segundo grado, y como protector de los ojos. No use el apósito para reemplazar suturas ni otros métodos primarios de cierre de heridas.

Información general

Registro Sanitario	INVIMA 2025DM-0013141 – R1
País de Fabricación	Estados Unidos.
Fabricante Legal	3M Company.
Contiene látex	El apósito no es fabricado con látex de caucho natural.
Vida Útil	Para conocer la vida útil, consulte la fecha de caducidad que figura en el envase.
Almacenamiento	Almacenar en un lugar fresco y seco. La esterilidad del apósito está garantizada a menos que su envase individual esté dañado o haya sido abierto.
Eliminación	Descarte el producto según el protocolo de la institución.

Instrucciones de uso

Preparación del Sitio de Inserción

- Realizar la tricotomía local si es necesario, utilizando una rasuradora eléctrica o recortar el vello.
- No se recomienda el uso de navajas de afeitar debido al riesgo de lesiones cutáneas, lo que puede aumentar la colonización bacteriana local.
- Utilizar el antiséptico según las normas establecidas por la institución y aplicar protector cutáneo si es necesario.

El sitio debe estar siempre limpio y seco para la aplicación del apósito, y es necesario esperar a que todas las soluciones se sequen completamente.

Aplicación

- Después de insertar el catéter, colocar la tira estabilizadora sobre el conector (hub) del catéter.
- Inmediatamente después, retirar completamente el liner del apósito 3M™ Tegaderm™ 1610 y, con una sola mano, colocarlo sobre el catéter visualizando el sitio de inserción y el conector para que la aplicación sea exacta y centrada.
- Después de aplicar el apósito, realizar presión digital cuidadosamente a lo largo de toda la superficie para asegurar una buena adhesión y evitar el desprendimiento precoz.
- Superponer los bordes de tela sobre la piel, pasando los extensores por la hendidura.
- Retirar cuidadosamente el marco, utilizando los dedos para ejercer presión digital sobre todos los extremos.
- Reforzar el apósito con la segunda tira estabilizadora.

Retiro

- Para retirar el 3M™ Tegaderm™ 1610 es necesario realizar el procedimiento exactamente al inverso.
- Retirar lentamente la tira de identificación y estabilización sujetando las extensiones del catéter.
- Sostener la piel y el catéter para minimizar el desplazamiento.
- Retirar la película lentamente. Continuar retirándola con cuidado hasta su completa eliminación.


Advertencias

El uso de apósitos 3M™ Tegaderm™ para cubrir parches de administración de medicamentos podría implicar a una absorción más rápida, lo que aumenta el riesgo de sobredosis.

Precauciones

1. Detenga cualquier hemorragia en el punto de punción antes de aplicar el apósito.
2. No estire el apósito durante la aplicación, ya que la tensión podría causar lesiones en la piel.
3. Antes de aplicar el apósito, asegúrese de que la piel esté limpia, sin restos de jabón y cremas, y bien seca para evitar que se irrite y asegurar una buena adhesión.
4. El apósito puede utilizarse en una zona infectada sólo bajo la supervisión de un profesional sanitario.
5. Las cremas antimicrobianas que contienen glicoles de polietileno pueden comprometer la resistencia de los apósitos transparentes Tegaderm™.

Presentaciones disponibles

Producto	Nombre del Producto	Código	Tamaño del apósito	Unidades / Caja	Cajas / Paquete
	Apósito Transparente I.V. con Bordes Reforzados 3M™ Tegaderm™	1610	57mm x 50mm	100	4



Solventum Colombia
Negocio Médico Quirúrgico
Calle 108 # 45-27 Paralelo 108
Edificio 3 Oficina 1601
Bogotá - Colombia
productos.co@solventum.com

3M Cuidado de la Salud ahora es Solventum

© Solventum 2025. Tegaderm, Solventum, el logotipo S, son marcas comerciales de Solventum o sus filiales. 3M y el logotipo de 3M son marcas comerciales de 3M. Otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Última actualización: 30/07/2025