


Guía del integrador químico

Para esterilización con Vapor 3M™ Attest™

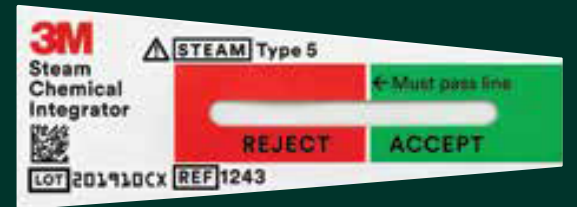

Colocación recomendada

Paquete de toallas o bata quirúrgica envueltas, paquete de toallas y campo

Coloque el IQ en el centro geométrico, no en la parte superior.



Contenedor suministrado por el fabricante (bandeja perforada de varios niveles, debe envolverse)*

Coloque los IQ en el centro en cada nivel.



Bandeja de instrumentos envuelta

Coloque el IQ en el centro geométrico, no en la parte superior.



Contenedores rígidos*

Coloque dos IQ en las esquinas opuestas de cada nivel.



Bolsas con tapa desprendible

Cuando un IQ interno es visible, no se requiere un IQ externo tipo 1.



Esterilización IUSS de contenedores rígidos*

Coloque dos IQ en esquinas opuestas.




Interpretación

Sin procesar




Procesado - ACEPTAR

Si la barra de color llega o pasa la ventana ACEPTAR, significa aprobado: se han cumplido las condiciones necesarias para la esterilización.

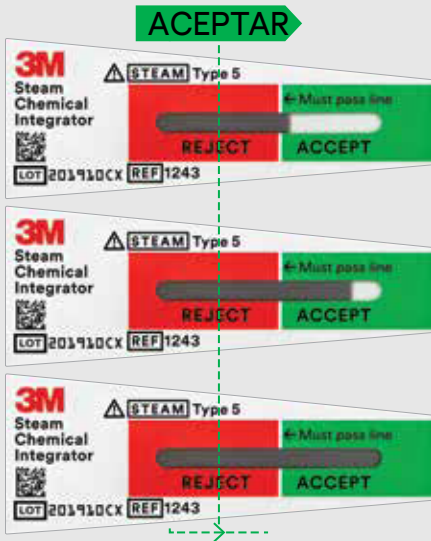

Procesado - RECHAZAR

Si la barra de color está en la región RECHAZAR o sobre la línea, se considera desaprobado. El paquete deberá ser reprocesado y deberá investigarse la causa del fracaso de la esterilización.

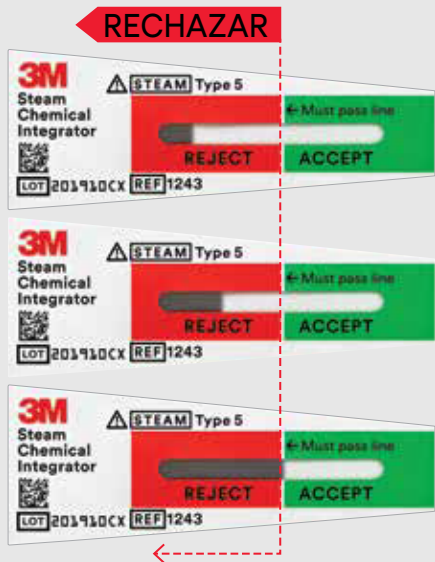

- ANSI/AAMI ST79:2017 Se deben colocar IQ internos
- a) para que un IQ sea visible para la persona que abre el paquete
 - b) en el área o las áreas que se consideran como menos accesibles para la penetración de vapor y
 - c) de acuerdo con todas las instrucciones de uso escritas pertinentes

Los Integradores Químicos para Vapor, Tipo 5 3M™ Attest™ cumplen con la norma ISO 11140-1:2014.

Póngase en contacto con su representante de 3M, llame a la línea directa 3M Health Care al 1-800-228-3957 o visite go.3M.com/steam.

* También se debe consultar a los fabricantes del dispositivo y del sistema de contenedores para obtener recomendaciones sobre la cantidad y la colocación de los indicadores químicos internos.



Solventum Medical Surgical
Solventum.com

Para más información, visite solventum.com

© Solventum 2026. Solventum, el logotipo S Y Attest son marcas comerciales de Solventum o sus filiales. 3M y el logotipo de 3M son marcas comerciales de 3M. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Impreso en los EE. UU. 70-2010-7298-3.