

伸縮テープのチューブ固定方法(切り込みを入れたΩ固定)

▲3M™ マルチポア™ 高通気性撥水テープ EX (5cm 幅) を使用

ポイント

- 始めから剥離紙を全て剥がさない
- 切り込みが入っていない側を、チューブ挿入口の方向に向ける
- 切り込み部分のテープ同士が、重なり合うよう皮膚に貼る

動画(使用方法) の キャプチャー画像を掲載した資料です。 動画の視聴とあわせてご活用ください。


動画 URL:http://go.3M.com/medical/cut_omega4733/(再生時間:1分24秒)





貼り方



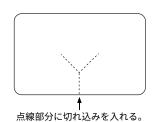

1 テープを適切な長さに切り、剥離紙のついた状態でテープ中央にY字の切れ込みを入れます。 テープの四隅を丸く切ることで、剥がれにくくなります。



3等分に折り目をつけます。



テープを左右に引っ張り(次へ)



4 剥離紙を3等分の折り目で 折り返します。



5 切れ込みが入っていない側をチューブ挿 入部の方向に向けて(次へ)



6 片側の剥離紙を剥がしながら、テープ を伸ばさずに皮膚へ貼ります。



7 もう一方の剥離紙を剥がしながら、テープ同士が重なり合うよう、伸ばさずに皮膚へ貼ります。



8 しっかり貼るためには、指の腹でやさし く圧着し、なじませるようします。 こうすることで、より安定した粘着力が 得られます。

切れ込みを入れた Ω (オメガ) 固定の効果

- ●チューブが直接皮膚に触れないため、 皮膚が圧迫されにくい
- 皮膚と垂直方向に引っ張る力を テープ全体で受け止めるため、 剥がれにくく固定力が高まる



※ 本資料は使用方法の一例であり、本品およびチューブ等の取扱説明書をご確認の上、個々の患者背景及び状態を含めた医師の総合的なご判断のもとで、固定方法をご検討ください。

2019年10月発行

スリーエム ジャパン株式会社

3M、マルチポアは、3M社の商標です。

カスタマーコールセンター