

## 膀胱留置カテーテルの固定方法

### 3M™ マルチポア™ 高通気性撥水テープ EX (10cm 幅) を使用

#### ポイント

- 始めから剥離紙を全て剥がさない
- テープは伸ばさないで貼る
- 貼った後は確実に圧着

動画(使用方法)のキャプチャー画像を掲載した資料です。  
動画の視聴とあわせてご活用ください。

動画 URL : <http://go.3M.com/medical/bladder4733/> (再生時間: 1分42秒)




### このような経験はありませんか？



膀胱留置カテーテルを固定するとき、テープを2枚重ねることによって、剥がれやすくなることはありませんか？  
テープ1枚で、カテーテルが皮膚に直接当たらないように固定する方法をご紹介します。

### テープの準備

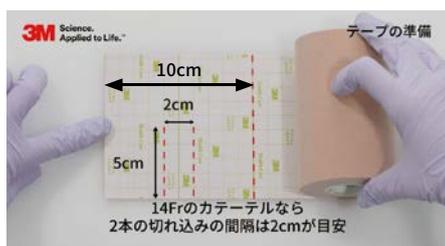

**1** 10cm 幅のテープを10cmに切り、中央まで2本の切れ込みを5cm入れます。



**2** 2本の切れ込みの間隔は、カテーテル周囲を1周巻ける長さになります。



**3** テープの四隅を丸く切ると、剥がれにくくなります。

### 貼り方



**1** 3等分に折り目をつけます。



**2** 切れ込み部分から剥離紙を左右に引っ張りカットします。



**3** 中央の剥離紙を剥がします。



**4** 切れ込みが入っていない側をカテーテル挿入部の方向に向けます。



**5** テープの中央からカテーテルに巻き付けてΩ(オメガ)固定し、テープの粘着面同士を貼り合わせます。



**6** 切れ込み部分もチューブに巻き付けます。



**7** 片方の剥離紙を剥がしながら、テープを伸ばさずに皮膚へ貼ります。



**8** もう片方の剥離紙を剥がしながら、切れ込み部分のテープ同士が重なり合うように伸ばさずに皮膚へ貼ります。



**9** 安定した粘着力を得るために、指の腹でやさしく圧着し、なじませるようにします。

※ 本資料は使用方法の一例であり、本品およびカテーテル等の取扱説明書をご確認の上、個々の患者背景及び状態を含めた医師の総合的なご判断のもとで、固定方法をご検討ください。

3M、マルチポアは、3M社の商標です。

2019年10月発行

スリーエム ジャパン株式会社  
医療用製品事業部  
<http://go.3M.com/medical-jp/>

© 3M 2019. All Rights Reserved.  
CAPT-045-A

カスタマーコールセンター  
製品のお問い合わせはナビダイヤルで  
 **0570-011-321**  
8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)