



3M™ Attest™ 1348 Indicatore chimico per perossido di idrogeno vaporizzato, Tipo 4


Non processato

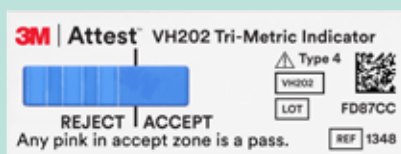

Processato

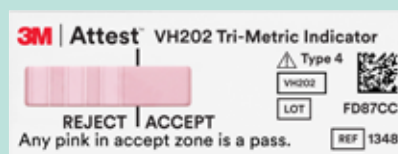

ACCETTA

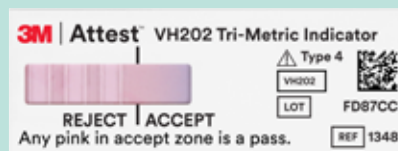

ACCETTA

Nei due esempi sopra riportati il viraggio di colore a rosa ha raggiunto la zona di **ACCETTAZIONE**, confermando che i valori dichiarati per i tre parametri critici di: tempo di esposizione, temperatura e concentrazione di perossido di idrogeno vaporizzato sono stati raggiunti.

Se il viraggio di colore a rosa è entrata in zona **ACCETTA**, il test viene considerato riuscito.

Processato



RIFIUTA



RIFIUTA

Nei due esempi sopra riportati il viraggio di colore a rosa NON ha raggiunto la zona di **ACCETTAZIONE**, indicando il risultato **RIFIUTA**, i componenti della confezione, il contenitore o il vassoio non sono stati esposti a sufficienti condizioni di sterilizzazione con perossido di idrogeno vaporizzato.

La confezione deve essere riprocessata e dovrebbe essere analizzata la causa del fallimento.

Se il viraggio di colore a rosa non ha raggiunto la zona **ACCETTA**, il test viene considerato fallito.

3M™ Attest™ Indicatori chimici di perossido di idrogeno vaporizzato, Tipo 4 conforme alla ISO 11140-1:2014.