

Einzigartiges Scherkopfdesign, herausragende Leistung

Der 3M™ Clipper Professional 9681 kombiniert ansprechendes Design mit herausragender Leistungsstärke und trägt dazu bei, das Infektionsrisiko zu reduzieren, Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten und die präoperative Vorbereitung für das Personal und die Patienten so angenehm wie möglich zu gestalten.

Auf einen Blick

- Betriebszeit bis zu 120 Minuten
- Nur 4 Stunden Aufladezeit
- Das Design des Einmalscherkopfes 9680 verhindert, dass Haut in den Scherkopf hineingezogen wird
- Durch die Positionierung des Einmalscherkopfes “von der Haut weg” wird das Risiko von Schnitten und Hautverletzungen minimiert
- Entfernt alle Arten von Kopf- und Körperhaaren egal ob fein oder grob, nass oder trocken
- Hilfreiche Akkuladestandsanzeige



3M™ Clipper 9681 in Verbindung mit
dem 3M™ Clipper Einmalscherkopf 9680

Einfache Aufladung, Nutzung und Reinigung

Scherköpfe auswechseln



Anbringen

Entfernen Sie die Schutzabdeckung von der Verpackung des Scherkopfes. Halten Sie den Clipper-Griff über den Scherkopf und lassen Sie ihn in Position gleiten, bis es klickt. Achten Sie darauf, dass Sie den Einmalscherkopf dabei nicht berühren!



Entfernen

Halten Sie den Scherkopf so, dass er nach unten zeigt. Drücken Sie mit dem Daumen auf den Entriegelungsknopf und entsorgen Sie den benutzten Scherkopf in einem geeigneten Behälter.

Hinweis: Um Kreuzkontaminationen zu vermeiden, benutzen Sie bitte für jeden Patienten einen neuen Einmalscherkopf.

Clipping



Schieben

Setzen Sie den Clipper wie einen Stift mit dem Einmalscherkopf flach oder in einem leichten Winkel auf der Haut des Patienten auf. Schieben Sie den Clipper vorsichtig entgegen der Haarwuchsrichtung des Patienten vorwärts.

Hinweis: Wenden Sie niemals übermäßigen Druck an, wenn Sie den Clipper auf der Haut des Patienten entlang schieben!



Ziehen

Positionieren Sie den Einmalscherkopf flach oder in einem leichten Winkel auf der Haut des Patienten und ziehen Sie den Clipper vorsichtig in Ihre Richtung.

Hinweis: Kratzen Sie nicht mit dem Einmalscherkopf über die Haut des Patienten! Bei einer nicht ordnungsgemäßen Verwendung schneidet der Clipper die Haare nicht.

Reinigungsmöglichkeiten

Eintauchen

Wenn der Clipper ausgeschaltet und der Einmalscherkopf entfernt ist, tauchen Sie den Clipper in eine geeignete Desinfektionslösung ein. Trocknen Sie den Clipper sorgfältig bevor Sie ihn neu aufladen oder erneut verwenden.

Hinweis: Tauchen Sie den Clipper nicht tiefer als 15 cm oder länger als 15 Minuten in Wasser oder eine andere Lösung ein.



Abspülen

Spülen Sie das Handstück -nachdem Sie den Clipper ausgeschaltet und den Scherkopf entfernt haben - unter fließend, warmem Wasser ab. Trocknen Sie den Clipper sorgfältig, bevor Sie ihn neu aufladen oder erneut verwenden.



Abwischen

Wischen Sie den Clipper-Griff -wenn der Clipper ausgeschaltet und der Einmalscherkopf entfernt ist - mit einem geeigneten Desinfektionstuch ab.

Aufladen

Vor dem erstmaligen Gebrauch muss der Clipper drei Stunden aufgeladen werden. Stellen Sie das Handstück nach jeder Verwendung in die an den Strom angeschlossene Ladestation. Der Clipper kann bei einer Ladezeit von 4 Stunden 120 Minuten lang ohne Kabel verwendet werden. Wenn der Clipper vollständig aufgeladen ist, leuchten die oberen drei LED-Anzeigen grün und die unteren beiden gelb. Wenn der Akku aufgeladen werden muss, blinkt die unterste LED-Lampe auf. Während des Aufladens blinken die LED-Lampen auf. Der Ladestatus lässt sich anhand der zum jeweiligen Zeitpunkt aufblinkenden Lampe feststellen.

Katalog Nummer	Produktbeschreibung	Stück /Pkg.	Pkg. / BE
9680	3M™ Clipper Professional Einmalscherkopf	50	1
9681	3M™ Clipper Professional	1	1
9683	3M™ Clipper Professional Ladestation mit Kabel	1	1



Solventum Medical Surgical

Solventum Germany GmbH
Edisonstrasse 6, 59174 Kamen, Germany
www.solventum.com/de-de

KCI Medical GmbH
Eggstrasse 91, Rüschlikon CH 8803, Switzerland
www.solventum.com/de-ch

KCI Austria GmbH
Am Europlatz 2, Euro Plaza 4, 1120 Wien, Austria
www.solventum.com/de-at

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Solventum-Ansprechpartner.

© Solventum 2026. Solventum und das S-Logo sind Marken von Solventum oder dessen verbundenen Unternehmen. 3M und das 3M-Logo sind Marken von 3M. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.