

La forma comprobada de monitorear el desempeño de la esterilización por vapor



3M™ Comply™ Bowie-Dick Plus Paquete de Prueba con hoja de prueba de alerta temprana 00135LF (AAMI Tipo 2*)**

3M™ Comply™ Bowie-Dick Plus Paquete de Prueba está diseñado para monitorear la eficiencia de remoción de aire de los esterilizadores de remoción dinámica de aire a 132 °C - 134 °C. Detecta aire residual en la cámara del esterilizador por filtraciones de aire, fallas de remoción de aire y vacío inadecuado, los cuales pueden comprometer la esterilización. Con 3M™ Comply™ Bowie-Dick Plus Paquete de Prueba, puede estar seguro de que está haciendo lo mejor por sus instalaciones y sus pacientes.



Hoja de prueba de alerta temprana
El indicador de alerta temprana identifica posibles problemas con el esterilizador.



Fácil interpretación de color
Las líneas indicadoras amarillas cambian a color café oscuro/negro cuando la extracción de aire es efectiva.



Sin plomo
Ofrece un alto nivel de rendimiento en una solución desechable.



Confiable
Ofrece el mismo desempeño que el paquete de toallas Bowie-Dick ANSI/AAMI ST™.

La alerta temprana beneficia a su institución

Además de la hoja de prueba primaria de Bowie-Dick, la hoja de indicador de advertencia temprana adicional le advierte los problemas del esterilizador para que se puedan abordar de inmediato y evitar demoras quirúrgicas.



\$7.000 a \$17.000

dólares americanos (USD) en costos de infecciones del sitio quirúrgico relacionadas con demoras quirúrgicas para injerto de derivación de arteria coronaria y resecciones de colon y pulmón.¹

*De acuerdo con la norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2014.

**Tiene un desempeño equivalente al paquete de toallas Bowie-Dick citado en la norma ANSI / AAMI ST79. 1. Vogel TR, Dombrovskiy VY, Lowry SF. In-hospital delay of elective surgery for high volume procedures: the impact on infectious complications. J Am Coll Surg 2010; 211:784-790.


Centros de cuidado de la salud de todo el mundo han utilizado 3M™ Comply™ Bowie-Dick Paquete de Prueba con confianza

Todos los productos 3M™ Comply™ Bowie-Dick tienen el mismo indicador químico amarillo que cambia a color café oscuro / negro si el esterilizador está funcionando.

Cualquier cambio de color inesperado, como que el centro de la hoja de prueba sea más claro o de un color diferente que los bordes, indica que hay una filtración de aire en la cámara durante el ciclo.

Si ve hojas de prueba que muestran un color no uniforme, ese esterilizador debe apagarse y deshabilitarse hasta que se investigue más a fondo.

Nota: Las hojas de prueba se pueden guardar para registros de garantía de calidad.

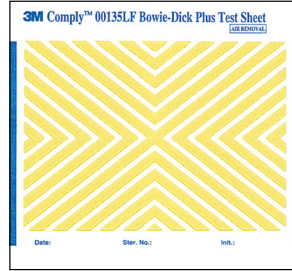


Sin procesar

Las líneas diagonales son amarillas.



Procesado

(Aprobado)

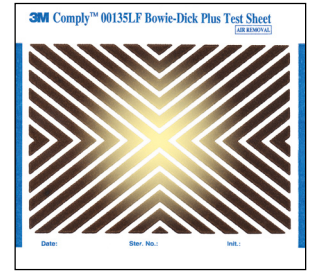

Procesado

(Falla de remoción de aire)
El cambio de color no uniforme (generalmente más claro en el medio) indica una filtración de aire durante el ciclo.

Mejores prácticas para usar 3M™ Comply™ Bowie-Dick Paquete de Prueba

- La prueba de Bowie-Dick siempre debe realizarse en un esterilizador caliente para evitar falsas fallas.
- Coloque Bowie-Dick Paquete de Prueba en el estante inferior del carrito, sobre el desagüe, en un esterilizador vacío.
- Bowie-Dick Paquete de Prueba debe usarse diario; después de instalar o reubicar un esterilizador; después de un mal funcionamiento del esterilizador; después de fallas en el proceso de esterilización; y después de cualquier reparación importante.

Información para pedidos

Producto	Nombre del producto	Empaque	Por estuche
490	3M™ Attest™ Autolectora 490	1 unidad/caja	1 caja
41482V	3M™ Attest™ Paquete de Desafío Súper Rápido 5 Steam-Plus	24 cada/caja	1 caja
1491	3M™ Attest™ Indicador Biológico de Lectura Súper	50 cada/caja	4 cajas
1492V	Rápida	50 each/box	4 cajas
1243	3M™ Comply™ Cinta Indicadora de Vapor sin plomo	500 cada/bolsa 100 cada/bolsa	2 bolsas 10 bolsos
1355	3M™ Comply™ Lead Free Steam Indicator Tape	Rollo de 18 mm Rollo de 24 mm	28rollos 20 rollos
00135LF	3M™ Comply™ Bowie-Dick Plus Paquete de Prueba con hoja de prueba de alerta temprana	20 paquetes/caja	4 cajas



Juntos podemos elevar el nivel de atención al paciente.

Para más información, contacte a su representante de ventas local de Solventum Latinoamérica.



División de Soluciones Médicas
3M Cuidado de la Salud
2510 Conway Ave.
St. Paul, MN 55144 USA
Teléfono 1-800-228-3957
Web 3M.com/Medical

Para más información visite [solventum.com/es-mx/home](https://www.solventum.com/es-mx/home)

© Solventum 2025. Solventum, el logotipo S y Comply son marcas comerciales de Solventum o sus filiales. 3M y el logotipo de 3M son marcas comerciales de 3M. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.