

1633 3M™ Tegaderm™ I.V. Fixierverband für periphere Katheter ohne Port

Applikation




1 Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie den sterilen Verband.



2 Entfernen Sie zuerst die mittlere Schutzfolie mit den beiden Fixierstreifen vom Verband.



3 Positionieren Sie den transparenten Film über der Einstichstelle. Achten Sie darauf, den Verband bei der Applikation nicht zu überdehnen.

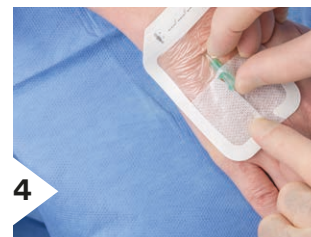

4 Überlappen Sie das Klebevlies unterhalb des Katheterhubs.



5 Danach entfernen Sie vorsichtig den Applikationsrahmen, glätten den Verband von innen nach außen und modellieren ihn mit leichtem Druck an.



6 Befestigen Sie den ersten Fixierstreifen unterhalb des Katheterhubs.



7 Danach den zweiten Fixierstreifen oberhalb der Kanüle fixieren.



8 Dokumentieren Sie den Verbandwechsel entsprechend der hausinternen Vorschriften und befestigen Sie den Dokumentationsstreifen am Verbandrand.

Entfernen



1 Entfernen Sie zuerst den Dokumentationsstreifen.



2 Danach können Sie den Verband langsam und in flachem Winkel in Richtung der Einstichstelle entfernen. Stabilisieren Sie dabei die Kanüle mit der anderen Hand. Alternativ kann der transparente Teil des Verbands auch mittels Stretchtechnik entfernt werden.

