

1633 3M™ Tegaderm™ I.V. Fixierverband für periphere Katheter mit Port

Applikation



1 Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie den sterilen Verband.



2 Entfernen Sie zuerst die mittlere Schutzfolie mit den beiden Fixierstreifen vom Verband.



3 Entfernen Sie die Fixierstreifen von der Schutzfolie.



4 Fixieren Sie die Flügel der Venenverweilkanüle.



5 Entfernen Sie die Schutzfolie.



6 Positionieren Sie den transparenten Film über der Einstichstelle. Achten Sie darauf, den Verband bei der Applikation nicht zu überdehnen und überlappen Sie nach Möglichkeit das Klebevlies unterhalb des Katheterhubs.



7 Danach entfernen Sie vorsichtig den Applikationsrahmen, glätten den Verband von innen nach außen und modellieren ihn mit leichtem Druck an.



8 Dokumentieren Sie den Verbandwechsel entsprechend der hausinternen Vorschriften und befestigen Sie den Dokumentationsstreifen am Verbandrand.

Entfernen



1 Entfernen Sie zuerst den Dokumentationsstreifen.



2 Danach können Sie den Verband langsam und in flachem Winkel in Richtung der Einstichstelle entfernen. Stabilisieren Sie dabei die Kanüle mit der anderen Hand.



3 Alternativ kann der transparente Teil des Verbands auch mittels Stretchtechnik entfernt werden.



4 Entfernen Sie die Fixierstreifen.