

1681 3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced Fixierverband für periphere Katheter mit Port

Applikation



1 Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie den sterilen Verband.



2 Lösen Sie die beiden Fixierstreifen an den klebstofffreien Laschen.



3 Befestigen Sie damit die Flügel der PVK.



4 Positionieren Sie das transparente Fenster mittig über der Einstichstelle ohne den Verband dabei zu dehnen.



5 Überlappen Sie nach Möglichkeit das Klebevlies unter dem Katheterhub.



6 Entfernen Sie den Applikationsrahmen vorsichtig in flachem Winkel und drücken Sie währenddessen den Verband mit den Fingern der anderen Hand leicht an.



7 Modellieren Sie den Verband von der Mitte nach außen hin gut an.



8 Befestigen Sie den Dokumentationsstreifen am Verbandrand.

Entfernen



1 Entfernen Sie zuerst den Verband von dem Dokumentationsstreifen.



2 Danach können Sie den Verband langsam und in flachem Winkel in Richtung der Einstichstelle entfernen. Stabilisieren Sie dabei die Kanüle mit der anderen Hand.

