


Applikation



1 Desinfizieren Sie die Haut gemäß des Klinikstandards und achten Sie darauf, dass die Haut vor der Anlage vollständig trocken und fettfrei ist. Entfernen Sie die Trägerfolie.




2 Positionieren Sie den transparenten Film über der Einstichstelle. Danach entfernen Sie vorsichtig den Applikationsrahmen, glätten den Verband von innen nach außen und modellieren ihn mit leichtem Druck an. Achten Sie darauf, den Verband bei der Applikation nicht zu überdehnen.

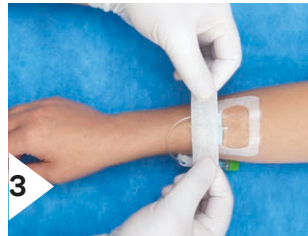

3 Befestigen Sie den Fixierstreifen am distalen Ende des Verbands und fixieren Sie gleichzeitig die Extensionsleitung.



4 Dokumentieren Sie die Informationen zum Verbandwechsel auf dem Dokumentationsstreifen. Dieser kann auch zur zusätzlichen Sicherung der Extensionsleitung verwendet werden.

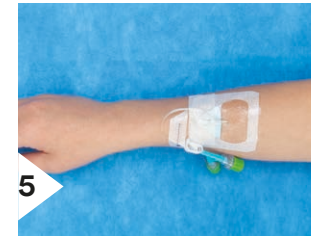

5 Wechseln Sie den Verband spätestens alle 7 Tage. Jeder durchfeuchtete, verschmutzte oder nicht mehr sicher haftende Verband sollte sofort erneuert werden.

Entfernen



1 Entfernen Sie zuerst den Dokumentations- und den Fixierstreifen. Danach können Sie den Verband langsam und in flachem Winkel in Richtung der Einstichstelle entfernen. Stabilisieren Sie dabei die Kanüle mit der anderen Hand.