

1685 3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced Fixierverband für zentrale Venenkatheter (ZVK)


Applikation



1 Tragen Sie 3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz im Abstand von 2 cm rund um die Einstichstelle auf.



2 Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie den sterilen Verband.

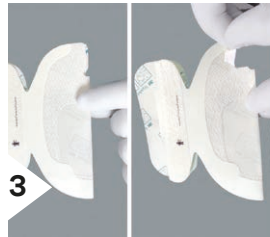


3 Vor dem Abziehen der Schutzfolie muss die Schlüssellochkerbe an der Perforation geöffnet werden. Ziehen Sie erst danach die Schutzfolie vom Verband ab.



4 Positionieren Sie das transparente Fenster über der Einstichstelle und glätten Sie den Verband von Innen nach Außen. Achten Sie darauf, den Verband nicht zu dehnen.



5 Modellieren Sie den Verband rund um die Schlüssellochkerbe und kleben Sie die Enden des Verbands leicht überlappend an.

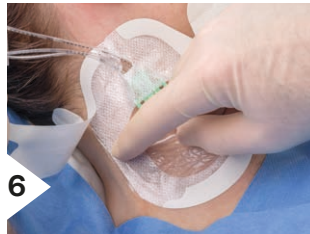

6 Entfernen Sie den Applikationsrahmen vorsichtig in flachem Winkel und drücken Sie währenddessen den Verband mit den Fingern der anderen Hand leicht an.



7 Befestigen Sie den breiten Fixierstreifen unterhalb der Katheterlumen.



8 Nutzen Sie den Dokumentationsstreifen gemäß Ihrer hausinternen Vorschriften und sichern Sie Katheterlumen.

Entfernen



1 Entfernen Sie den Dokumentationsstreifen und öffnen Sie den Fixierstreifen an der Perforation.



2 Danach können Sie den Verband langsam und in flachem Winkel in Richtung der Einstichstelle entfernen. Stabilisieren Sie dabei den Katheter mit der anderen Hand um eine Dislokation zu vermeiden.

