

Applikation



Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie den sterilen Verband. Tragen Sie vor der Applikation bei Bedarf 3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz im Abstand von 2 cm rund um die Einstichstelle auf.



Entfernen Sie die Schutzfolie des Verbands und positionieren Sie das transparente Fenster mittig über der Einstichstelle ohne den Verband dabei zu dehnen.




Modellieren Sie den Verband von Innen nach Außen mit leichtem Druck an.



Entfernen Sie den Applikationsrahmen vorsichtig in flachem Winkel und drücken Sie währenddessen den Verband mit den Fingern der anderen Hand leicht an.



Befestigen Sie den breiten Fixierstreifen unterhalb der Katheterlumen.

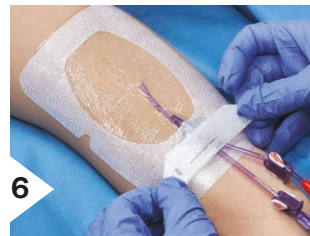

Nutzen Sie den Dokumentationsstreifen gemäß Ihrer hausinternen Vorschriften und sichern Sie die Katheterlumen.

Entfernen



Entfernen Sie zuerst den Dokumentations- und den Fixierstreifen.



Danach können Sie den Verband langsam und in flachem Winkel in Richtung der Einstichstelle entfernen.



Stabilisieren Sie dabei den Katheter mit der anderen Hand um eine Dislokation zu vermeiden.

