

Sparadraps 3M™ – quatre questions pour de bons conseils

Le choix d'un sparadrap adapté joue un rôle primordial.

Posez donc ces 4 questions à vos clients afin de pouvoir les conseiller de manière optimale.

Contraintes
légères

Contraintes
élevées



Faible pouvoir
adhésif

Fort pouvoir
adhésif

Courte
durée

Longue
durée



Sparadrap
en plastique

Sparadrap
papier/non tissé

⊖

Mouvements de la peau

⊕



Endroit sec

Endroit humide

1 Quelle utilisation ?

- Il s'agit en premier lieu de définir l'utilisation prévue, par ex. la fixation de pansements, de tubulures ou de cathéters, etc.
- Évaluez l'équilibre nécessaire entre le pouvoir adhésif et la tolérance cutanée.

2 Durée d'utilisation ?

- La durée d'utilisation est toujours en relation directe avec l'objectif.
- Prenez en considération les différences entre les sparadraps en plastique, en papier et en non tissé pour une utilisation de courte ou de longue durée.

3 Adaptation à l'anatomie ?

- Des mouvements ou des gonflements peuvent se produire au niveau des articulations ou en cas d'oedème.
- Réduisez le risque de blessures cutanées grâce au choix d'un sparadrap adapté de par sa souplesse et son élasticité.

4 Quelles conditions ?

- En fonction de l'endroit du corps concerné, le sparadrap est soumis à l'humidité, la sueur, la moiteur, des suintements, etc.
- Minimisez le risque d'un décollement grâce au choix d'un sparadrap spécialement conçu pour résister à l'eau ou à la transpiration de la peau.



Un sparadrap adapté pour chaque utilisation

Multifonctionnel



3M™ Micropore™ Silicone
Sparadrap silicone

Soin des peaux délicates

- Texture douce microperforée pour le confort du patient
- Se décolle sans douleur
- Repositionnable



3M™ Micropore™
Sparadrap non tissé

Renouvellements fréquents de pansements

- Respirant et doux pour la peau
- Adapté pour la fixation de pansements
- Bonne adhérence même sur une peau humide



3M™ Transpore™
Sparadrap plastique micro-perforé

Excellente adhérence

- Fixation sûre et rapide de sondes, drains, tubulures, etc.
- Facile à découper sans ciseaux et dans les deux sens

Élastique



3M™ Medipore™
Sparadrap non tissé

Étirable pour une liberté de mouvements optimale

- Adaptable et souple
- Avec support papier, facile à découper
- Laisse respirer la peau tout en garantissant une tenue optimale

Cohésif



3M™ Coheban™
Bande élastique cohésive

Polyvalente pour la fixation et la stabilisation

- Cohésive, n'adhère que sur elle-même, sans coller à la peau
- S'adapte à l'anatomie
- Ne glisse pas

Ces dispositifs médicaux Solventum sont destinés à être utilisés sur une peau intacte. Précaution d'emploi des sparadraps: ne pas poser en tension.



Les produits marqués d'une plume offrent un fort pouvoir adhésif tout en minimisant les lésions cutanées.

Solventum Medical Surgical

Solventum France SAS
1 Parvis de l'Innovation, 95006 Cergy
Pontoise Cedex, France
solventum.com/fr-fr

Pour plus d'informations, contactez votre interlocuteur Solventum.

© Solventum 2026. Solventum et le logo S sont des marques déposées de Solventum ou de ses affiliés. 3M et le logo 3M sont des marques déposées de 3M. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. MSD-00439.