

# 3M™ Kerramax Care™ Super-Absorbent Dressing


## Pansement 3M™ Kerramax Care™ Technique de pliage

Les pansements Kerramax Care sont hautement conformables et peuvent être pliés pour s'adapter à une variété de plaies différentes.

### Entre les orteils/doigts




**1** Pliez un 10cm x 22cm en deux dans le sens de la longueur

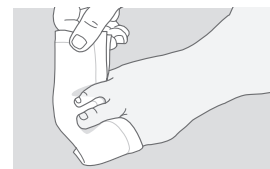


**2** Tisser entre orteils/doigts


### Talon/coude

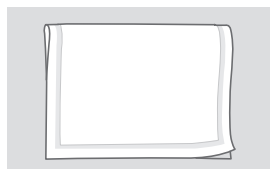


**1** Pliez un 10cm x 22cm à moitié

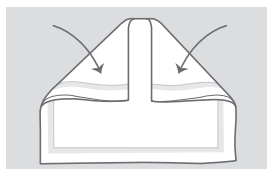


**2** Pliez chaque coin vers l'intérieur

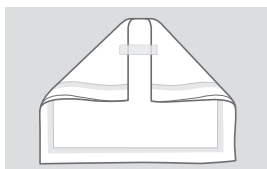

**3** Placez le ruban pour tenir coins pliés en place

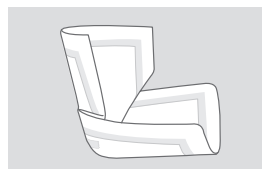


**4** Ouvrez plié pansement

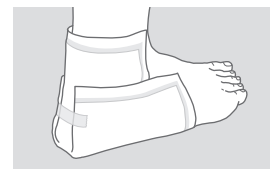

**5** Placer sur le talon/le coude


### Jambe/bras

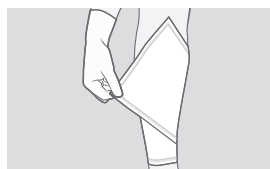

**1** Placez un 20cm x 50cm sur la base de la jambe/du bras



**2** Enveloppez le pansement autour de la jambe/du bras

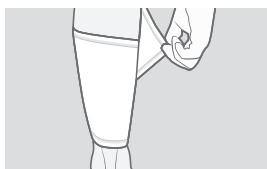


**3** Superposez le pansement assurez-vous qu'il n'y a pas lacunes



**4** Fixez le pansement avec rétention ou compression bandage

### Quel est le volume de liquide que les pansements Kerramax Care peuvent absorber ?

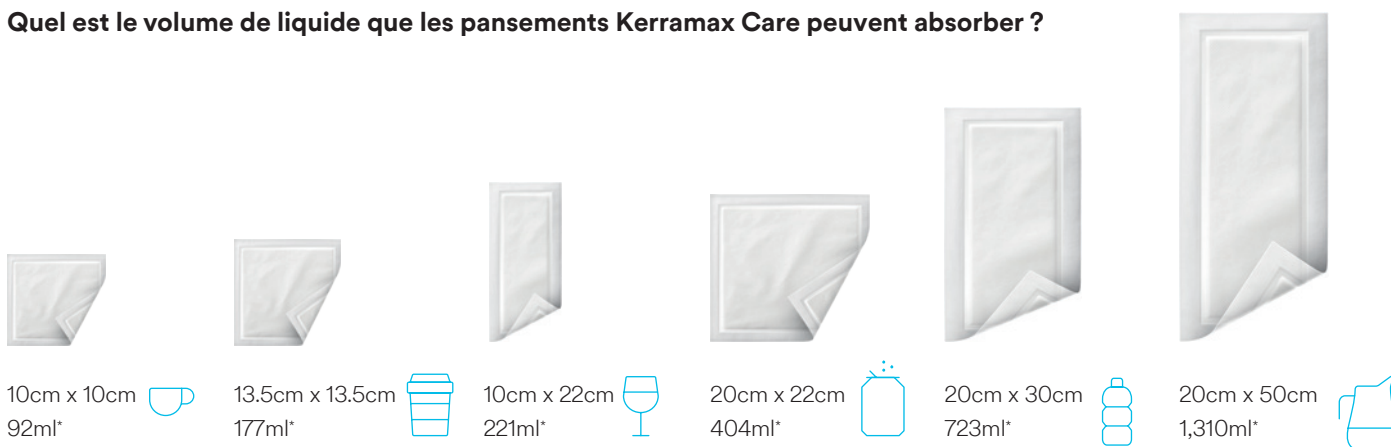

Pour plus d'informations, veuillez contacter  votre délégué commercial 3M local,  
 GD Medical via +32(0) 2 808 58 80 / [gdmedical.be](http://gdmedical.be).

\* Lodhi, N. & Warde, D. Free-swell absorbency and absorbency under compression testing of Kerramax Care (all SKUs) – internal report CHC R839. Crawford Healthcare Ltd. Knutsford, UK: 2019.

Remarque: il existe des indications, contre-indications, avertissements, précautions et informations de sécurité spécifiques pour ces produits et thérapies. Consulter un médecin et les instructions du produit avant utilisation. Les instructions d'utilisation sont destinées aux professionnels de santé.

© 2022 3M. Tous les droits sont réservés. 3M et les autres marques présentées sont des marques commerciales et/ou des marques déposées. Utilisation non autorisée interdite. OMG361941. EB12-0220FR