
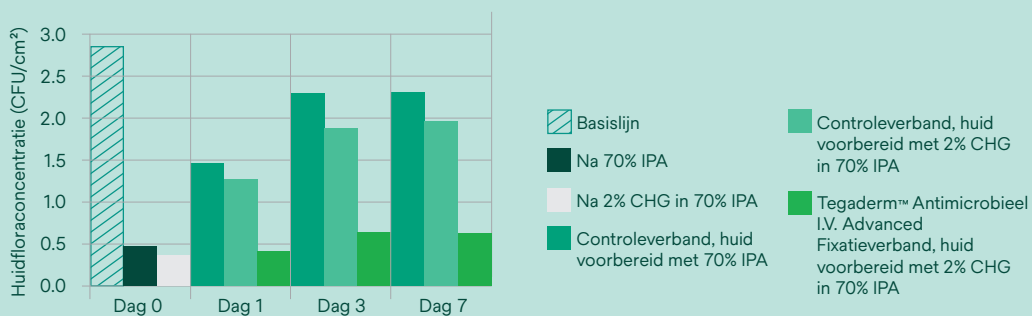


3M™ Tegaderm™ Antimicrobieel I.V. Advanced Fixatieverband 9132

Geïntegreerd ontwerp combineert antimicrobiële bescherming met zichtbaarheid van de insteekplaats, katheterfixatie en consistent aanbrengen voor perifere infusen.

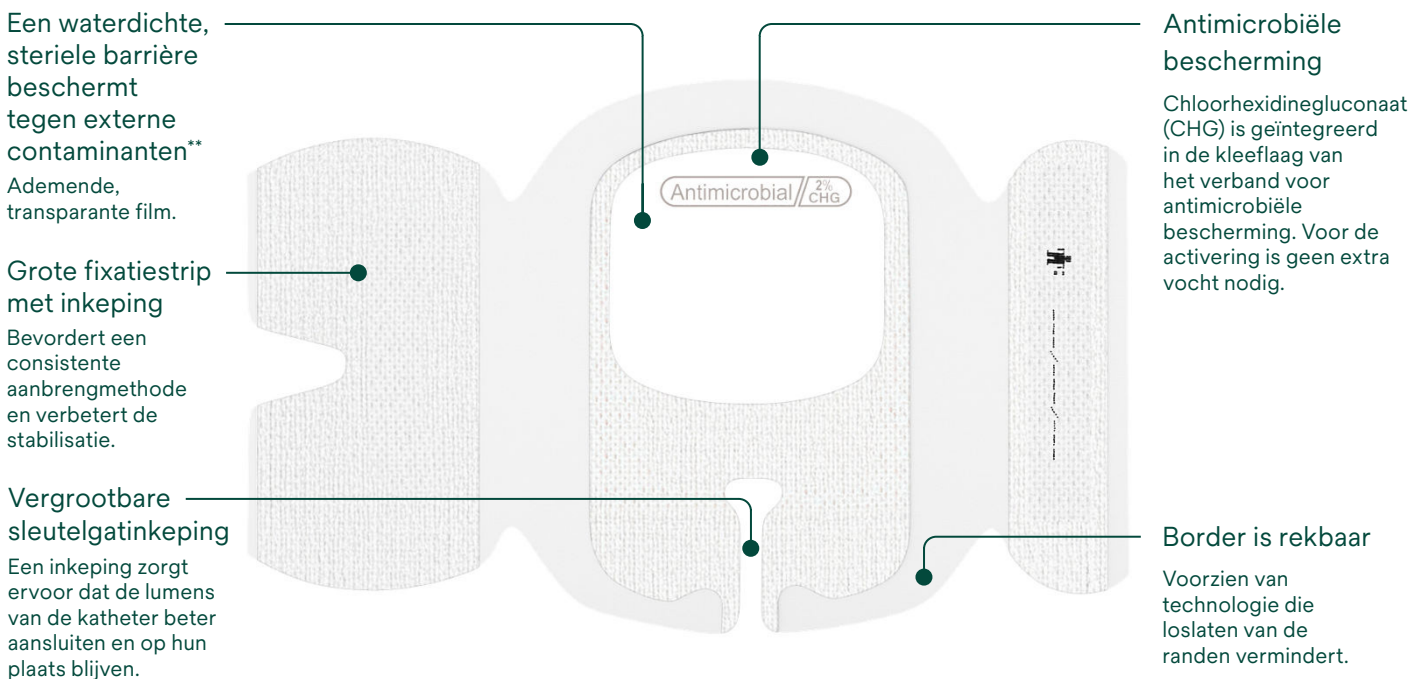

Antimicrobiële bescherming

Onderdrukt aantoonbaar de hergroei van normale huidflora op voorbereide huid tot 7 dagen.

Zichtbaarheid van de insteekplaats

Dankzij het transparante verband kunnen complicaties aan de insteekplaats vroegtijdig worden vastgesteld.

Katheterfixatie

Ontworpen om beweging en verplaatsing van de katheter tot een minimum te beperken.


Gebruiksvriendelijk

Het verband met CHG-kleeflaag is ontworpen om een gestandaardiseerde, juiste aanbrengmethode te garanderen.

*Compatibel met perifere infuussystemen die veel worden gebruikt bij de Velano Vascular™ PIVO™ bloedafnameprocedure, waaronder het Velano EXT™ Stabilization Device.

** *In-vitro*-tests hebben aangetoond dat de film een barrière vormt tegen virussen met een diameter van 27 nm of groter zolang het verband intact blijft en niet lekt.

1. Gegevens geregistreerd bij 3M. EM-05-305455.

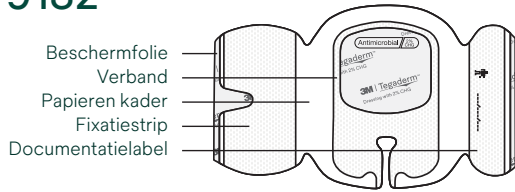

Vorbereiden



Bereid de insteekplaats voor volgens het protocol van uw instelling. Zorg dat de insteekplaats helemaal droog is.


Drukken



Met één hand aanbrengtechniek

Rek het verband niet uit tijdens het aanbrengen. Haal de beschermfolie van het verband en plaats het venster over de insteekplaats, waarbij de I.V.-slang gelijk loopt met de fixatie-inkeping. Oefen met één hand stevige druk uit op het hele verband voor optimale hechting, terwijl u met de andere hand het papieren kader verwijdert.

Bevestigen

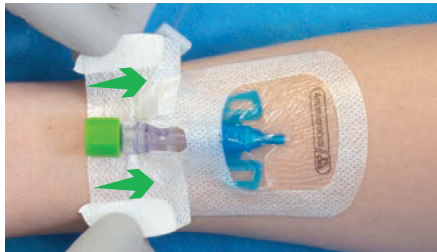

Breng een fixatiestrip aan onder het connectiepunt. Verwijder de niet-klevende tabjes.

Bevestigen



Documenteer de informatie over het vervangen van het verband op het documentatielabel. Breng het documentatielabel aan op het verband, over het (de) katheterlumen(s). Verwijder de niet-klevende tabjes. Fixeer de I.V.-slang met tape.


Monitoren



Verbandwissel:

- Ten minste elke 7 dagen
- Als het verband loslaat, vuil of vochtig is geworden
- Volgens het protocol van de instelling

Verwijderen

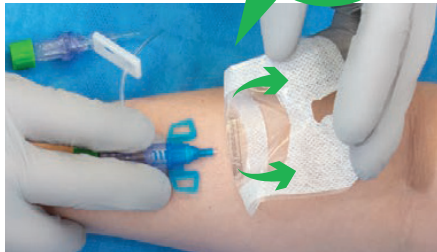

Verwijder de kleefstrips. Verwijder het verband vanaf de inkeping, in de richting van de insteekplaats. Gebruik hierbij de verwijdermethode 'laag en langzaam'. Voorkom huidtrauma door het verband dicht bij de huid langzaam naar achteren te trekken, in plaats van omhoog.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het product voor andere belangrijke informatie.

Bestelinformatie

Product	Productnummer	Totaal verbandafmeting	Verbanden/ doos	Dozen/ omdoos
	9132	7 cm x 8,5 cm	25	4