


Applikations- und Entfernungsanleitung für 3M™ Tegaderm™ Absorbent Transparenter Hydroaktivverband



Applikations- und Entfernungsanweisung – Abdomen

Vor der Applikation Hinweis: Die Richtlinien der Einrichtung zur Infektionskontrolle befolgen.


1. Die chirurgische Inzision und die umgebende Haut gründlich reinigen. Die umgebende Haut vor Applikation des Verbandes trocknen lassen.
2. Die richtige Verbandsgröße für die chirurgische Inzision auswählen. Das Acrylkissen sollte sich um 1 cm über die Inzisionsfläche hinaus erstrecken. Das Acrylkissen nicht zurechtschneiden.

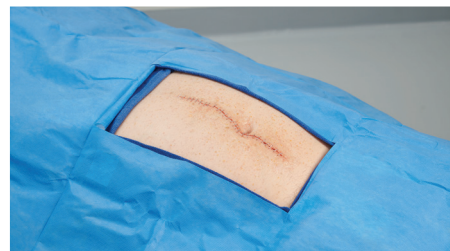

Applikation des Transparentverbandes



Die Verpackung öffnen und den sterilen Verband herausnehmen. Das Trägerpapier abziehen, um die Klebefläche freizulegen.

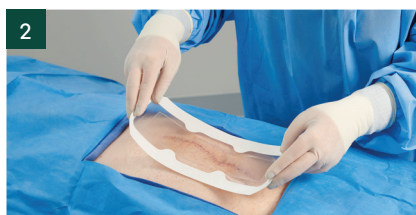

Den Verband mit der Klebeseite nach unten über der Inzision zentrieren.



Den Verband vorsichtig von der Mitte nach außen andrücken. Ohne Dehnung anlegen.



Den Rahmen vorsichtig und flach abziehen und den Kleberand leicht andrücken.



Den Verband mit leichtem Druck auf den Kleberand anmodellieren, um optimale Haftung zu gewährleisten.

Tipp

Es ist normal, dass Wundflüssigkeit vom Kissen absorbiert wird. Flüssigkeit, die sich bis zum Rand des Kissens bewegt, erfordert keinen Verbandswechsel. Ein Verbandswechsel sollte auf Anweisung des Arztes erfolgen.

Entfernen des Transparentverbandes

Bitte beachten, dass Wundverschlussstreifen beim Entfernen des 3M™ Tegaderm™ Absorbent möglicherweise mit entfernt werden.

1. Den Kleberand vorsichtig von der Haut anheben. Diesen Vorgang kontinuierlich fortsetzen.
2. Den Kleberand komplett abheben, bis die Hautoberfläche freiliegt.
3. Den Verband langsam entfernen und dabei übereinander falten.

