


APC™ Flash-Free 接着材つき アプライアンス システムを  
デモ体験した矯正歯科医師の先生方に伺いました。

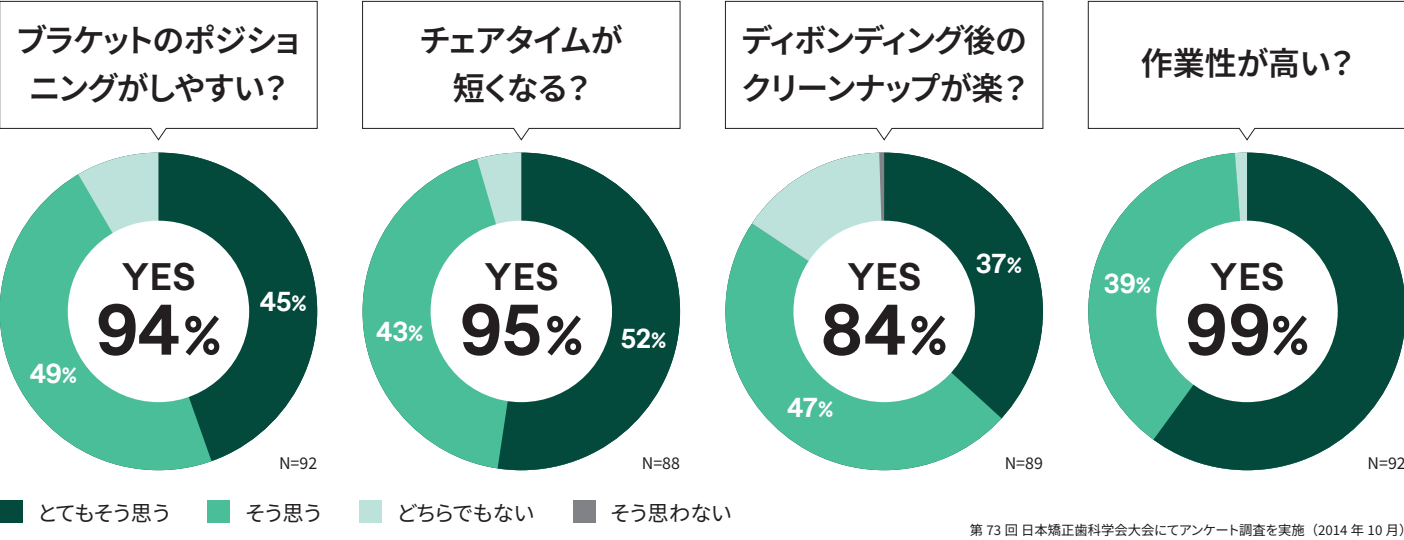

第 73 回 日本矯正歯科学会大会にてアンケート調査を実施（2014 年 10 月）

APC™ Flash-Free 接着材つき アプライアンス システムは、  
各種ブラケットやチューブ製品に採用されています



クリアティ™ ウルトラ  
セルフ ライゲーティング ブラケット

“機能性”と“審美性”の融合。効果的かつ効率的な治療を可能にするパッシブセルフライゲーティングブラケットです。



ビクトリー シリーズ™ ミニチューブ

チューブの近遠心長が短いコンパクトサイズです。  
ベース面は臼歯の近真心隅角部まで延長し、適合性と接着強度を高めています。



クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケット

優れた審美性だけでなく、ブラケットに求められる高いパフォーマンスを追求したセラミック ブラケットです。



ビクトリー シリーズ™ スーペリア フィット チューブ

快適な装着のための形状とワイヤーの挿入しやすさ。  
ポジショニングを簡単・スピーディにする為の工夫を盛り込んだ、バッカルチューブです。

販売名:クリアティ セラミック ブラケット 認証番号:219AKBZX00120000 / 販売名:ビクトリー シリーズ チューブ 認証番号:219AKBZX00174000

※本カタログは2024年10月現在の製品、認証番号、届出番号、希望医院価格を掲載しております（価格に消費税は含まれていません）。  
※製品内容、価格等は、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。  
※商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「電子添文」をお読みください。  
Solvantumおよびそのロゴ、その製品名等に使用される商標はSolvantum及びその関連会社の商標です。3Mおよびそのロゴは3Mおよびその関連会社の商標です。その他の商標はそれぞれの権利者の商標です。



ソルベンタム合同会社  
デンタルソリューション事業部

<https://www.solvantum.com/ja-jp/home/oral-care/>

3Mのヘルスケア部門はソルベンタムという独立した企業になりました。

Please Recycle. Printed in Japan.  
© Solvantum 2024. All Rights Reserved.  
UTK-180-C(1024)e.

矯正歯科コールセンター

0120-296-303



※受付時間／9:00～17:30 月～金（土日祝を除く）



APC™ Flash-Free  
Adhesive Coated Appliance System

ビクトリーシリーズ™  
スーペリア フィット チューブ

15秒の快適さ！  
最適なポジショニングのために生まれた  
ブラケットシステム

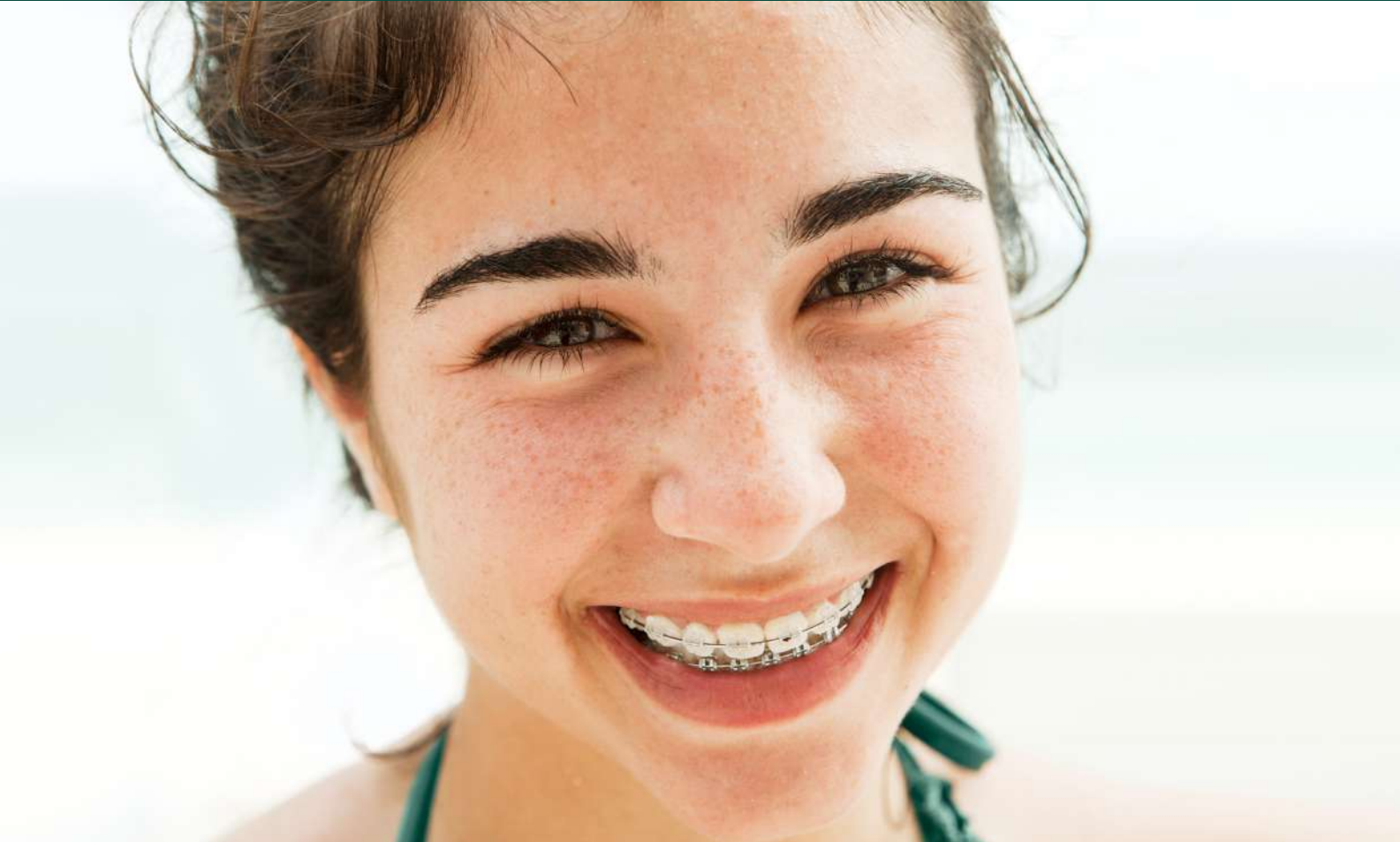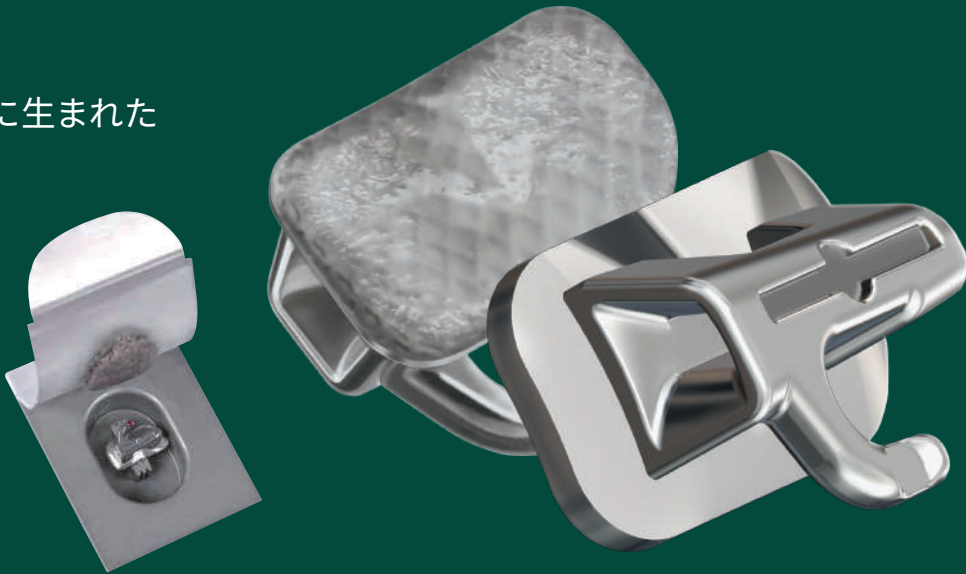

3Mのヘルスケア部門はソルベンタムという独立した企業になりました。

# 確実なポジショニングを簡単に！

その為の様々な工夫を精密な加工技術で盛り込みました。

ビクトリーシリーズ™ スーペリア フィット チューブは、多くの矯正歯科医の協力を得て開発されました。確実なポジショニングを簡単にできる操作性の良さ、フィット性を高める 3D 形状、接着における信頼性、患者様の快適性等、装着の瞬間からパフォーマンスの高さを感じる ことができる、新しいバッカルチューブです。

## 持ちやすい “グリップングノッチ”

ピンセットでつかみやすい  
カットアウト加工を加えました。  
しっかり把持できます。

## 見やすい“近遠心ビジュアルライン”

ガイドとなる水平のビジュアルラインを入れました。チューブの  
位置・角度を視認しやすく正確なポジショニングに役立ちます。


## 圧接しやすい“ベース面と並行なフラットトップ”

トップを平面にし、ベース面と平行にしました。圧接する力が歯面に  
垂直に伝わり、ポジショニングのズレや回転を起こしにくい設計です。

## “APC™ Flash-Free 接着材つき アプライアンス システム”を採用

接着材の塗布も、余剰除去も不要！ 簡単！ 確実！ スピーディーに接着。

ベースに、適量の液状接着材を染み込ませた不織布ファイバーを貼付。  
接着材の塗布も余剰除去も不要、スピーディーで確実なボンディングを可能にします。

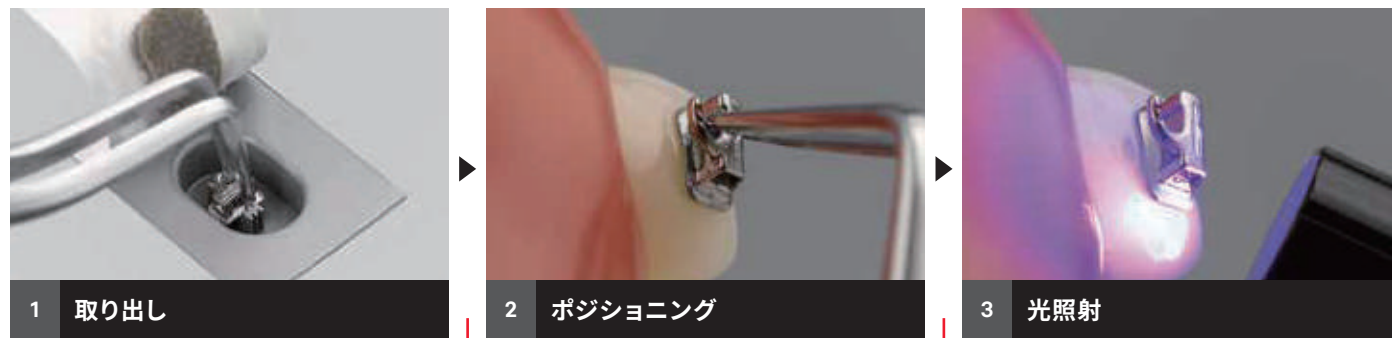

- 余剰除去時に起きやすいズレや接着不良の心配がなく、決めた場所にポジショニングが可能です。
- 液状の接着材が圧着時の歯面とベース間のギャップを減らし、脱落リスクの軽減に貢献します。
- ディボンディング後のクリーンアップが容易です。

## 臼歯との高いフィット性！

### ベースデザインに解剖学的な 臼歯の形状を取り入れました。

ソルベンタムは独自のソフトウェアを開発し、多くの  
患者様の臼歯の形状をサンプリングした上で、一般的な  
臼歯の形状にもっともフィットしやすいデザインを作り  
上げました。  
ベース面に複雑なカーブを付け、“歯面を抱きかかえる”  
ような形状にすることで、更なるフィット性を追求しま  
した。

## ワイヤーが挿入しやすい！

### ファネル状の近心開口部。

ファネル状に広がった近心開口部で、ワイヤーのスムーズ  
な挿入をアシストし、術者のストレスを軽減します。

## 患者の快適性を考慮した設計！

### ロープロファイル&フック形状。

ロープロファイル設計と、斜めに角度を付けた丸みを  
帯びた形状で、装着時の違和感や粘膜刺激を低減し  
咬合干渉を最小限に抑えます。

ビクトリー シリーズ™ スーペリアフィットチューブは、  
APC™ Flash-Free 接着材つき アプライアンス システム  
の他、接着材を使用するダイレクトボンディングベース  
の製品もお選びいただけます。マイクロエッチされた  
80 ゲージメッシュベースで信頼性の高いボンディングを  
可能にします。

