

3M Actisorb™ Plus 25 Cobertura de Carvão Ativado com Prata

Boletim Técnico

Descrição do produto

Actisorb™ Plus 25 Cobertura de Carvão Ativado com Prata é composto de puro carvão ativado impregnado com prata ($25\mu\text{g}/\text{cm}^2$). A cobertura cria um ambiente favorável para uma efetiva cicatrização de feridas através da fixação e imobilização de micro-organismos que as contaminam e infectam. A impregnação de prata combate os micro-organismos da ferida na cobertura, o que reduz a colonização bacteriana da ferida e inibe a infecção.

Actisorb™ Plus 25 é muito bem tolerado e, devido ao seu princípio puramente físico de limpeza de feridas, não existe a preocupação com efeitos colaterais ou com o desenvolvimento de resistência, como pode ocorrer com o uso de antibióticos. Ao eliminar odores desagradáveis, **Actisorb™ Plus 25** melhora a qualidade de vida dos pacientes e dos profissionais de saúde.



Indicações

Actisorb™ Plus 25 é apropriado como o primeiro passo terapêutico no manejo de todas as feridas crônicas. Ele é indicado para carcinomas fúngicos e feridas ulcerativas, traumáticas e cirúrgicas em caso de contaminação bacteriana, infecção ou odor.

Precauções

Profissionais de saúde devem estar cientes de que existem dados muito limitados sobre o uso prolongado e repetido de coberturas que contêm prata, especialmente em crianças e recém-nascidos.

Modo de uso

Preparo do local da ferida


O tecido necrótico seco deve ser primeiramente removido por desbridamento cirúrgico, enzimático ou autolítico.

Aplicação

- Antes da aplicação, **Actisorb™ Plus 25** pode ser impregnado com solução salina ou água esterilizada;
- As propriedades adsorventes da cobertura são melhor utilizadas quando **Actisorb™ Plus 25** entra em contato direto com a ferida;
- Ambos os lados de **Actisorb™ Plus 25** podem ser colocados no leito da ferida;
- **Actisorb™ Plus 25** pode ser facilmente aplicado para preencher feridas profundas;
- A superfície externa de náilon possibilita a remoção da cobertura da maioria das feridas sem aderência ou trauma;
- Se necessário, **Actisorb™ Plus 25** pode ser colocado sobre uma cobertura não aderente de contato com o leito da ferida. Neste caso, é importante garantir que o mecanismo de ação de **Actisorb™ Plus 25** não seja prejudicado por excesso de pomada ou lubrificante na camada de contato;
- Dependendo do nível de exsudato, pode-se colocar uma cobertura secundária absorvente sobre **Actisorb™ Plus 25**;
- Fixe a cobertura de maneira adequada para a indicação;
- Evidentemente, trabalhe usando procedimento estéril.

Troca da cobertura

Actisorb™ Plus 25 pode permanecer na ferida por até 7 dias, dependendo do nível de exsudato, enquanto a cobertura secundária absorvente deve ser trocada conforme necessário. Inicialmente, pode ser necessário trocar o **Actisorb™ Plus 25** a cada 24 horas.

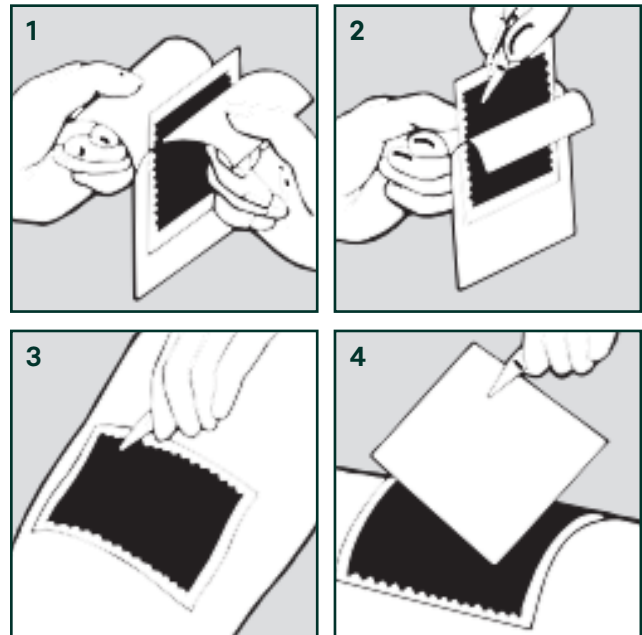

Nota: Actisorb™ Plus 25 não deve ser cortado, pois as partículas de carvão ativado podem entrar na ferida e causar descoloração.

Benefícios do produto

- **Actisorb™ Plus 25** se liga a endotoxinas bacterianas (estudo *in vitro*) que podem interromper o processo de cicatrização;
- **Actisorb™ Plus 25** reduz o mau odor, melhorando assim a qualidade de vida do paciente;
- O curativo não danifica as células hospedeiras e nem evita a proliferação de fibroblastos;
- Demonstrou-se, *in vitro*, ser eficaz na adsorção de odor, tanto úmido quanto seco.

Evidências científicas

Em um grande estudo observacional de gerenciamento de feridas com 12.444 pacientes, menos de 2% das feridas do paciente pioraram quando o curativo **Actisorb™** foi utilizado. A cicatrização completa foi registrada após 12 semanas em 49,3% das feridas de origem venosa e em 63% das feridas cirúrgicas (mais de 12 semanas, 5 estudos de vigilância).¹

Informações adicionais

Esterilizado por radiação gama.

Registro na ANVISA

80624960025

Armazenamento

Actisorb™ Plus 25 Cobertura de Carvão Ativado com Prata deve ser armazenado em local seco e livre de temperatura e umidade extrema. Conservar abaixo de 25°C.

Prazo de validade

5 anos a partir da data de esterilização.

Apresentação do produto

Código	Dimensão	Quantidade por caixa
MAP065	6,5cm x 9,5cm	10
MAP105	10,5cm x 10,5cm	10
MAP190	19cm x 10,5cm	10

Referências

1. Stadler, R. and Wallenfang, K. Survey of 12444 patients with chronic wounds treated with charcoal dressing (Actisorb™). Aktuelle Dermatologie 2002, 28(10): 351-354.



© Solventum 2024. Solventum, o logótipo S e outras marcas comerciais são marcas comerciais da Solventum ou das suas afiliadas. 3M, o logótipo 3M e outras marcas comerciais são marcas comerciais da 3M. Outras marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários.