


# Applicering på huvud och hals

## Material och placering

- Välj 7,5 cm Coban 2 Lite komfortlager och 7,5 cm Coban 2 Lite kompressionslager

## Applicering av komfortlager på huvud och hals: lager 1

- Applicera det här lagret med skumsidan mot huden, med så lite sträckning som behövs för att forma materialet
- Täck huden med ett så tunt lager som möjligt, utan att mellanrum uppstår

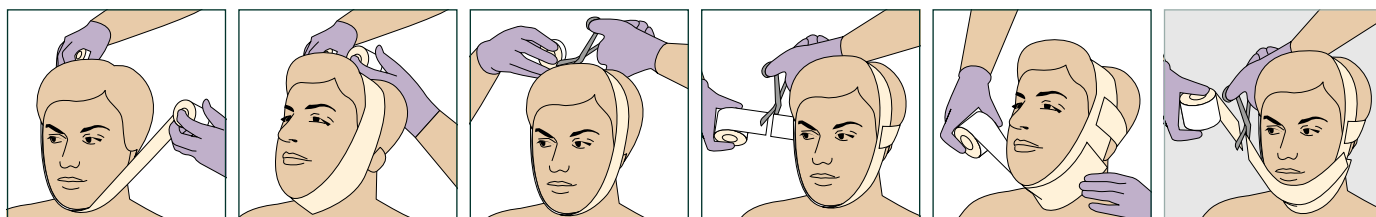

**Steg 1:** Applicera ett 7,5 cm komfortlager lateralt, med bandaget placerat framför öronen. Gör en cirkulär lindning med tillräcklig sträckning under hakan/underkäken så att ödemet lyfts. Avsluta lindningen med 2,5 cm överlappning. När den cirkulära lindningen har slutförts klipper du av materialet och trycker ihop ändarna.


**Steg 2:** Stabilisera bandaget genom att applicera en bit komfortlager kring bakhuvudet, ovanför öronen. Klipp av materialet och pressa det mot det underliggande lagret.

**Steg 3:** Applicera en extra remsa av komfortlagret för att täcka resten av området under hakan/underkäken.

**Steg 4 (valfritt – vid haködem):** Om det behövs kan remсор av komfortlagret användas för haködem.

## Applicering av kompressionslager på huvud och hals: lager 2

- Applicera jämn kompression med lagom mycket sträckning för att åstadkomma ett bekvämt stöd

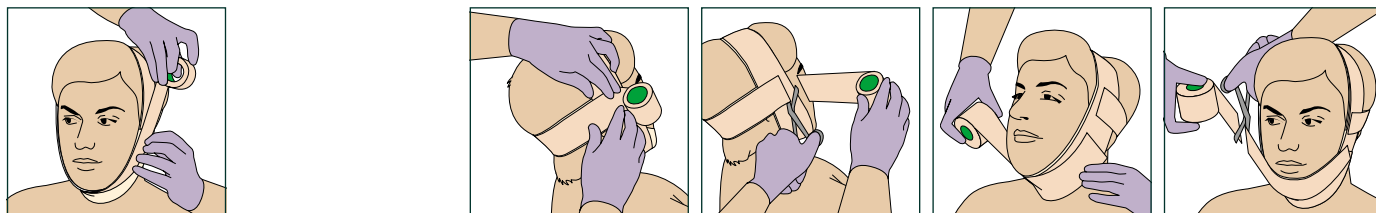


**Steg 1:** Applicera ett 7,5 cm kompressionslager lateralt, med bandaget placerat framför öronen. Gör en cirkulär lindning med tillräcklig sträckning under hakan/underkäken så att ödemet lyfts. Avsluta lindningen med 2,5 cm överlappning. Klipp och forma.

**Steg 2:** Applicera en bit kompressionslager över den bakre komfortlagerremsa, med så mycket sträckning som behövs. Klipp och forma.

**Steg 3:** Applicera ytterligare remсор av kompressionsmaterialet för att täcka området under hakan/underkäken med minst två lager. Använd så mycket sträckning som behövs för att åstadkomma tillräcklig lyftning och komfort. Klipp av materialet och forma det efter anatomin.

**Steg 4:** Täck komfortlagerremсорna under hakan med två lager av kompressionsmaterial.

## Ta av bandaget

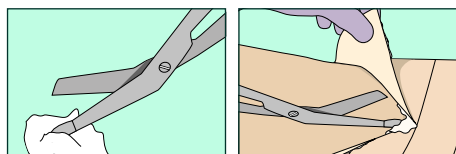

**Ta av bandaget**  
Det blir lättare och bekvämare att ta av bandaget om du doppar saxspetsarna i fuktgivande kräm.

## Obs!

Se bruksanvisningen för fullständig information om hur Coban 2 Lite kompressionssystem ska användas.

Obs! Specifika anvisningar, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och säkerhetsdatablad finns för dessa produkter och behandlingar. Konsultera läkare och läs produktens bruksanvisning före applicering. Detta material är avsett för vårdpersonal.



Se alla videor och guider om applicering av Coban 2 kompressionssystem här.