


Applicering på pung och penis

Material och placering

- Välj 7.5 cm eller 10 cm Coban 2 Lite komfort- och kompressionslager för applicering på pungen, beroende på storlek

Applicering av komfortlager på pungen: lager 1

- Applicera lagret med skumsidan mot huden, och sträck ut lite lätt så att materialet följer anatomin
- Täck huden med ett så tunt lager som möjligt, utan att mellanrum uppstår

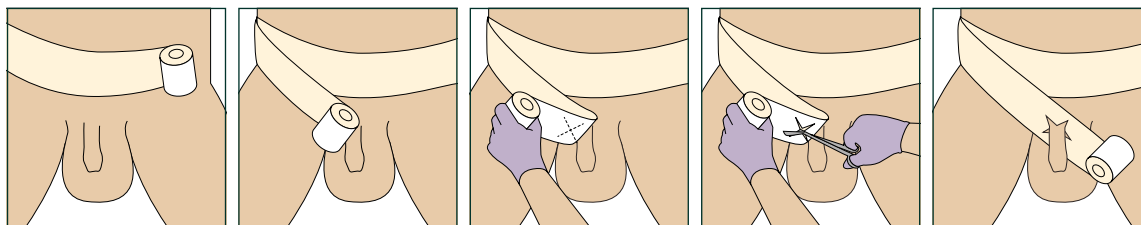


Steg 1: Inled appliceringen med en cirkulär lindning runt höfterna och centrera den över blygdbenet.

Steg 2: För lindningen distalt mot penisbasen.


Steg 3: Gör en öppning för penis: vik tillbaka komfortlagret vid penisbasen. Nyp ihop vecket och klipp en X-formad öppning i det. Obs! Vid penektomi eller kort penis ska vecket och öppningen göras vid den yttre urinrörsmynningen.

Steg 4: För penis genom hålet i komfortlagret. Om det behövs kan öppningen vidgas för bättre komfort.

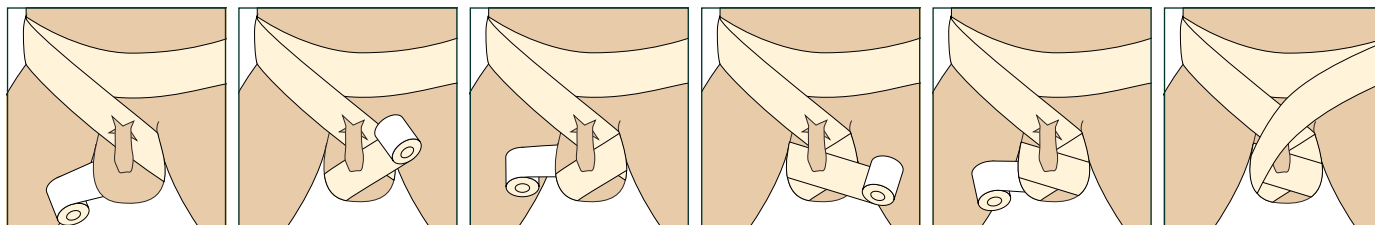

Steg 5: Fortsätt att linda bandaget distalt och för in det under pungen. Linda sedan uppåt, tvärs över pungen. Fortsätt att linda för att täcka alla exponerade områden med ett så tunt lager som möjligt.

Steg 6: När pungen är täckt för du bandaget lateralt mot motsatt höft. På den laterala sidan trycker du på bandaget för att forma det och klipper av det.

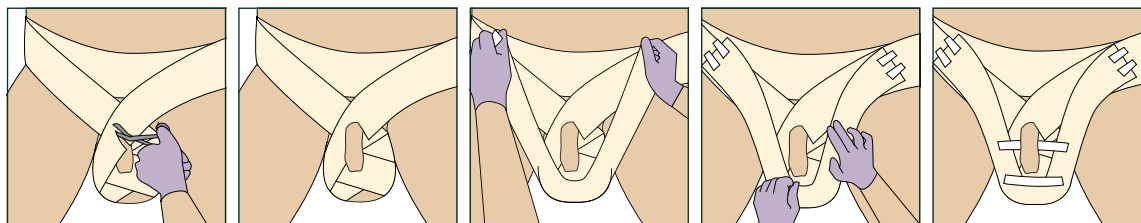


Steg 7: Justera komfortlagret efter behov för att få plats med penis.


Steg 8: Om det behövs kan en remsa av komfortlager appliceras för att ge ytterligare lyft och stöd för pungen. Tryck på, forma och klipp materialet lateralt. Fäst ändarna med tejp. Forma försiktigt komfortlagret så att det sitter bra. Tejp kan användas för att bevara bandagets konturer.

Applicering av kompressionslager på pungen: lager 2



- Applicera kompressionsmaterial med 50 % överlappning och med tillräcklig sträckning för att lyfta ödemet och ge stöd
- Det rekommenderas att du håller rullen nära kroppen under hela appliceringen för att åstadkomma en kontrollerad, jämn kompression

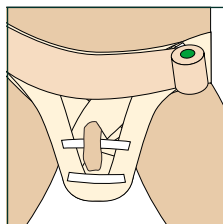



Steg 1: Inled appliceringen med samma cirkulära lindning runt höfterna, centrerad över blygdbenet.

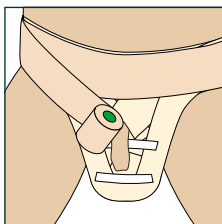


Steg 2: För lindningen distalt under och strax nedanför penis. Fortsätt under pungen och linda sedan uppåt, tvärs över pungen. Fortsätt att linda så att hela komfortlagret täcks med minst två lager, och använd lagom mycket sträckning för att forma materialet. Tryck på materialet och forma det efter anatomin.

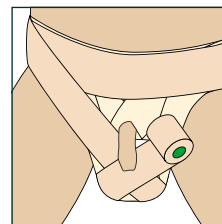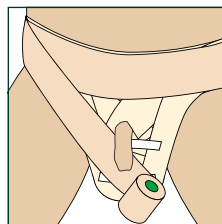




Steg 3: När pungen är täckt för du bandaget under penis lateralt mot motsatt höft. På den laterala sidan trycker du på bandaget för att forma det och klipper av det.

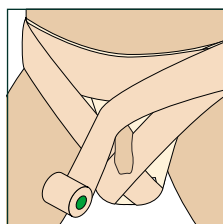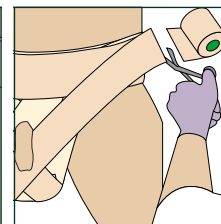


Steg 4: För fullständig proximal täckning av pungen utgår du från den laterala sidan och applicerar en remsa av kompressionsmaterial som dras över blygdbenet. Se till att bandaget hamnar ovanför penisbasen.

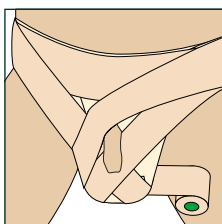


Steg 5: Fortsätt att linda bandaget distalt och för in det under pungen. Lyft penis och fortsätt att linda för att täcka pungen med minst två kompressionslager med lagom mycket sträckning för bästa komfort.

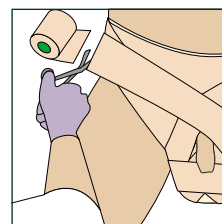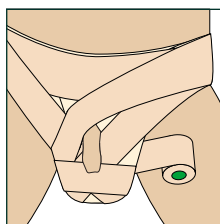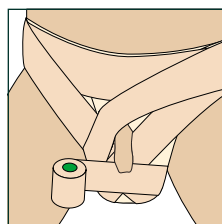



Steg 6: När pungen är täckt för du bandaget lateralt ovanför penisbasen, mot motsatt höft. På den laterala sidan trycker du på bandaget för att forma det och klipper av det.

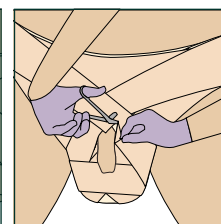


Steg 7: Justera kompressionslagret om det behövs för att ge plats för penis.

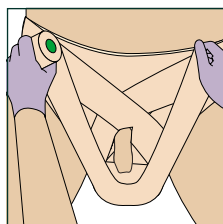

Steg 8: Applicera en remsa av kompressionsmaterial för att ge ytterligare lyft och stöd för pungen. Tryck på och klipp materialet lateralt. Forma materialet så att det följer pungens konturer.

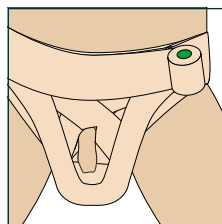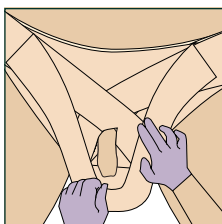

Steg 9: En cirkulär lindning av kompressionsmaterial kan appliceras för att fästa de klippta kanterna.

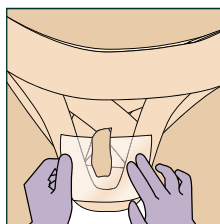


Steg 10: Applicera en bit filmförband ovanpå pungen för att hålla bandaget rent och som skydd mot urin.

Material och placering

- Välj 2.5 cm Coban 2 Lite kompressionslager

Metod A: Applicering av kompressionslager för penis

- Applicera kompressionslagret med 50 % överlappning, och linda försiktigt för att följa anatomin
- Det rekommenderas att du håller rullen nära kroppen under hela appliceringen för att åstadkomma en kontrollerad, jämn kompression

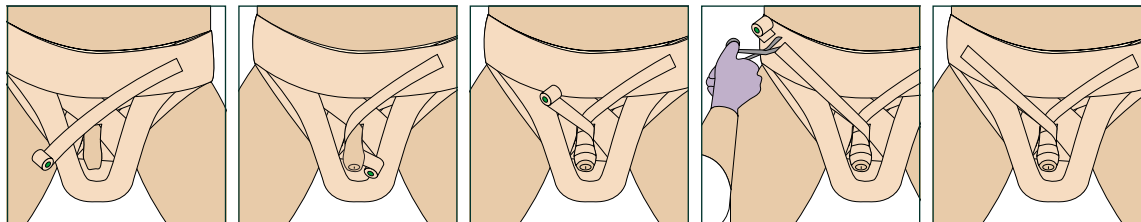

Steg 1: Inled appliceringen med att utgå från den laterala sidan av bukbandaget och förankra bandaget utan sträckning. Dra rullen tvärs över penisbasen och under penis mot den distala änden.


Steg 2: Fortsätt i proximal riktning med cirkulära lindningar och 50 % överlappning, upp mot penisbasen. Förankra appliceringen genom att föra över materialet till motsatt sida. Klipp av materialet och tryck för att forma det.

Material och placering

- För mycket stora ödem eller när ytterligare komfort behövs: välj 7.5 cm Coban 2 Lite komfortlager och 2.5 cm Coban 2 Lite kompressionslager

Metod B: Applicering av Komfortlager för penis: lager 1

- Applicera lagret med skumsidan mot huden, och linda försiktigt för att följa anatomin
- Täck huden med ett så tunt lager som möjligt, utan att mellanrum uppstår

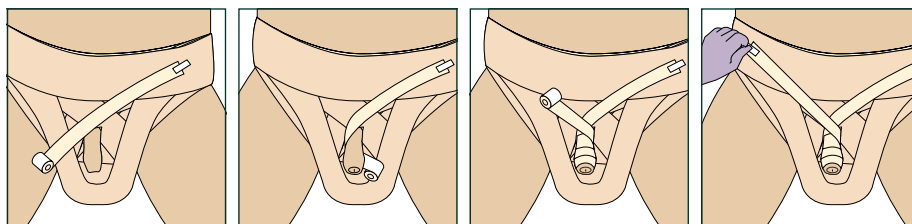


Steg 1: Inled appliceringen av 7.5 cm komfortlager med att utgå från den laterala sidan av bukbandaget. Dra rullen tvärs över penisbasen och under penis mot den distala änden.

Steg 2: Fortsätt i proximal riktning med cirkulära lindningar och minimal överlappning, upp mot penisbasen. Avsluta appliceringen genom att föra över materialet till motsatt sida av bukbandaget.

Steg 3: Klipp av materialet och tryck för att forma det. Fäst ändarna med tejp.


Metod B: Applicering av kompressionslager för penis: lager 2

- Applicera 2.5 cm kompressionsmaterial med 50 % överlappning, och linda försiktigt för att följa anatomin
- Det rekommenderas att du håller rullen nära kroppen under hela appliceringen för att åstadkomma en kontrollerad, jämn kompression

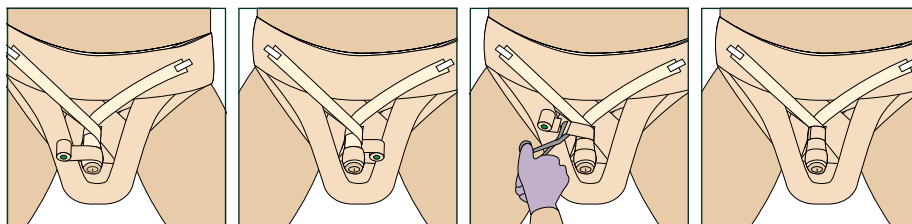

Steg 1: Inled appliceringen vid den distala änden av penis och fortsätt i proximal riktning med cirkulära lindningar med minsta möjliga sträckning och 50 % överlappning, upp mot penisbasen. Avsluta appliceringen vid penisbasen. Klipp av materialet och tryck för att forma det.

Ta av bandaget

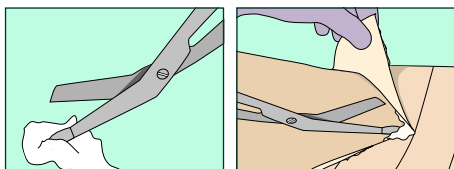

Ta av bandaget
Det blir lättare och bekvämare att ta av bandaget om du doppar saxspetsarna i fuktgivande kräm.

Obs!

Se bruksanvisningen för fullständig information om hur 3M™ Coban™ 2 Lite tvålayers kompressionssystem ska användas.

För Pung

Bild	3M kod	Beskrivning	Storlek	Kompression	Antal i fp	Antal för behandling
	20713/ 20723	7,5 cm Bulkförpackning: Rulle 1: Komfortlager Rulle 2: Kompressionslager	7,5cm x 2,7m & 7,5cm x 3,5m	Lite	Rulle 1: 18st Rulle 2: 32st	1 komfortrulle & 1 kompressionsrulle per ben
	2794E	Lite KIT 10 cm: Rulle 1: Komfortlager Rulle 2: Kompressionslager	10cm x 2,7m & 10cm x 3,2m	Lite	2 rullar	1 KIT/applicering

Alternativ

	20714/ 20724	10 cm Bulkförpackning: Rulle 1: Komfortlager Rulle 2: Kompressionslager	10cm x 2,7m & 10cm x 3,5m	Lite	Rulle 1: 18st Rulle 2: 32st	1 komfortrulle & 1 kompressionsrulle per applicering
--	--------------	---	------------------------------	------	--------------------------------	--

För penis: metod A och B

Bild	3M kod	Beskrivning	Storlek	Kompression	Antal i fp	Antal för behandling
	20721	2,5cm Lite Separata Rullar: Kompressionslager 2	2,5cm x 3,5m	Lite	36	1 kompressionsrulle per applicering

Obs! Specifika anvisningar, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och säkerhetsdatablad finns för dessa produkter och behandlingar. Konsultera läkare och läs produktens bruksanvisning före applicering. Detta material är avsett för vårdpersonal.

Solventum Medical Surgical
Gustav III:s Boulevard 34
169 73 Solna
Sverige

©Solventum 2025. Solventum och S-logotypen är varumärken som tillhör Solventum eller dess dotterbolag. 3M och 3M-logotypen är varumärken som tillhör 3M. Andra varumärken tillhör sina respektive ägare. Alla rättigheter förbehållna. OMG1445798.



Se alla videor och guider om applicering av Coban 2 kompressionssystem här.

 solventum