

Axelapplicering

Material och placering

- En axelapplicering är användbar om förbandets övre kant ofta rullar, för att undvika glidning vid mycket kraftiga ödem i den övre delen av armen eller för att behandla ödem i den posteriora ipsilaterala kvadranten
- Välj Coban 2 Lite komfort- eller kompressionslager på 10 cm eller 15 cm, beroende på patientens storlek

Applicering av komfortlager på axel: lager 1


- Applicera lagret med skumsidan mot huden, och linda försiktigt för att följa anatomin
- Täck huden med ett så tunt lager som möjligt, utan att mellanrum uppstår



Steg 1: Välj komfortlager på 10 cm eller 15 cm och inled appliceringen med minimal överlappning av överarmsbandaget. Gör några cirkulära lindningar och för bandaget över axeln: se till att mitten av bandaget centreras över akromioklavikularleden.

Steg 2: För bandaget tvärs över ryggen och under motsatt arm. Be patienten ta ett djupt andetag och fortsätt linda över bålens framsida. För materialet under bröstet och forma det efter anatomin.


Steg 3: När du har slutfört en hel cirkulär lindning runt bålen ber du patienten att ta ett djupt andetag. Klipp av materialet och pressa det mot det underliggande lagret.

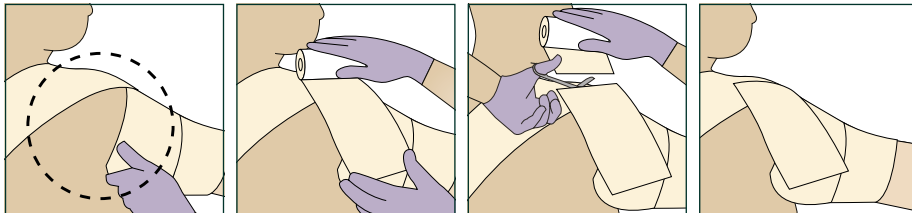

Steg 4: Slutför appliceringen över den exponerade huden på baksidan av axeln (se streckad linje) genom att applicera bitar av komfortskummaterial tills hela området är täckt. Klipp av materialet och forma det efter anatomin.


Applicering av kompressionslager på axel: lager 2

- Applicera jämn kompression med **50 % överlappning**. Jämn kompression uppnås enklast om materialet appliceras med **100 % stretch (full sträckning)**
- Det rekommenderas att du håller rullen nära kroppen under hela appliceringen för att åstadkomma en kontrollerad, jämn kompression
- Om "utbuktningar" noteras efter appliceringen ska du applicera ytterligare material tills bandaget ser slätt ut

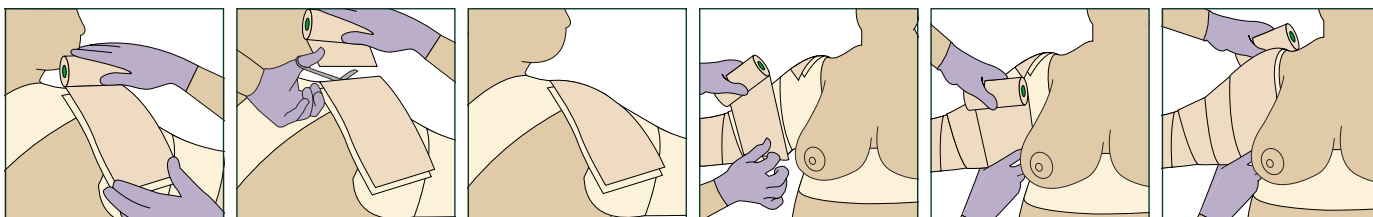

Steg 1: Välj kompressionslager på 10 cm eller 15 cm och applicera tillräckligt stora bitar för att täcka axeln (se steg 4). Klipp av materialet och forma det efter anatomin.


Steg 2: Applicera kompressionslagret med 50 % överlappning av överarmsbandaget. Täck överarmen med några cirkulära lindningar och för bandaget över axeln.

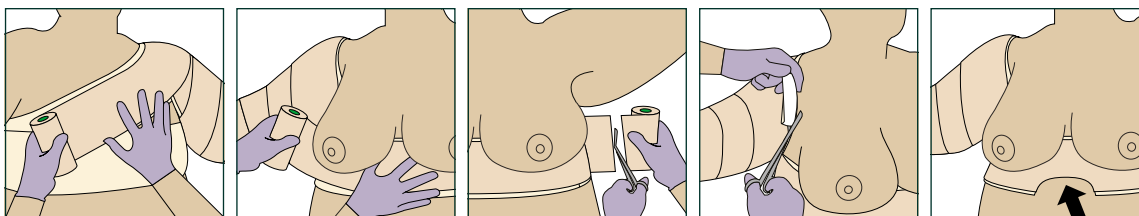

Steg 3 (valfritt – stöd för båda bröstet): I stället för att klippa av materialet kan du dra det över bröstet för att stödja och täcka det andra bröstet. Klipp av materialet och forma det efter anatomin. Fortsätt till steg 4.

Steg 4: Klipp bort eventuellt material som kan förhindra rörelse i nacke, armar eller armhålor, så att patienten får maximal rörelsemöjlighet. För extra komfort kan bandaget justeras vid xifoidbenet (se pilen).

Ta av bandaget

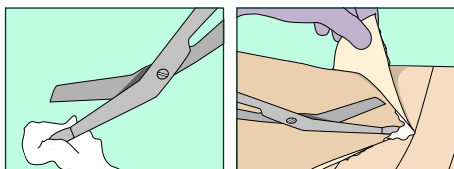

Ta av bandaget
Det blir lättare och bekvämare att ta av bandaget om du doppar saxspetsarna i fuktgivande kräm.

Obs!

Se bruksanvisningen för fullständig information om hur 3M™ Coban™ 2 Lite tvålagers kompressionssystem ska användas.

För axel

Bild	3M kod	Beskrivning	Storlek	Kompression	Antal i fp	Antal för behandling
	2794E	Lite KIT 10 cm: Rulle 1: komfortlager Rulle 2: kompresionslager	10cm x 2.7m & 10cm x 3.2m	Lite	2 rullar	1 KIT/axel
	20714/ 20724	10 cm Lite Bulkförpackning: Rulle 1: Komfortlager Rulle 2: Kompressionslager	10cm x 2.7m & 10cm x 3.5m	Lite	Rulle 1: 18st Rulle 2: 32st	1 komfortrulle & 1 kompressionsrulle per axel
	20716/ 20726	15 cm Bulkförpackning: Rulle 1: Komfortlager Rulle 2: Kompressionslager	15cm x 2.7m & 15cm x 3.5m	Lite	Rulle 1: 10st Rulle 2: 15st	1 komfortrulle & 1 kompressionsrulle per axel

Obs! Specifika anvisningar, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och säkerhetsdatablad finns för dessa produkter och behandlingar. Konsultera läkare och läs produktens bruksanvisning före applicering. Detta material är avsett för vårdpersonal.

Solventum Medical Surgical
Gustav III:s Boulevard 34
169 73 Solna
Sverige

©Solventum 2025. Solventum och S-logotypen är varumärken som tillhör Solventum eller dess dotterbolag. 3M och 3M-logotypen är varumärken som tillhör 3M. Andra varumärken tillhör sina respektive ägare. Alla rättigheter förbehållna. OMG1445798.



Se alla videor och guider om applicering av Coban 2 kompressionssystem här.

 solventum