


Tåapplicering

Material och placering

- Välj 5 cm komfort- och kompressionslager

Applicering av kompressionslager för mockasin: lager 1

- Applicera 10 cm komfortlager i enlighet med relevant appliceringsguide innan applicering av mockasinen.

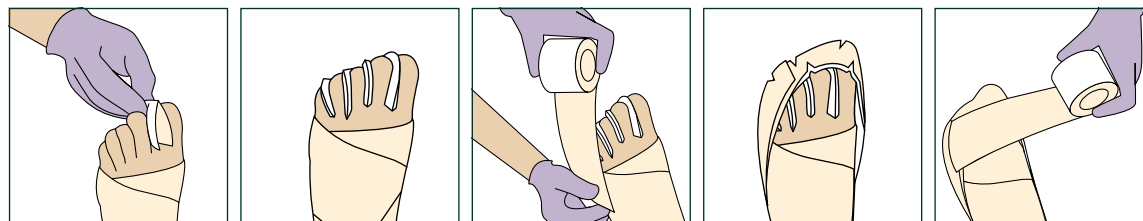


Steg 1: Mellan varje tå placerar du bitar av dubbelvikt komfortlager, klippta till lämplig storlek och med skumsidan utåt.

Steg 2: Använd 5 cm-komfortlager och linda runt toppen på tårna och bak till hälen, utan att sträcka materialet, med överlappning vid lilltån. Klipp några slitsar så att materialet lägger sig rätt över tårna.

Steg 3: Täck de öppna områdena ovanpå och under tårna. Klipp och forma materialet till rätt passform.

Applicering av kompressionslager för mockasin: lager 2

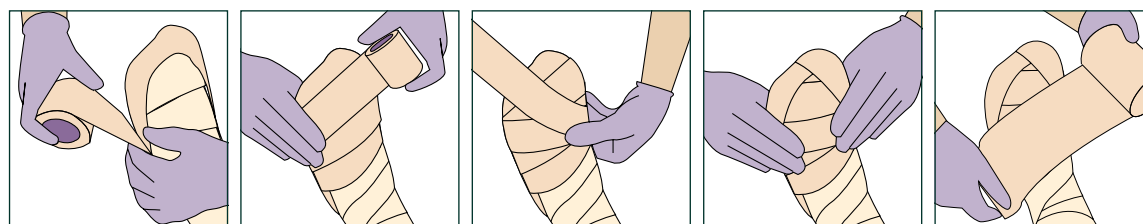

Steg 4: Använd en 5 cm-rulle med kompressionslager och linda runt toppen på tårna och bak till hälen, **utan att sträcka** materialet.

Steg 5: Täck det dorsala och plantara tåområdet med ett kompressionslager som appliceras med **100 % stretch (full sträckning)** och solfjäderteknik, genom att linda i halvcirklar. Undvik cirkulära lindningar runt tårna.

Steg 6: Forma hela det applicerade materialet efter framfotens anatomi.

Steg 7: När tårna har lindats fortsätter du med kompressionslagret för resten av foten och benet.


3M™ Coban™ 2 Lite Tvålayers kompressionssystem

Material och placering

- Välj 2,5 cm Lite kompressionslager

Applicering av Lite kompressionslager på enskilda tår: lager 2


- Applicera med minsta möjliga stretch och **50 % överlappning**

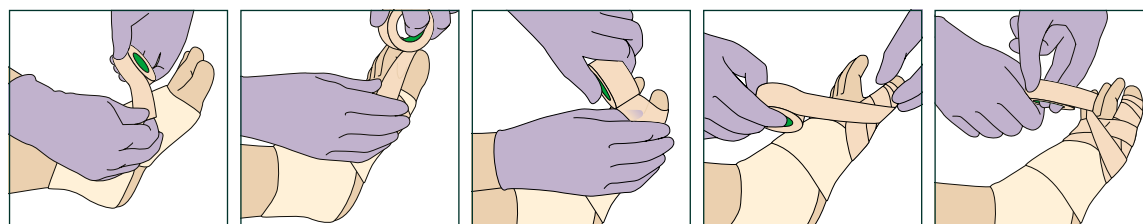


Steg 1: Inled tå lindningen med en cirkulär lindning med början vid tåbasen, utan att sträcka materialet.

Steg 2: För bandaget längs stortån till basen av nagelbädden, utan att sträcka materialet. Håll tån lätt böjd och fortsätt med cirkulära lindningar, distalt till proximalt, med minsta möjliga stretch och **50 % överlappning**. Forma materialet efter anatomin.




Steg 3: Vid stortåns bas, för bandaget över den laterala kanten och över plantarsidan av foten, upp på ovensidan av den fjärde tån, till basen av nagelbädden (lilltån ska lämnas fri). Håll tån lätt böjd och fortsätt med cirkulära lindningar, distalt till proximalt, med minsta möjliga stretch och **50 % överlappning**. Forma materialet efter anatomin.

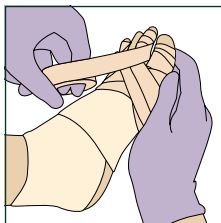

Steg 4: Vid basen av den fjärde tån gör du en cirkulär lindning runt foten och drar upp bandaget på ovansidan av den andra tån, till basen av nagelbädden. Håll tån lätt böjd och fortsätt med cirkulära lindningar, distalt till proximalt, med minsta möjliga stretch och **50 % överlappning**. Forma materialet efter anatomin.


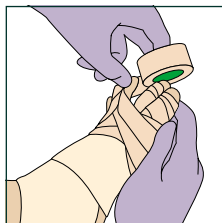


Steg 5: Vid basen av den andra tån gör du en cirkulär lindning runt foten och drar upp bandaget på ovansidan av den tredje tån, till basen av nagelbädden. Håll tån lätt böjd och fortsätt med cirkulära lindningar, distalt till proximalt, med minsta möjliga stretch och **50 % överlappning**. Forma materialet efter anatomin.

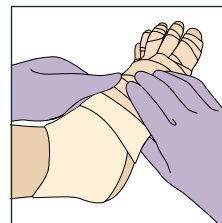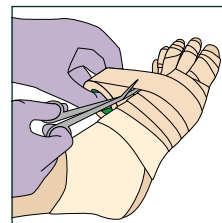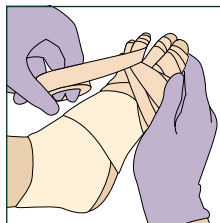

Steg 6: Fäst bandaget genom att göra en sista cirkulär lindning runt foten. Klipp av materialet och tryck det på plats så det formas efter anatomin. När tårna har lindats fortsätter du med kompressionslagret för resten av foten och benet.

Ta av bandaget

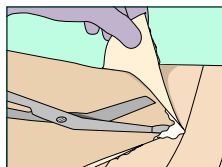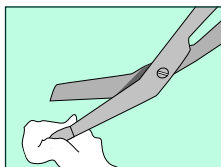

Ta av bandaget
Det blir lättare och bekvämare att ta av bandaget om du doppar saxspetsarna i fuktgivande kräm.

Obs!

Se bruksanvisningen för fullständig information om hur 3M™ Coban™ 2 tvålagers kompressionssystem ska användas.

3M™ Coban™ 2 Tvålagers kompressionssystem

För kompressionsbehandling med mockasin

Bild	3M kod	Beskrivning	Storlek	Kompression	Antal i fp	Antal för behandling
	2092	KIT 5 cm: Rulle 1: Komfortlager Rulle 2: Kompressionslager	5cm x 1.2m & 5cm x 2.7m	Full	2 rullar	1 KIT/fot

Alternatives

	20012/ 20022	5cm Bulkförpackning: Rulle 1: Komfortlager Rulle 2: Kompressionslager	5cm x 1.2m & 5cm x 2.7m	Full	Rulle 1: 32 st Rulle 2: 32 st	1 komfortrulle & 1 kompressionsrulle per fot
--	--------------	---	----------------------------	------	----------------------------------	--

3M™ Coban™ 2 Lite Tvålagers kompressionssystem

För kompressionsbehandling av enskilda tår

Bild	3M kod	Beskrivning	Storlek	Kompression	Antal i fp	Antal för behandling
	20721	5 cm Lite Bulkförpackning: Rulle 2: Kompressionslager	2.5cm x 3.5m	Lite	36	1 rulle per fot

Obs! Specifika anvisningar, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och säkerhetsdatablad finns för dessa produkter och behandlingar. Konsultera läkare och läs produktens bruksanvisning före applicering. Detta material är avsett för vårdpersonal.



Se alla videor och guider om applicering av Coban 2 kompressionssystem här.