


Bandagering af hoved og hals

Materialer og anlæggelse

- Vælg Lite komfortlag og Lite kompressionslag på 7,5 cm

Anlæggelse af komfortlag på hoved og hals: lag 1

- Læg komfortlaget med skumsiden ind mod huden og lige akkurat tilstrækkelig tension til, at materialet kan tilpasses konturerne
- Dæk huden med et så tyndt lag som muligt uden mellemrum

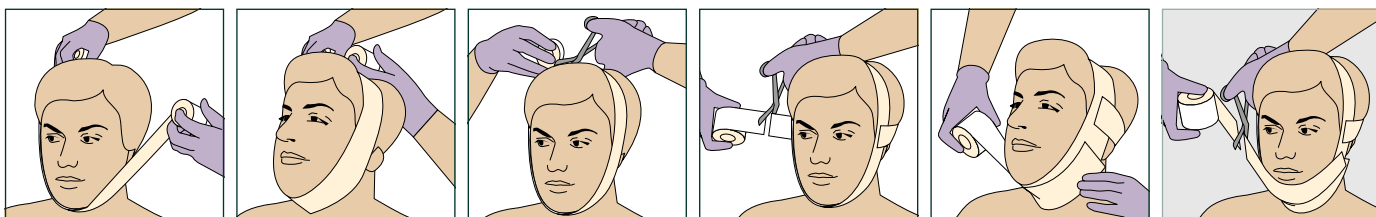

Trin 1: Brug komfortlaget på 7,5 cm, og begynd bandagen på tværs og foran ørerne. Læg en cirkulær omvikling med tilstrækkelig tension hen over det submandibulære område for at løfte ødemet. Afslut omviklingen med en overlappning på 2,5 cm. Når den cirkulære omvikling er færdig, klippes materialet af og enderne lægges sammen.


Trin 2: For at stabilisere bandagen lægges et stykke komfortlag omkring bagehovedet over ørerne. Klip materialet over, og form det efter det underliggende lag.

Trin 3: Læg en ekstra bane komfortlag for at dække resten af det submandibulære område.

Trin 4 (Valgfrit – til ødem i hagen): Hvis det er nødvendigt, kan baner af komfortlag bruges til ødem i hagen.

Anlæggelse af kompressionslag på hoved og hals: lag 2

- Læg jævn kompression med lige akkurat tilstrækkelig tension til, at materialet kan tilpasses konturerne og sikre en behagelig støtte

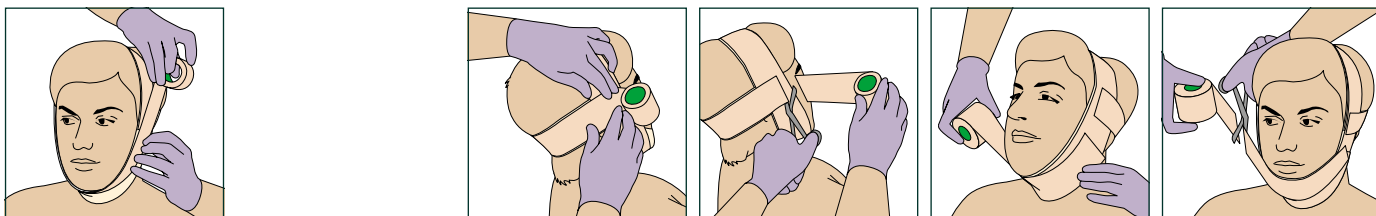


Trin 1: Brug kompressionslaget på 7,5 cm, og begynd bandagen på tværs og foran ørerne. Læg en cirkulær vikling med tilstrækkelig tension hen over det submandibulære område for at løfte ødemet. Afslut omviklingen med en overlappning på 2,5 cm. Klip af og form.

Trin 2: Læg et stykke kompressionslag over den posteriore komfortlagsbane med tilstrækkelig bane til, at materialet kan tilpasses konturerne. Klip af og form.

Trin 3: Læg yderligere baner af kompressionslag for at dække det submandibulære område med mindst to lag. Læg tilstrækkelig tension til at opnå et tilstrækkeligt, men behageligt løft. Klip materialet af, og form det efter anatomien.

Step 4: Dæk komfortlagets baner over hagen med to lag af kompressionslaget.

Fjernelse af bandage

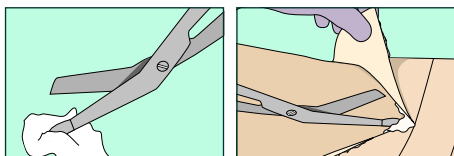

Fjernelse af bandage
Ved at dykke saksespidsen i fugtighedscreme bliver det mere behageligt og lettere at fjerne bandagen.

Bemærk

Se brugsanvisningen for at få alle oplysninger om brugen af Coban 2 Lite To-lags kompressionssystemer.

Til hoved og hals

Billede	Varenr.	Beskrivelse	Størrelse	Kompression	Æske	Ruller pr. procedure
	20713/ 20723	7,5 cm Individuelle Lite-ruller: Komfortlag 1/ kompressionslag 2	7,5 cm x 2,7 m 7,5 cm x 3,5 m	Lite	18/32 ruller	1 pr. bandage

Bemærk: Der kan forekomme specifikke indikationer, kontraindikationer, advarsler, forholdsregler og sikkerhedsoplysninger for disse produkter og behandlinger. Rådfør dig med en kliniker, og gennemgå produktets brugsanvisning inden anvendelse. Dette materiale er tiltænkt sundhedspersonale.



Se alle videoer om og vejledninger i brug af Coban 2 Lite To-lags kompressionssystemet her.