


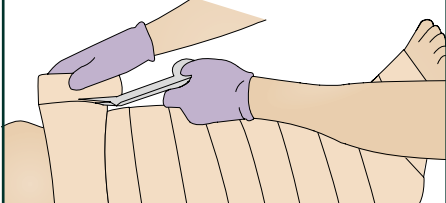

## De bästa tipsen för applicering av 3M™ Coban™ 2-lagers kompressionssystem.

<p>Använd minimalt med kräm under komfortlagret för att maximera mekaniskt grepp. Byt handskar efter att du fuktat huden eftersom kräm på handskarna kan reducera bandagets vidhäftning.</p> 	<p>Applicera alltid komfortlagret från det femte metatarsalhuvudet och applicera med lätt sträckning för att underlätta formbarheten. Överväg att använda följande teknik för att underlätta formning efter kroppsdelens.</p> 	<p>Klipp och/eller vik komfortlagret vid behov.</p> 
<p>Att lämna häloområdet fritt från komfortlagret ger ett tunnare bandage och gör det möjligt för patienter att använda sina egna skor.</p> 	<p>Klipp bitar av komfortlagret och placera på områden som behöver extra skydd (t.ex. skenbenskammen och fotknölnarna).</p> 	<p>Applicera kompressionslagret med 100 % stretch och 50 % överlappning.</p> 
<p>Håll kompressionsrullen nära kroppsdelens, med cylindern uppåt, börja vid huvudet på det femte metatarsalbenet.</p> 	<p>Forma bandaget genom att använda värmen från dina händer och ett lätt tryck – två lager blir ett. Mjuka punkter kan förstärkas med kompressionsbitar vid behov.</p> 	<p>För att förebygga att bandaget slits sönder hos personer som släpar fötterna i marken när de går kan man klippa och förstärka hälen med en extra bit kompressionslager.</p> 
<p>Gnugga en liten mängd alkoholgel över bandaget för att reducera klubbighet.</p> 	<p>Doppa en trubbig sax i alkoholgel eller fuktkräm för att få saxen att glida bättre vid borttagning. Klipp sicksack från knäet nedåt.</p> 	<p>Appliceringsguider och videor på 3M:s hemsida: <a href="https://go.solventum.com/Coban2SV">https://go.solventum.com/Coban2SV</a></p> 