


Bandagering af tæerne

Materialer og anlæggelse

- Vælg komfortlaget og kompressionslaget på 5 cm

Anlæggelse af tåbandage til mokkasinbandage: lag 1

- Benyt 10 cm komfortlag som ved bandagering af underbenen, før anlæggelse af mokkasinbandage

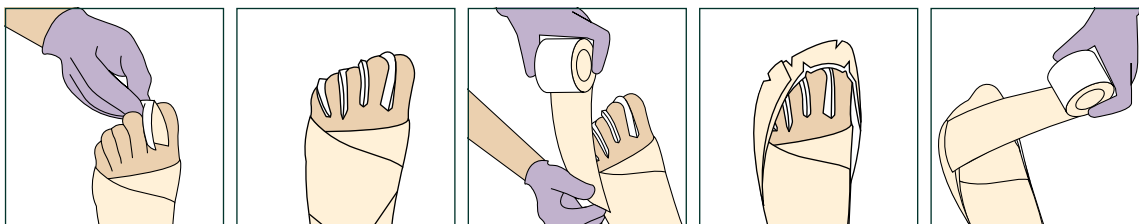


Trin 1: Fyld hvert mellemrum mellem tæerne med stykker af dobbeltfoldede komfortlag, med skumsiden ud og tilklippet.

Trin 2: Med et 5 cm bredt komfortlag laves en cirkulær vikling, uden træk, over tæerne og hælen med overlappning over den femte tå. Klip et par slidser for at lette tilpasningen over tæerne.

Trin 3: Dæk de åbne områder over og under tæerne. Tilpas og klip overskydende materiale af.

Anlæggelse af tåbandage til mokkasinbandage: lag 2

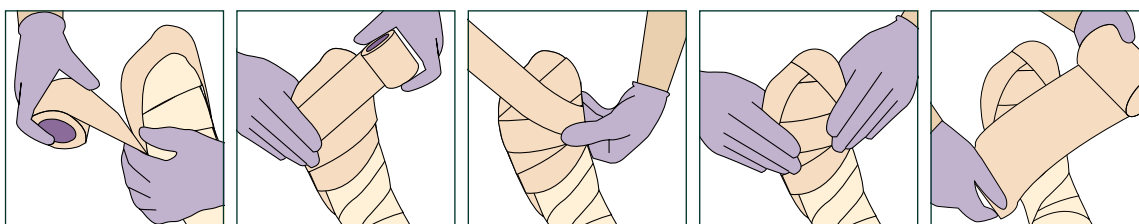

Trin 4: Brug en kompressionslagsrulle på 5 cm til en cirkulær vikling fra tæer til hæl uden at strække kompressionslaget.

Trin 5: Dæk de dorsale og plantare tåområder med et kompressionslag med **100 % stræk** i en viftefoldningsteknik med halvcirkulære viklinger. Undgå cirkulære viklinger omkring tæerne.

Trin 6: Form bandagen efter forfodens anatomi.

Trin 7: Efter omvikling af tæerne skal du fortsætte med kompressionslaget der skal bruges til benet.


3M™ Coban™ 2 Lite To-lags kompressionssystem

Materialer og anlæggelse

- Vælg Lite-kompressionslaget på 2,5 cm

Anlæggelse af Lite-kompressionslag til individuel tåbandagering: lag 2


- Læg bandagen med minimalt stræk og 50 % overlappning af lagene

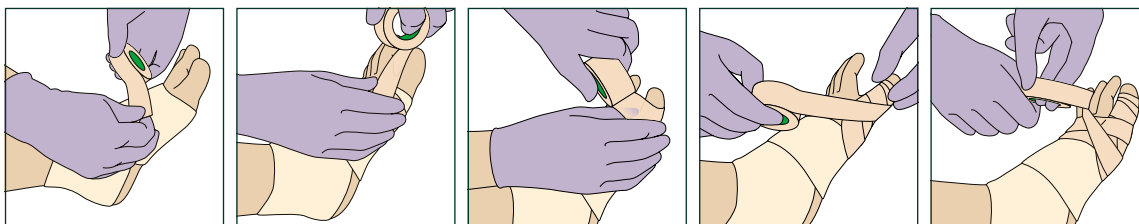


Trin 1: Start bandagering af tæerne med en cirkulær omvikling ved tæernes grundled uden at stramme bandagen.

Trin 2: Læg bandagen langs storetåen frem til bunden af neglelejet uden at stramme bandagen. Med tåen let bøjet fortsættes de cirkulære viklinger, distalt til proksimalt, med minimalt stræk og **50 % overlappende** lag. Form bandagen, så den passer til anatomen.




Trin 3: Ved bunden af storetåen føres bandagen ud over den laterale kant og hen over svangen og op på oversiden af den fjerde tå frem til neglelejets start (den femte tå bandageres ikke). Med tåen let bøjet fortsættes de cirkulære viklinger, distalt til proksimalt, med minimalt stræk og **50 % overlappende** lag. Form bandagen, så den passer til anatomen.

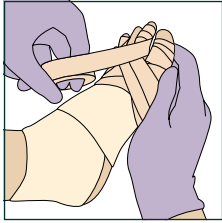

Trin 4: Ved bunden af den fjerde tå lægges en cirkulær omvikling af foden, så bandagen føres op på oversiden af den anden tå frem til neglelejets start. Med tåen let bøjet fortsættes de cirkulære viklinger, distalt til proksimalt, med minimalt stræk og **50 % overlappende** lag. Form bandagen, så den passer til anatomen.


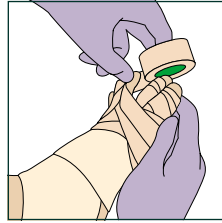


Trin 5: Ved bunden af den anden tå lægges en cirkulær omvikling af foden, så bandagen føres op på oversiden af den tredje tå frem til neglelejets start. Med tåen let bøjet fortsættes de cirkulære viklinger, distalt til proksimalt, med minimalt stræk og **50 % overlappende** lag. Form bandagen, så den passer til anatomen.

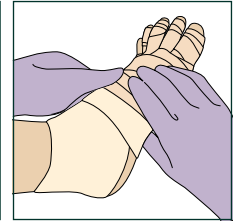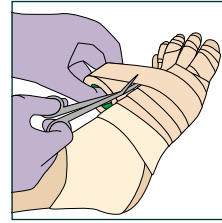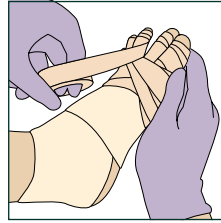

Trin 6: For at fastgøre bandagen lægges en sidste cirkulær vikling rundt om foden. Klip overskydende materiale af, pres det på plads og form det efter anatomen. Efter bandagering af tærne, fortsættes med kompressionslaget til benet.

Fjernelse af bandage

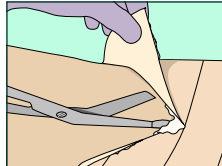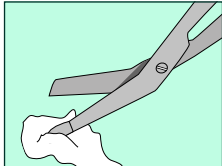

Fjernelse af bandage

Ved at dykke saksespidsen i fugtighedscreme bliver det mere behageligt og lettere at fjerne bandagen.

Bemærk

Se brugsanvisningen for at få alle oplysninger om brugen af 3M™ Coban™ 2 To-lags kompressionssystem.

3M™ Coban™ 2 To-lags kompressionssystem

Til mokkasinbandage

| Billede | Varenr. | Beskrivelse | Størrelse | Kompression | Æske | Ruller pr. procedure |
|---------|---------|---|---------------------------------|-------------|----------|----------------------|
| | 2092 | Sæt på 5 cm: Komfortlag 1 og kompressionslag 2 | 5 cm x 1,2 m og 5 cm x 2,7 m | Standard | 2 ruller | 1 pr. fod |

Alternativer

| | | | | | | |
|--|-----------------|--|-------------------------------|----------|--------------|-----------|
| | 20012/ 20022 | 5 cm individuelle ruller: Komfortlag 1/ kompressionslag 2 | 5 cm x 1,2 m/ 5 cm x 2,7 m | Standard | 32/32 ruller | 1 pr. fod |
|--|-----------------|--|-------------------------------|----------|--------------|-----------|

3M™ Coban™ 2 Lite To-lags kompressionssystem

Til individuel bandagering af tærne

| Billede | Varenr. | Beskrivelse | Størrelse | Kompression | Æske | Ruller pr. procedure |
|---------|---------|---|----------------|-------------|------|----------------------|
| | 20721 | 2,5 cm Individuelle Lite-ruller: kompressionslag 2 | 2,5 cm x 3,5 m | Lite | 36 | 1 pr. fod |

Bemærk: Der kan forekomme specifikke indikationer, kontraindikationer, advarsler, forholdsregler og sikkerhedsoplysninger for disse produkter og behandlinger. Rådfør dig med en kliniker, og gennemgå produktets brugsanvisning inden anvendelse. Dette materiale er tiltænkt sundhedspersonale.



Se alle videoer om og vejledninger i brug af Coban 2 To-lags kompressionssystemet her.