

Aanbrengen op hoofd en hals

Materialen en positionering


- Selecteer de Lite-comfortfoamzwachtel van 7.5cm en Lite-compressiezwachtel van 7.5cm

Aanbrengen comfortfoamzwachtel voor hoofd en hals: laag 1

- Breng deze zwachtel aan met de foamzijde tegen de huid, met net voldoende spanning om aan te sluiten volgens de anatomie
- Bedek de huid met een zo dun mogelijke laag, zonder openingen



Stap 1: Start met het aanbrengen zijdelings met het verband over de oren. Maak een cirkelvormige toer met voldoende spanning over het submandibulaire gebied om het oedeem te ondersteunen. Eindig met een overlapping van 2.5cm. Wanneer de cirkelvormige toer is voltooid, knipt u de zwachtel af en druk de uiteinden aan elkaar.

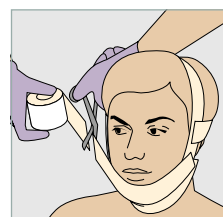


Stap 2: Breng een stuk comfortfoam aan rond de achterkant van het hoofd, boven de oren, om de zwachtel te stabiliseren. Knip af en druk het vast aan de onderliggende laag.

Stap 3: Breng een extra strook aan om het resterende submandibulaire gebied te bedekken.


Stap 4 (Optioneel - bij kinoedeem): Bij kinoedeem kunnen zo nodig stroken comfortfoam worden gebruikt.

Aanbrengen compressiezwachtel voor hoofd en hals: laag 2


- Pas gelijkmatige compressie toe met juist voldoende spanning voor een comfortabele ondersteuning

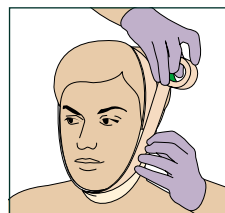

Stap 1: Start met zwachtelen over de oren. Maak een circulaire toer met voldoende spanning over het submandibulaire gebied om het oedeem te ondersteunen. Beëindig de toer met een overlapping van 2.5cm. Knip het restant af en vorm het naar de anatomie.

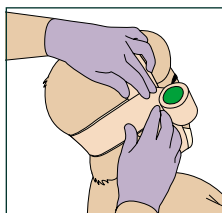

Stap 2: Breng een strook aan over de comfortlaag op het achterhoofd met voldoende spanning om het te laten aansluiten. Knip het restant af en vorm het naar de anatomie.


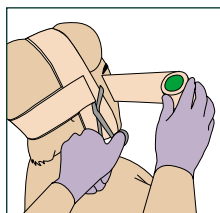


Stap 3: Breng extra stroken aan om het submandibulaire gebied te bedekken met ten minste twee lagen. Breng het aan met voldoende spanning om voldoende maar comfortabele ondersteuning te bieden. Knip af en vorm het naar de anatomie.



Stap 4: Bedek de comfortlaagstroken met twee lagen over de kin.

Verband verwijderen

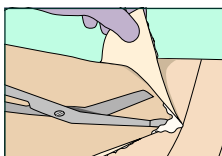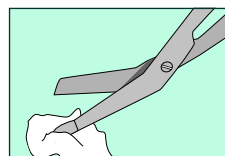

Als u de scherp punten in vochtinbrengende crème doopt (bijv. met Cavilon™ barrière crème), kunt u de zwachtel comfortabel en gemakkelijk verwijderen.

Opmerking

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor volledige informatie met betrekking tot het gebruik van het Coban 2 Lite-compressiesysteem.

Opmerking: Voor deze producten en behandelingen bestaan specifieke indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie. Raadpleeg een expert en de productinstructies voor gebruik. Dit materiaal is bedoeld voor zorgprofessionals.

Solventum
Medical Surgical
BE: solventum.com/nl-be/home/
NL: solventum.com/nl-nl/home/
BE/NL: MedSurg-BNL@solventum.com

© Solventum 2025. Alle rechten voorbehouden. Solventum en het S-logo zijn handelsmerken van Solventum of haar dochterondernemingen. 3M en het 3M logo zijn handelsmerken van 3M. Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. OMG1445798.



Bekijk hier alle video's en handleidingen voor het aanbrengen van het Coban 2 Tweelaags compressiesysteem.

 solventum