

Applikering hode og nakke

Materialer og posisjonering



- Velg 7,5 cm Lite komfortskumlag og 7,5 cm Lite kompresjonslag

Applikering av komfortskumlag for hode og nakke: Lag 1

- Legg dette laget med skumsiden mot huden med akkurat nok drag til å forme seg
- Dekk huden med et så tynt lag som mulig uten mellomrom




Trinn 1: Bruk det 7,5 cm brede komfortskumlaget, og begynn applikeringen på siden med bandasjen plassert foran ørene. Lag en sirkulær vikling med nok strekk når du kommer over underkjeve regionen for å gi løft av ødemet. Avslutt viklingen med en 2,5 cm overlapp. Når den sirkulære viklingen er fullført, kutt og form endene sammen.

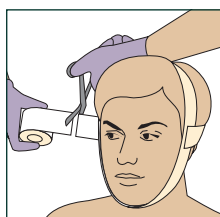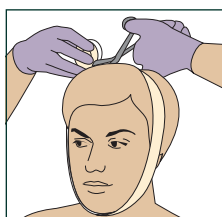

Trinn 2: For å stabilisere bandasjen, legg et stykke komfortskumlag rundt bakhodet, plassert over ørene. Klipp og form til det underliggende laget.




Trinn 3: Legg en ekstra strimmel komfortskumlag for å dekke det gjenværende kjeveområdet.

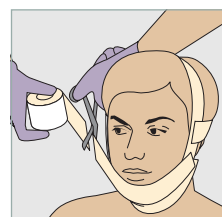


Trinn 4 (Valgfritt – for hakeødem): Ved behov kan strimler av komfortskumlag brukes for hakeødem.

Applikering av kompresjonslag for hode og nakke: Lag 2


- Legg jevn kompresjon med akkurat nok strekk til å forme seg for komfortabel støtte

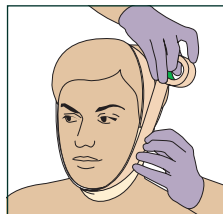

Trinn 1: Bruk det 7,5 cm brede komfortskumlaget, og begynn å legge fra siden med bandasjen plassert foran ørene. Lag en sirkulær vikling med nok strekk når du kommer over kjeve regionen for å gi løft av ødemet. Avslutt viklingen med en 2,5 cm overlapp. Kutt og form.

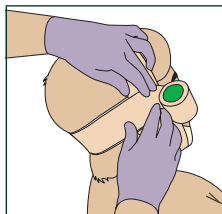

Trinn 2: Legg et stykke kompresjonslag over den bakre komfortlagstrimmelen ved å bruke nok strekk til å forme. Kutt og form.


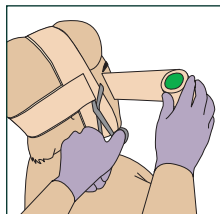


Trinn 3: Legg ytterligere strimler med kompresjonslag for å dekke kjeveområdet med minst to lag. Bruk nok strekk til å gi tilstrekkelig, men behagelig løft. Klipp og form etter anatomi.



Trinn 4: Dekk komfortlagstrimlene over haken med to lag kompresjonslag.

Bandasjefjerning

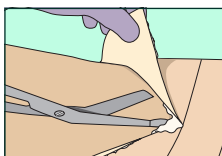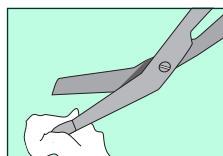

Bandasjefjerning
Bandasjefjerningen blir lettere og behageligere hvis du dypper de butte saksespissene i fuktighetskrem.

Merk

Se bruksanvisningen for fullstendig informasjon knyttet til bruken av Coban 2 Lite Tolags kompresjonssystemer.

Merk: Det finnes spesifikke indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og sikkerhetsinformasjon for disse produktene og behandlingene. Rådfør deg med helsepersonell og produktets bruksanvisning før bruk. Dette materialet er ment for helsepersonell.



Se alle applikasjonsvideoer og guider for Coban 2 kompresjonssystem her.