


Aanbrengen op benen met extreem oedeem - kniptechniek

Materialen en positionering


- Veel patiënten hebben extreem oedeem. Vanwege de unieke eigenschappen van Coban 2 Tweelaags compressiesystemen kan de techniek voor het aanbrengen eenvoudig worden aangepast om een soepele, effectieve en duurzame compressie te bieden
- Voor patiënten die compressie minder goed kunnen verdragen of die een gemengde etiologie hebben met een $EAI \geq 0,5$, wordt het 3M™ Coban™ 2 Lite Tweelaags compressiesysteem aanbevolen

Comfortfoamzwachtel aanbrengen onder de knie: laag 1


- Breng de zwachtel aan met de foamzijde tegen de huid, met lichte rek zodat deze aansluit op de vorm van het been met **minimale overlapping**
- Bedek de huid met een zo dun mogelijke laag, zonder openingen
- Als er huidplooien aanwezig zijn, gebruikt u stukjes comfortfoamlaag die met de foamzijde naar buiten zijn gevouwen om deze van elkaar te scheiden
- Als tenen ook worden gezwachteld, brengt u een compressielaag aan nadat de zwachtel voor de voet is aangebracht

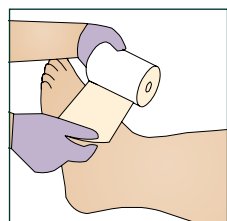


Stap 1: Plaats de voet in een dorsaalflexie van 90° en start het aanbrengen met een circulaire toer aan de basis van de tenen, beginnend vanaf de kleine teen. Beginnen bij de kleine teen zorgt voor een neutrale, comfortabele uitlijning van de voet.

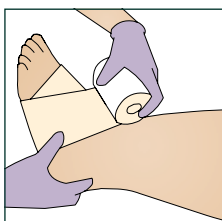


Stap 2: De tweede toer moet over de bovenkant van de voet lopen, zodat het midden van de breedte van de zwachtel het enkelgewricht bedekt.

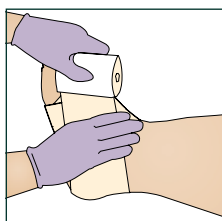


Stap 3: Breng deze toer om de achterkant van de hiel en zwachtel over de bovenkant van de voet, waar deze het onderliggende materiaal overlapt.

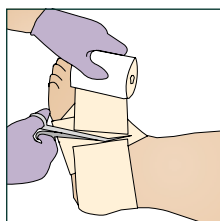

Stap 4: Knip af en druk deze op zijn plaats. Het plantaire oppervlak van de voet wordt niet volledig bedekt.

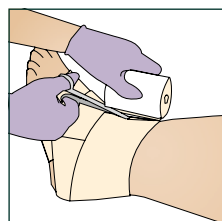


Stap 5: Breng met **minimale overlapping** de volgende toer aan, en knip af waar deze het onderliggende materiaal overlapt.

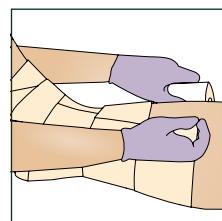


Stap 6: Werk verder omhoog langs het been met dezelfde individuele toeren. Eindig net onder het fibula kopje of net onder de knieholte. Knip overtollig materiaal af. Een lichte druk op het uiteinde van de zwachtel en omlaag langs het been zorgt ervoor dat de zwachtel op zijn plaats blijft tijdens het aanbrengen van de compressielaag.

Compressiezwachtel aanbrengen onder de knie: laag 2


- Pas gelijkmatige compressie toe met een **overlappend van 50%**. Gelijkmatige compressie wordt het beste bereikt als het materiaal op **100% rek** wordt aangebracht
- Voor een gecontroleerde, gelijkmatige compressie is het raadzaam de rol gedurende het aanbrengen voortdurend dicht bij de voet en het been te houden
- Als er na het aanbrengen onregelmatigheden worden opgemerkt, brengt u een extra compressielaag aan totdat het been er glad uitziet

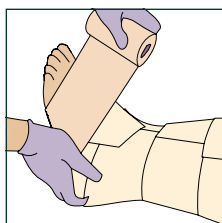


Stap 7: Plaats de voet in een dorsaalflexie van 90° en start het aanbrengen met een circulaire toer aan de basis van de tenen, beginnend bij de kleine teen.

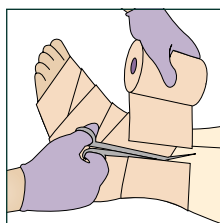

Stap 8: Zwachtel spica's en breng de rol terug over de bovenkant van de voet, over de onderkant van de voet en weer omhoog om de achterkant van de hiel te zwachtelen. Maak twee of drie spica's rond de enkel en zorg ervoor dat de gehele hiel bedekt is met minstens twee lagen.

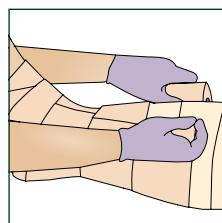


Stap 9: Voor een soepele vervormbaarheid en gelijkmatige dekking knipt u het compressiemateriaal af en werkt u verder omhoog langs het been met individuele toeren met een **overlappend van 50%**, waarbij u ervoor zorgt dat elke volgende laag goed wordt aangedrukt en aansluit.

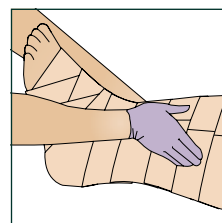

Stap 10: Eindig net onder het fibula kopje of net onder de knieholte, gelijk met de bovenrand van de comfortlaag. Knip overtollig materiaal af. Druk de zwachtel zachtjes aan en zorg ervoor dat het gehele oppervlak van de zwachtel aansluit.

Zwachtel verwijderen

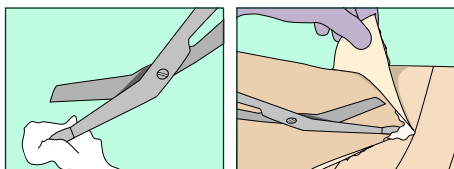

Als u de scherp punten in vochtinbrengende crème doopt (bijv Cavilon™ Barrière crème), kunt u de zwachtel comfortabel en gemakkelijk verwijderen.

Opmerking

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor volledige informatie met betrekking tot het gebruik van het 3M™ Coban™ 2 Tweelaags compressiesysteem.

3M™ Coban™ 2 Tweelaags Compressiesysteem

Voor veneuze beenulcera EAI $\geq 0,8$

Afbeelding	Bestelnummer	Z-indexcode	Omschrijving	Afmetingen	Compressie	Inhoud	Rollen per behandeling
	2094XL		10cm Kit - Extra lang: comfortlaag 1 en compressielaag 2	10cm x 3.5m en 10cm x 4.5m	Volledig	2 rollen	1 per been

Alternatieven

	20014/ 20024*		10cm Individuele rollen: comfortlaag 1/ compressielaag 2	10cm x 3.5m/ 10cm x 4.5m	Volledig	18/32 rollen	1 per been
---	---------------	--	--	--------------------------	----------	--------------	------------

*afzonderlijke componenten van 2094XL

3M™ Coban™ 2 Lite Tweelaags Compressiesysteem

Verminderde compressie voor beenulcera met gemengde etiologie EAI $\geq 0,5$

Afbeelding	Bestelnummer	Z-indexcode	Omschrijving	Afmetingen	Compressie	Inhoud	Rollen per behandeling
	20714/ 20724		10cm Individuele rollen Lite: comfortlaag 1/ compressielaag 2	10cm x 2.7m/ 10cm x 3.5m	Lite	18/32 rollen	1 per been

Opmerking: Voor deze producten en behandelingen bestaan specifieke indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie. Raadpleeg een expert en de productinstructies voor gebruik. Dit materiaal is bedoeld voor zorgprofessionals.

Solventum
Medical Surgical
BE: solventum.com/nl-be/home/
NL: solventum.com/nl-nl/home/
BE/NL: MedSurg-BNL@solventum.com

© Solventum 2025. Alle rechten voorbehouden. Solventum en het S-logo zijn handelsmerken van Solventum of haar dochterondernemingen. 3M en het 3M logo zijn handelsmerken van 3M. Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. OMG1445798.



Bekijk hier alle video's en handleidingen voor het aanbrengen van het Coban 2 Tweelaags compressiesysteem.

 solventum