


Aanbrengen op benen met extreem oedeem - volg de rol

Materialen en positionering


- Veel patiënten hebben extreme beencontouren. Vanwege de unieke eigenschappen van Coban 2-compressiesystemen kan de techniek voor het aanbrengen eenvoudig worden aangepast om een soepele, effectieve, duurzame compressie te bieden
- Voor de meeste onderbenen selecteert u de comfortzwachtel en compressiezwachtel van 10cm
- Voor patiënten die compressie minder goed kunnen verdragen of die een gemengde etiologie hebben met een $EA \geq 0,5$, wordt het 3M™ Coban™ 2 Lite Tweelaags compressiesysteem aanbevolen

Comfortzwachtel aanbrengen onder de knie: laag 1


- Breng aan met de foamzijde tegen de huid, met lichte rek zodat het aansluit op de vorm van het been met **minimale overlapping**
- Bedek de huid met een zo dun mogelijke laag, zonder openingen
- Als er huidplooien aanwezig zijn, gebruikt u stukjes foam met de foamzijde naar buiten om deze van elkaar te scheiden

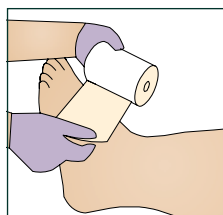


Stap 1: Plaats de voet in een dorsaalflexie van 90° en start het aanbrengen met een circulaire toer aan de basis van de tenen, beginnend vanaf de kleine teen middenvoetsbeentje. Beginnen bij de kleine teen zorgt voor een neutrale, comfortabele uitlijning van de voet.

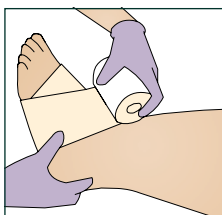


Stap 2: De tweede toer moet over de bovenkant van de voet lopen, zodat het midden van de breedte van het verband het enkelgewricht bedekt.

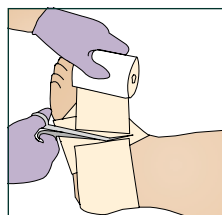


Stap 3: Zwachtel over de achterkant van de hiel en over de bovenkant van de voet, waar deze het onderliggende materiaal overlapt. Knip de af en druk voorzichtig op zijn plaats. Het plantaire oppervlak van de voet wordt niet volledig bedekt.

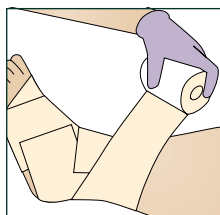

Stap 4: Zwachtel over de enkel met **minimale overlapping** en met lichte rek, zodat het soepel langs de contouren sluit, zwachtel verder omhoog langs het been. **Breng de zwachtel aan in de richting waar de rol u naartoe voert.**

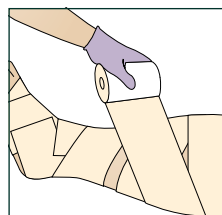


Stap 5: De bovenrand moet net onder het fibula kopje eindigen, of net onder de knieholte. Zwachtel weer omlaag om alle delen van de huid te bedekken. Probeer de overlapping van het materiaal zo klein mogelijk te houden om een zo dun mogelijke laag te garanderen.

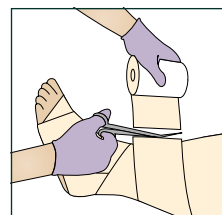


Stap 6: Druk alles voorzichtig aan en knip het overtollige materiaal af. Druk de lagen samen zodat deze aan elkaar hechten.

Compressiezwachtel aanbrengen onder de knie: laag 2


- Breng het materiaal aan met **100% rek** en **50% overlapping**
- Voor een gecontroleerde, gelijkmatige compressie houdt u de rol gedurende het aanbrengen voortdurend dicht bij het been
- Als er na het aanbrengen 'onregelmatigheden' worden opgemerkt, brengt u een extra compressielaag aan totdat het been er glad uitziet

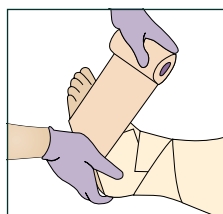


Stap 1: Plaats de voet in een dorsaalflexie van 90° en start het zwachtelen met een circulaire toer aan de basis van de tenen, beginnend vanaf de kleine teen.

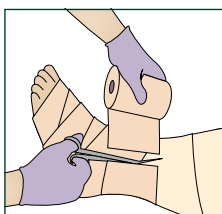


Stap 2: Zwachtel spica's en breng de rol terug over de bovenkant van de voet, over de onderkant en weer omhoog om rond de achterkant van de hiel te lopen. Maak twee of drie spica's rond de enkel en zorg ervoor dat de gehele hiel bedekt is met minstens twee lagen. Knip af en vorm deze voorzichtig op zijn plaats.

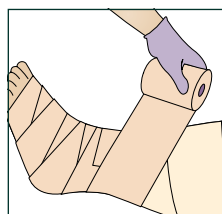


Stap 3: Zwachtel verder door te starten bij de vorige snijrand met een **overlapping van 50%**. Zwachtel rond de enkel en **verder omhoog langs het been in de richting waar de rol gaat**. Eindig net onder het fibula kopje, bijna gelijk met de foamlag.

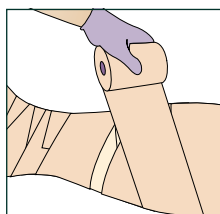

Stap 4: Zwachtel weer omlaag zodat de gehele comfortlaag is bedekt met minstens twee lagen. Als u op enig moment de richting van de rol wilt veranderen, kunt u het verband doorknippen en de aanbrengrichting wijzigen.

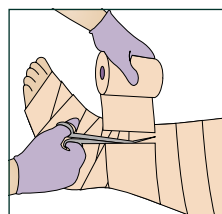


Stap 5: Druk alles goed aan en knip het overtollige materiaal af.

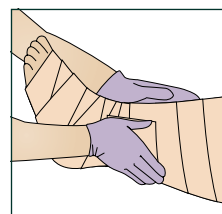

Stap 6: Druk de lagen samen zodat deze aan elkaar hechten.

Verband verwijderen

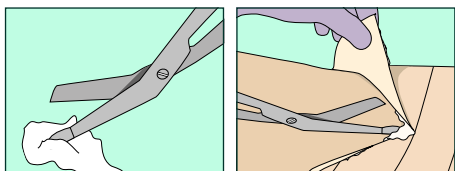

Als u de scherp punten in vochtinbrengende crème doopt (bijv. Cavilon™ Barrière crème), kunt u het verband comfortabel en gemakkelijk verwijderen. Knip omlaag langs het been in de richting van de haargroei.

Opmerking

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor volledige informatie met betrekking tot het gebruik van het 3M™ Coban™ 2 Tweelaags compressiesysteem.

3M™ Coban™ 2 Tweelaags Compressiesysteem

Voor een EAI $\geq 0,8$

Afbeelding	Bestelnummer	Z-indexcode	Omschrijving	Afmetingen	Compressie	Inhoud	Rollen per behandeling
	2094		Set 10cm: comfortlaag 1 en compressielaag 2	10cm x 2.7m en 10cm x 3.5m	Volledig	2 rollen	1 per been
	2094XL		10cm Kit - Extra lang: comfortlaag 1 en compressielaag 2	10cm x 3.5m en 10cm x 4.5m	Volledig	2 rollen	1 per been
Alternatieven							
	20014/ 20024		10cm Individuele rollen: comfortlaag 1/compressielaag 2	10cm x 3.5m/ 10cm x 4.5m	Volledig	18/32 rollen	1 per been

3M™ Coban™ 2 Lite Tweelaags Compressiesysteem

Verminderde compressie voor beenulcera met gemengde etiologie EAI $\geq 0,5$

Afbeelding	Bestelnummer	Z-indexcode	Omschrijving	Afmetingen	Compressie	Inhoud	Rollen per behandeling
	2794E		10cm Lite Kit: comfortlaag 1 en compressielaag 2	10cm x 2.7m en 10cm x 3.2m	Lite	2 rollen	1 per been
	20714/ 20724		10cm Individuele rollen Lite: comfortlaag 1/compressielaag 2	10cm x 2.7m/ 10cm x 3.5m	Lite	18/32 rollen	1 per been

Opmerking: Voor deze producten en behandelingen bestaan specifieke indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie. Raadpleeg een expert en de productinstructies voor gebruik. Dit materiaal is bedoeld voor zorgprofessionals.

Solventum
Medical Surgical
BE: solventum.com/nl-be/home/
NL: solventum.com/nl-nl/home/
BE/NL: MedSurg-BNL@solventum.com

© Solventum 2025. Alle rechten voorbehouden. Solventum en het S-logo zijn handelsmerken van Solventum of haar dochterondernemingen. 3M en het 3M logo zijn handelsmerken van 3M. Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. OMG1445798.



Bekijk hier alle video's en handleidingen voor het aanbrengen van het Coban 2 Tweelaags compressiesysteem.

