


Heupspica aanbrengen

Materialen en positionering

- Als de proximale rand van de zwachtel oprolt of als het voortijdig afglijdt, kunt u de zwachtel op een gemakkelijke en comfortabele manier stabiliseren door het aanbrengen van een heupspica
- Selecteer de comfortfoamlaag van 15cm en de compressielaag van 15cm voor het aanbrengen van de proximale dijbeenzwachtel en de spica


Comfortzwachtel aanbrengen voor heupspica: laag 1

- Breng de zwachtel aan met de foamzijde tegen de huid, met net voldoende spanning om aan te sluiten op de anatomie
- Bedek de huid met een zo dun mogelijke laag, zonder openingen

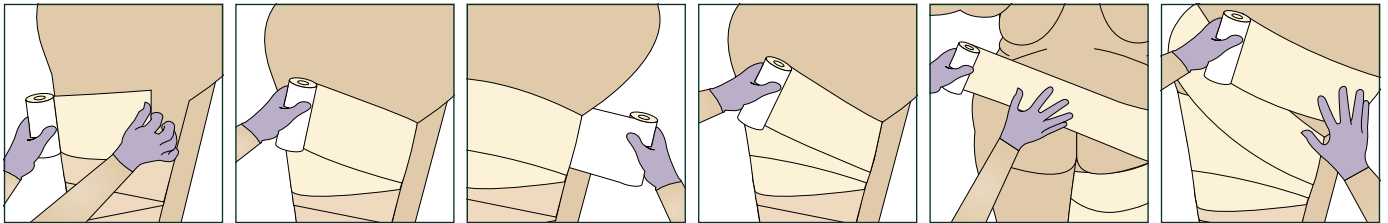

Stap 1: Zwachtel met cirkelvormige toeren om het dijbeen, totdat het dijbeen bedekt is.

Stap 2: Zwachtel verder met een circulaire toer rond de taille om het materiaal zodanig te positioneren dat de andere heup bedekt is. Wanneer u de zwachtel terugleidt over de buik, vormt u de zwachtel naar de anatomie. Breng indien nodig extra toeren aan ter ondersteuning.

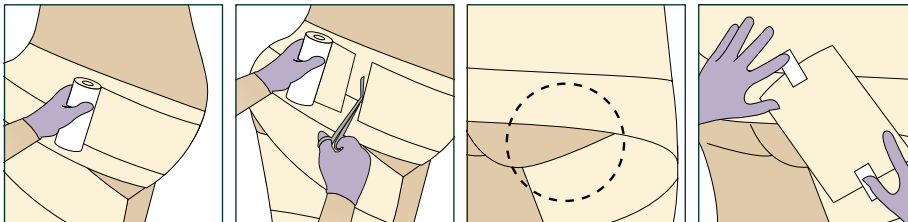


Stap 3: Eindig met een cirkelvormige toer rond de buik. Knip af en vorm het naar de onderliggende laag.

Stap 4: Om het aanbrengen op de blootgestelde huid aan de achterkant van het dijbeen (zie stippellijn) te voltooien, brengt u een stuk comfortfoamlaag aan dat groot genoeg is om het gebied te bedekken. Knip op maat, vorm het naar de anatomie en zet het vast met tape.

Compressiezwachtel aanbrengen voor heupspica: laag 2

- Pas gelijkmatige compressie toe met een **overlapping van 50%**. Gelijkmatige compressie wordt het beste bereikt als het materiaal op **100% rek** wordt aangebracht
- Voor een gecontroleerde, gelijkmatige compressie is het raadzaam de rol gedurende het aanbrengen voortdurend dicht bij het lichaam te houden
- Als er na het aanbrengen onregelmatigheden worden opgemerkt, brengt u een extra compressielaag aan totdat het er glad uitziet

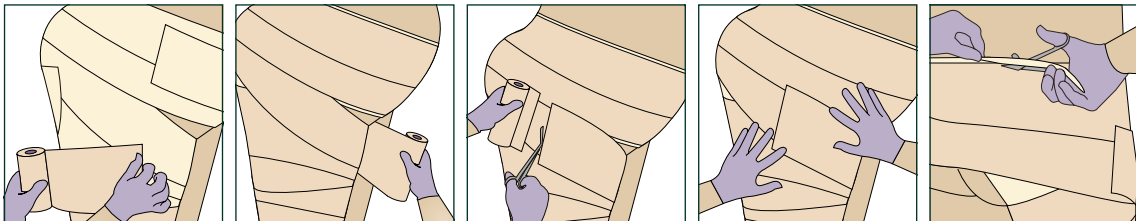


Stap 1: Breng de compressielaag van aan met **100% rek**, volgens dezelfde toeren als de comfortlaag. Breng ten minste twee circulaire toeren aan rond de taille. Wanneer u de zwachtel terugleidt over de buik, vormt u de zwachtel naar de anatomie. Breng indien nodig extra toeren aan ter ondersteuning. Eindig met een circulaire toer rond het bovenbeen.

Stap 2: Vorm de gehele zwachtel naar de anatomie.

Stap 3: Knip de zwachtel waar nodig bij voor comfort.

Aanbrengen comfortzwachtel voor heupspica met buikploo: laag 1

- Zwachtel met de foamzijde tegen de huid, met lichte spanning om aan te sluiten op de anatomie
- Bedek de huid met een zo dun mogelijke laag, zonder openingen

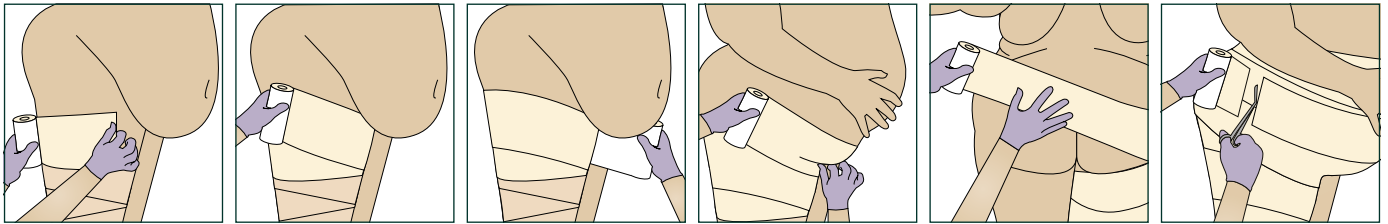


Stap 1: Zwachtel met cirkelvormige toeren om het dijbeen zo proximaal mogelijk te bedekken, totdat het dijbeen bedekt is.

Stap 2: Ga verder met circulair zwachtelen rond de taille om de zwachtel zodanig te positioneren dat de andere heup bedekt is. Wanneer u de zwachtel terugleidt over de buik, vormt u de zwachtel naar de anatomie. Breng indien nodig extra toeren aan ter ondersteuning.

Aanbrengen compressiezwachtel voor heupspica met abdominale huidploo: laag 2

- Pas gelijkmatige compressie toe met een overlapping van 50%. Gelijkmatige compressie wordt het beste bereikt als het materiaal op 100% rek wordt aangebracht
- Voor een gecontroleerde, gelijkmatige compressie is het raadzaam de rol gedurende het aanbrengen voortdurend dicht bij het lichaam te houden
- Als er na het aanbrengen onregelmatigheden worden opgemerkt, brengt u een extra compressielaag aan totdat het ledemaat er glad uitziet

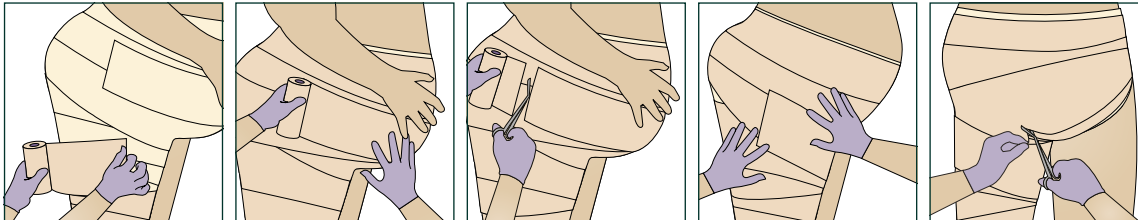


Stap 1: Zwachtel met **100% rek**, volgens dezelfde toeren als de comfortzwachtel. Breng ten minste twee circulaire toeren aan rond de taille. Wanneer u de zwachtel terugleidt over de buik, vormt u de zwachtel naar de anatomie. Breng indien nodig extra toeren aan ter ondersteuning. Eindig met een circulaire toer rond het bovenbeen.

Stap 2: Vorm de gehele zwachtel naar de anatomie.

Stap 3: Knip de zwachtel waar nodig bij voor comfort.

Zwachtel verwijderen

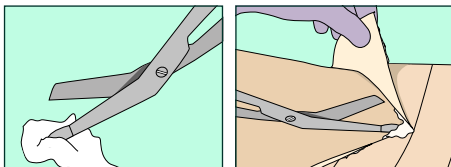

Als u de schaarpunten in vochtinbrengende crème doopt (bijv. Cavilon™ barrièrecreme), kunt u de zwachtel comfortabel en gemakkelijk verwijderen.

Opmerking

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor volledige informatie met betrekking tot het gebruik van het 3M™ Coban™ 2 Tweelaags compressiesysteem.

Voor heupspica

Afbeelding	Bestelnummer	Z-indexcode	Omschrijving	Afmetingen	Compressie	Inhoud	Rollen per behandeling
	20096		Set 15 cm: comfortlaag 1 en compressielaag 2	15cm x 3.5m en 15cm x 4.5m	Volledig	2 rollen	1 per heup
Alternatieven							
	20016/ 20026		15cm Individuele rollen: comfortlaag 1/ compressielaag 2	15cm x 3.5m/ 15cm x 4.5m	Volledig	10/15 rollen	1 per heup

Opmerking: Voor deze producten en behandelingen bestaan specifieke indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie. Raadpleeg een expert en de productinstructies voor gebruik. Dit materiaal is bedoeld voor zorgprofessionals.

Solventum
Medical Surgical
BE: solventum.com/nl-be/home/
NL: solventum.com/nl-nl/home/
BE/NL: MedSurg-BNL@solventum.com

© Solventum 2025. Alle rechten voorbehouden. Solventum en het S-logo zijn handelsmerken van Solventum of haar dochterondernemingen. 3M en het 3M logo zijn handelsmerken van 3M. Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. OMG1445798.



Bekijk hier alle video's en handleidingen voor het aanbrengen van het Coban 2 Tweelaags compressiesysteem.

solventum