


Aanbrengen op tenen

Materialen en positionering

- Selecteer de comfortfoamzwachtel en compressiezwachtel van 10cm

Aanbrengen van de comfortfoamlaag voor een tenenschoen: laag 1

- Gebruik een 10cm comfortfoamzwachtel per been om een 'schoen' voor de tenen aan te brengen

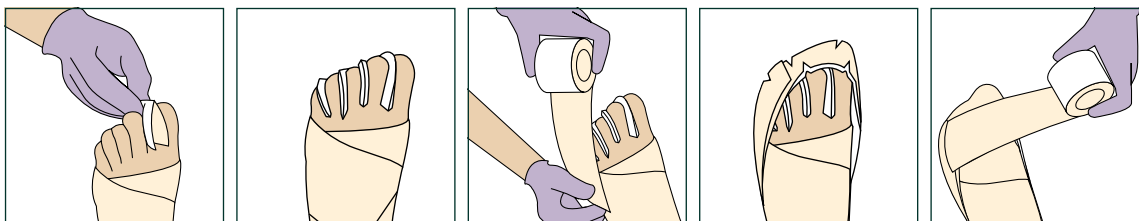


Stap 1: Vul elke open ruimte met stukjes dubbelgevouwen comfortfoamlaag, met de foamszijde naar buiten en in model geknipt.

Stap 2: Zwachtel met een 10cm comfortfoamzwachtel zonder spanning over de tenen en de hiel met overlapping op de kleine teen. Maak een paar inkepingen om de aansluiting over de tenen te vergemakkelijken.

Stap 3: Bedek de open stukjes boven en onder de tenen. Knip de zwachtel af en modelleer om het aan te laten sluiten.

Compressiezwachtel aanbrengen op de voet: laag 2

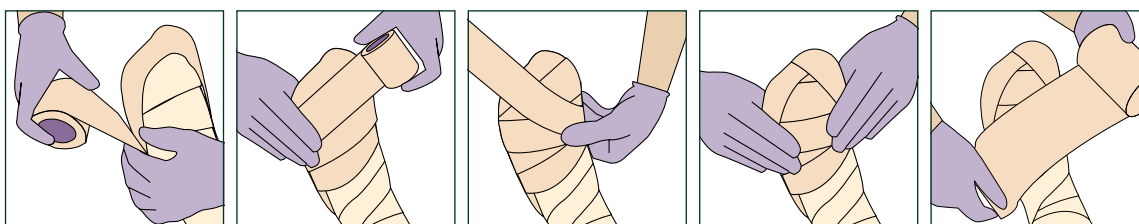

Stap 4: Gebruik een compressiezwachtel van 10cm en breng deze **zonder spanning** aan van de tenen tot de hiel.

Stap 5: Zwachtel de boven- en onderkant van de tenen met **100% rek** aangebracht in een waaiervouwtechniek met halfronde toeren. Vermijd cirkelvormige toeren rond de tenen.

Stap 6: Vorm de zwachtel naar de anatomie van de voorvoet.

Stap 7: Ga na het zwachtelen van de tenen verder met de compressielaag voor het been.


3M™ Coban™ 2 Lite Tweelaags Compressiesysteem

Materialen en positionering

- Selecteer de Lite-compressiezwachtel van 2,5 cm

Lite-compressiezwachtel aanbrengen op individuele tenen: laag 2


- Breng aan met minimale rek en **50% overlapping**

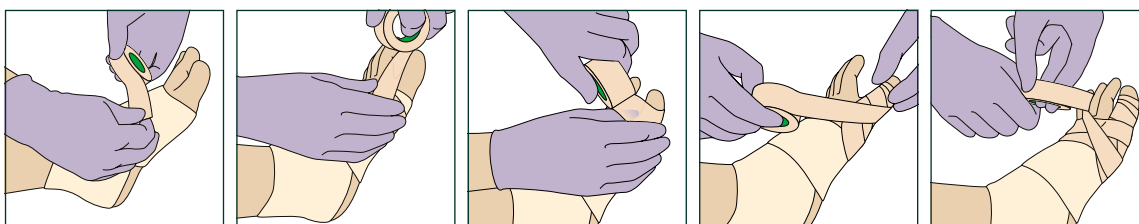


Stap 1: Begin met het zwachtelen van de tenen met één circulaire toer, beginnend bij de basis van de tenen, zonder spanning.

Stap 2: Breng de zwachtel zonder spanning langs de grote teen naar de basis van het nagelbed. Terwijl de teen licht gebogen is, gaat u verder met circulaire toeren, van distaal naar proximaal, met minimale rek en **50% overlapping**. Vorm de zwachtel zodat het aansluit op de anatomie.




Stap 3: Breng de zwachtel aan de basis van de grote teen over de laterale rand en over de plantaire voet, op de dorsale zijde van de vierde teen tot aan de basis van het nagelbed (de kleine teen wordt niet verbonden). Terwijl de teen licht gebogen is, gaat u verder met circulaire toeren, van distaal naar proximaal, met minimale rek en **50% overlapping**. Vorm de zwachtel zodat het aansluit op de anatomie.

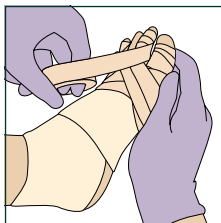

Stap 4: Zwachtel rond de voet aan de basis van de vierde teen en leid de zwachtel naar de dorsale zijde van de tweede teen tot aan de basis van het nagelbed. Terwijl de teen licht gebogen is, gaat u verder met circulaire toeren, van distaal naar proximaal, met minimale rek en **50% overlapping**. Vorm de zwachtel zodat het aansluit op de anatomie.


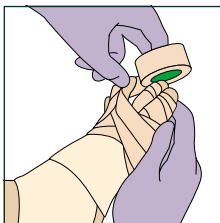


Stap 5: Maak een circulaire toer rond de voet aan de basis van de tweede teen en leid de zwachtel naar de dorsale zijde van de derde teen tot aan de basis van het nagelbed. Terwijl de teen licht gebogen is, gaat u verder met zwachtelen, van distaal naar proximaal, met minimale rek en **50% overlapping**. Vorm de zwachtel zodat het aansluit op de anatomie.

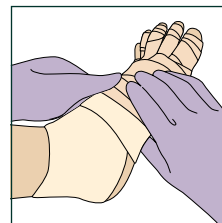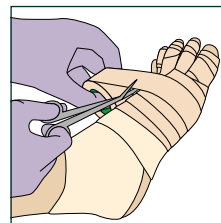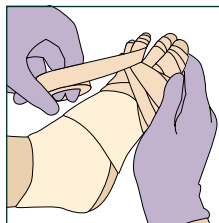

Stap 6: Zwachtel rond de voet om vast te zetten. Knip af, druk aan vorm het naar de anatomie. Ga na het zwachtelen van de tenen verder met de compressiezwachtel voor het been.

Verwijderen

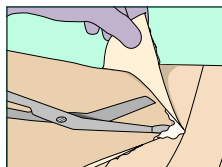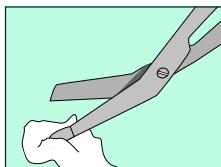

Als u de scherp punten in vochtinbrengende crème doopt (bijv Cavilon™ Barrière crème), kunt u de zwachtel comfortabel en gemakkelijk verwijderen.

Opmerking

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor volledige informatie met betrekking tot het gebruik van het 3M™ Coban™ 2 Tweelaags compressiesysteem.

3M™ Coban™ 2 Tweelaags Compressiesysteem

Voor tenenschoen

Afbeelding	Bestelnummer	Z-indexcode	Omschrijving	Afmetingen	Compressie	Inhoud	Rollen per behandeling
	2092		Set 5cm: comfortlaag 1 en compressielaag 2	5cm x 1.2m en 5cm x 2.7m	Volledig	2 rollen	1 per voet
Alternatieven							
	20012/ 20022		5cm Individuele rollen: comfortlaag 1/ compressielaag 2	5cm x 1.2m/ 5cm x 2.7m	Volledig	32/32 rollen	1 per voet

3M™ Coban™ 2 Lite Tweelaags Compressiesysteem

Voor individueel zwachtelen van tenen

Afbeelding	Bestelnummer	Z-indexcode	Omschrijving	Afmetingen	Compressie	Inhoud	Rollen per behandeling
	20721		2.5cm Individuele rollen Lite: compressielaag 2	2.5cm x 3.5m	Lite	36	1 per voet

Opmerking: Voor deze producten en behandelingen bestaan specifieke indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie. Raadpleeg een expert en de productinstructies voor gebruik. Dit materiaal is bedoeld voor zorgprofessionals.

Solventum
Medical Surgical
BE: [solventum.com/nl-be/home/](https://www.solventum.com/nl-be/home/)
NL: [solventum.com/nl-nl/home/](https://www.solventum.com/nl-nl/home/)
BE/NL: MedSurg-BNL@solventum.com

© Solventum 2025. Alle rechten voorbehouden. Solventum en het S-logo zijn handelsmerken van Solventum of haar dochterondernemingen. 3M en het 3M logo zijn handelsmerken van 3M. Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. OMG1445798.



Bekijk hier alle video's en handleidingen voor het aanbrengen van het Coban 2 Tweelaags compressiesysteem.

solventum