


Applikering på tær

Materialer og posisjon

- Velg 5 cm komfortskumlag og kompresjonslag

Applikering av kompresjonslag for mokkasen: Lag 1

- Legg 10 cm komfortskumlag som angitt for applikasjon på ben før du legger mokkasinen

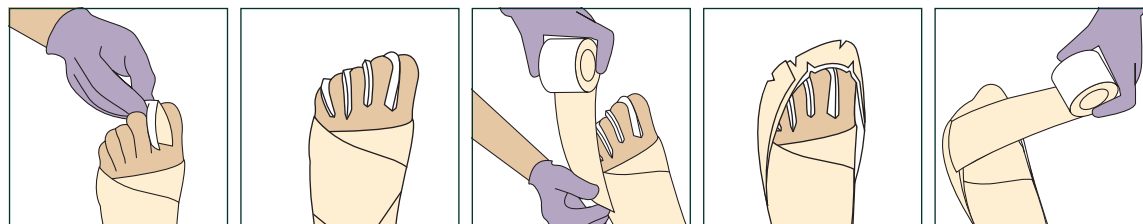


Trinn 1: Fyll hvert mellomrom mellom tærne med biter av dobbeltfoldet komfortskumlag, skumsiden ut og trimmet til form

Trinn 2: Med et 5 cm bredt lag komfortskum lager du en sirkulær sving uten strekk over tærne og hælen med overlappingen over lilletå. Lag noen spalter for å lette tilpasningen over tærne.

Trinn 3: Dekk de åpne områdene over og under tærne. Tilpass og form for å passe.

Applikering av kompresjonslag for mokkasen: Lag 2

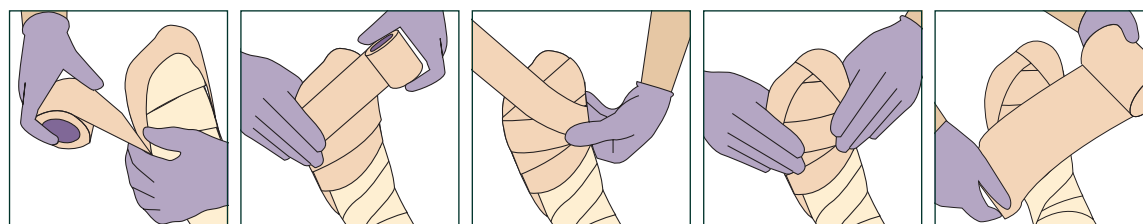

Trinn 4: Ved bruk av kompresjonslag-rollen på 5 cm legger du en sirkulær vikling uten strekk fra tærne til hælen.

Trinn 5: Dekk tåområdene på fotrygg og fotblad med kompresjonslag lagt med **100 % strekk** i en viftefoldningsteknikk med halvsirkulære viklinger. Unngå sirkulære viklinger rundt tærne.

Trinn 6: Form bandasjen etter anatomen til forfoten.

Trinn 7: Etter tåbandasjeringen fortsetter du med kompresjonslaget for benet.


3M™ Coban™ 2 Lite Tolags kompresjonssystem

Materialer og posisjon

- Velg 2,5 cm Lite kompresjonslag

Applikering av Lite kompresjonslag for individuelle tær: Lag 2


- Legg med minimum strekk og **50 % overlappende** lag

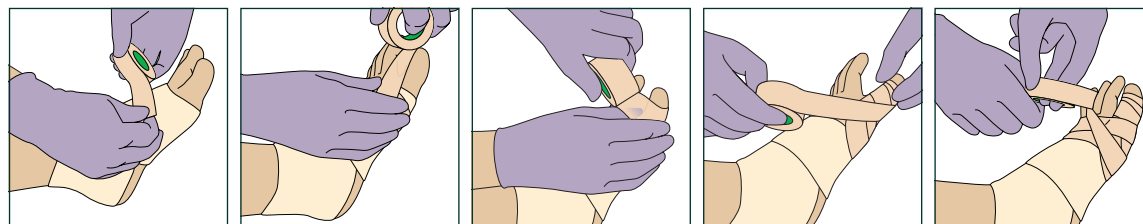


Trinn 1: Start tåbandasjeringen ved roten av tærne med en sirkulær vikling uten strekk.

Trinn 2: Før bandasjen langs stortåa til bunnen av neglesengen uten strekk. Med tåa lett bøyd, fortsett med sirkulære viklinger, utenfra og innover, med minimum strekk og **50 % overlappende** lag. Form bandasjen for å passe til anatomen




Trinn 3: Ved bunnen av stortåa, ta bandasjen over sidekanten og over fotbladet, og inn på ryggen på den fjerde tåa opp til bunnen av neglebunnen (den femte tåa blir stående ubandasjert). Med tåa lett bøyd, fortsett med sirkulære viklinger, distalt til proksimalt, med minimum strekk og **50 % overlappende** lag. Form bandasjen for å passe til anatomen.

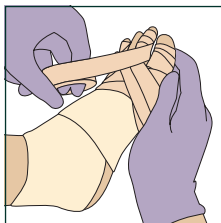

Trinn 4: Ved bunnen av den fjerde tå, lag en sirkulær vikling rundt foten, ta bandasjen på ryggen av den andre tå opp til bunnen av neglesengen. Med tåa lett bøyd, fortsett med sirkulære viklinger, utenfra og innover med minimum strekk og **50 % overlappende** lag. Form bandasjen for å passe til anatomien.


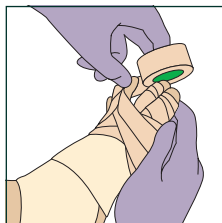


Trinn 5: Ved bunnen av den andre tåa, lag en sirkulær vikling rundt foten, ta bandasjen på oversiden av den tredje tå opp til bunnen av neglesengen. Med tåa lett bøyd, fortsett med sirkulære viklinger, utenfra og innover, med minimum strekk og **50 % overlappende** lag. Form bandasjen for å passe til anatomien.

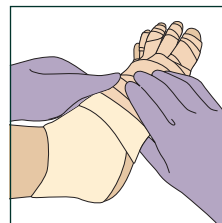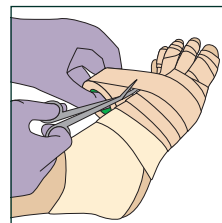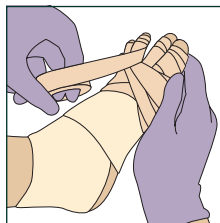

Trinn 6: For å feste bandasjen, lag en siste sirkulær vikling rundt foten. Klipp, trykk på plass og form etter anatomien. Etter tåbandasjeringen fortsetter du med kompresjonslaget for benet.

Bandasjefjerning

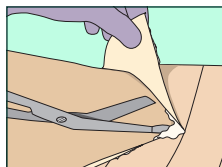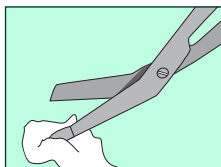

Bandasjefjerning
Bandasjefjerningen blir lettere og behageligere hvis du dypper de butte saksespissene i fuktighetskrem.

Merk

Se bruksanvisningen for fullstendig informasjon knyttet til bruken av 3M™ Coban™ 2 Tolags kompresjonssystemer.

3M™ Coban™ 2 Tolags kompresjonssystem

For mokkaslin

Bilde	Artikkelnr.	Beskrivelse	Størrelse	Kompresjon	Ant./eske	Ruller per prosedyre
	2092	5 cm sett: Komfortlag 1 og kompresjonslag 2	5cm x 1.2m og 5cm x 2.7m	Full	2 ruller	1 per fot

Alternativer

	20012/ 20022	5 cm Individuelle ruller: Komfortlag 1/ kompresjonslag 2	5cm x 1.2m/ 5cm x 2.7m	Full	32/32 ruller	1 per fot
--	--------------	--	------------------------	------	--------------	-----------

3M™ Coban™ 2 Lite Tolags kompresjonssystem

For individuell bandasjering av tå

Bilde	Artikkelnr.	Beskrivelse	Størrelse	Kompresjon	Ant./eske	Ruller per prosedyre
	20721	2.5cm Lite Individuelle ruller: kompresjonslag 2	2.5cm x 3.5m	Lite	36	1 per fot

Merk: Det finnes spesifikke indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og sikkerhetsinformasjon for disse produktene og behandlingene. Rådfør deg med helsepersonell og produktets bruksanvisning før bruk. Dette materialet er ment for helsepersonell.



Se alle applikasjonsvideoer og guider for Coban 2 kompresjonssystem her.