

Filtek™ Supreme Ultra Universal Restorative
フィルテック™ シュープリーム ウルトラ コンポジットレジン
光重合型ナノフィラー コンポジットレジン

保険適用

前歯・臼歯共用



Beauty
Easy
Strong


3M のナノテクノロジーと、ジルコニアテクノロジーが融合。

- 操作性に優れ付形が簡単
- ツヤ出しが簡単で、美しい光沢が長持ち
- 天然歯に近い審美性
- 高い強度と耐久性


3M

3Mのナノテクノロジーと、 ジルコニアテクノロジーが融合。

3M独自の“ナノクラスター”と“ナノフィラー”の結合構造を進化させ
これまでの“シリカナノフィラー”だけでなく、新たに“ジルコニア ナノフィラー”を配合。
付形性・滑沢性・審美性・強度・耐摩耗性に優れた性能を実現しました。

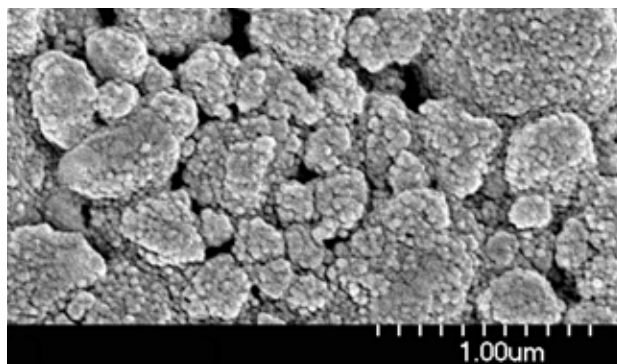

フィルテック™ シュープリーム ウルトラ コンポジット レジン
“ナノクラスター”と“ナノフィラー”で構成されています。

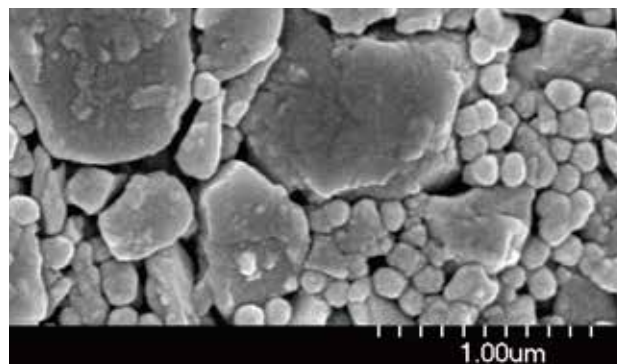

従来のハイブリッドタイプ コンポジットレジン
大きめのフィラーと“ナノフィラー”で構成されています。
Courtesy of Dr.Jorge Perdigao, University of Minnesota

■ナノクラスター


“ナノフィラー”を結合構造にすることにより、配合量が増え強度が増します。

■ナノフィラー

これまでの“シリカナノフィラー”だけでなく、新たに“ジルコニアナノフィラー”を配合しました。


4~11nm
ジルコニアナノフィラー

20nm
シリカナノフィラー

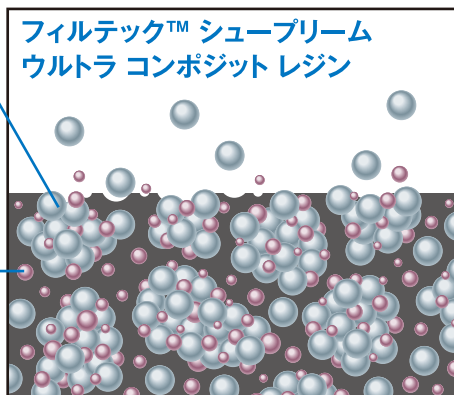

フィラーサイズが4~20nmと超微粒子のため
摩耗により削り取られるサイズもナノメートル
サイズに留まります。

デコボコができにくく表面性状が維持される
ため、光沢が長持ちし、ステインやプラークが
つきにくくなります。

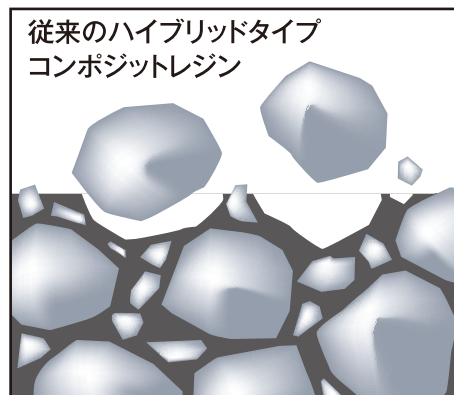

フィラーが比較的大きな粒子のため摩耗により
削られる部分も大きくなります。

デコボコができやすく表面性状が損なわれる
ため、光沢が失われやすくステインやプラーク
が付着しやすくなります。

4g入 / 3,100円 (希望医院価格)
この性能で! この価格!
うれしい経済性を実現しました。



1 充填器離れが良く、付形も簡単!

“ジルコニアナノフィラー”の配合により適度な
コシがあり、狙ったところにレジンをのせられます。
従来の製品と比べ、充填器にベタベタと
まとわりつくような感覚はありません。

臼歯咬合面の形態回復も容易です。



充填直後




3分後

付形後光重合なしで3分経過しても形態が保持されています。

2 ツヤ出しが簡単・光沢が長持ち! ステインやプラークがつきにくい!

シリコンポイント(茶と青)による研磨だけで
滑らかでツヤのある修復面が、簡単に再現
できます。

歯ブラシによる摩耗が少なく、
滑沢性を長期間維持できます。

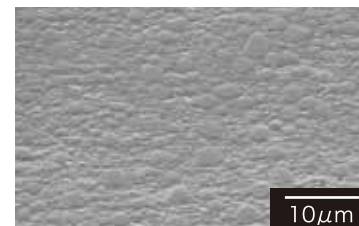

電子顕微鏡にて6,000回歯ブラシ摩耗
テスト後の表面性状を観察。



6,000回ブラッシング後も
滑沢性を保持しています。


3 蛍光性をさらに改良!

天然歯とほぼ同等の蛍光性を有することで、
周囲の歯牙にさらになじむようになりました。
また、自然光の元でもコンポジットレジン特有
の人工的な不自然さが少くなりました。



4 高い強度と耐久性!

“ジルコニアナノフィラー”の容積を増やした事で
臼歯部の咬合面に使用できる強度を有し、
耐摩耗性はエナメル質と同レベルで
対合歯を傷つけにくくなりました。

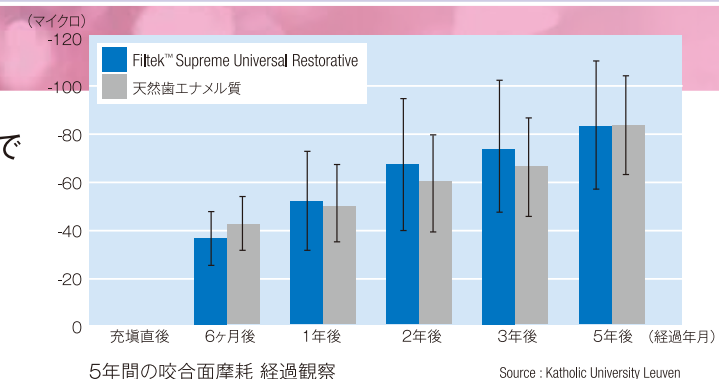

使用頻度の高いA系色を中心に、10色・3種類の透明度を揃えました。
日本人の歯になじみやすい暖かみのある自然な色調です。

シリンジが使いやすくなりました。

シリンジ本体の色を
デンティン、ボディー、エナメルごとに
色分けしました。

シェードがはっきり
見やすくなりました。



フィルテック™
シュープリーム
ウルトラ
コンポジットレジン
(全10色)

フィルテック™ シュープリーム
DL コンポジットレジンとの
シェード対応表

A2D	A3D	A4D	A1B	A2B	A3B	A3.5B	A4B	B2B	A2E
デンティンシェード(オベークシェード)			ボディーシェード(標準シェード)						エナメルシェード
0A2	0A3	0A4	A1	A2	A3	A3.5	A4	B2	EA2

※フィルテック™ シュープリーム DLは、在庫限りで販売終了とさせていただきます。切り替えはこのシェード対応表をご参照ください。

- このシェードは、厚さ1mmの実物写真です。印刷のため実際の色とは異なる場合があります。
- 実際の色調はコンポジットレジンの厚みと背景色により変化して見えます。
- 実際の色調を参考にされる場合は、該当するコンポジットレジンに光重合し、ご確認ください。

販 売 名: フィルテック™ シュープリーム ウルトラ コンポジットレジン
一般的名称: 歯科充填用コンポジットレジン
認 証 番 号: 221AKBZX00174000
内 容: シリンジ1本/1袋(4g)
希望医院価格: 3,100円(本体価格/税抜き)
製 品 番 号: 5916A2D, 5916A3D, 5916A4D, 5916A1B, 5916A2B,
5916A3B, 5916A3.5B, 5916A4B, 5916B2B, 5916A2E



限りなく天然歯に近い、審美性を追究した4種類の透明度・全36色のコンポジットレジン。 [保険適用外]

3M ESPE フィルテック™ シュープリーム XTE コンポジットレジン

販 売 名: フィルテック™ シュープリーム XTE コンポジットレジン
一般的名称: 歯科充填用コンポジットレジン
認 証 番 号: 221AKBZX00173000

■ボディーシェード(全17色)

内容: カプセル20個入(0.2g/1カプセル)
希望医院価格: 8,000円(本体価格/税抜き)

■デンティンシェード(全7色)、エナメルシェード(全8色)、トランスルーセントシェード(全4色)

内容: カプセル10個入(0.2g/1カプセル)
希望医院価格: 4,600円(本体価格/税抜き)



掲載の内容および希望医院価格は、2015年7月のものです。希望医院価格は本体価格です。仕様等は製品改良のため予告なく変更する事がありますので予めご了承ください。
3M、ESPE、Filtek、フィルテックは3M社またはその関連会社の商標です。

3M

詳しい情報は... **Let's Access!**

3M ESPE 歯科用製品ホームページ

3M 歯科

<http://www.mmm.co.jp/hc/dental/>

検索

当事業部取扱製品のお問い合わせは

3M ESPE コールセンター

0120-332-329

※受付時間/9:00~17:00 月~金(土・日・祝を除く)

※フリーダイヤルが繋がらない場合は、
03-6409-3157をご利用ください。

スリーエム ジャパン株式会社
ヘルスケアカンパニー
歯科用製品事業部

Please Recycle. Printed in Japan.
Copyright © 2015 3M. All Rights Reserved
DEN-706-DJ(071503)PN/MS