

## Applikation




Um bei Patienten mit empfindlicher Haut Verletzungen durch medizinischen Kleber (MARSI) zu vermeiden, tragen Sie zunächst im Haftbereich des Verbands 3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz auf. Sparen Sie den Bereich von 2 cm um die Einstichstelle aus. Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie den sterilen Verband und die Fixierplatte. Legen Sie die Applikationsanleitung sichtbar zur Seite.



Orientieren Sie sich an den Pfeilen und richten Sie die Fixierplatte mit den Pfeilen in Richtung der Einstichstelle aus.



Platzieren Sie den bzw. die Lumen (bis zu drei) des Katheters in den dafür vorgesehenen Haltebügel.

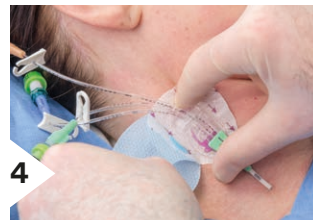

Entfernen Sie die Schutzfolie von der Fixierplatte. Stabilisieren Sie dabei den Katheter mit der anderen Hand. Falls nötig, können Sie die Fixierplatte neu positionieren, um eine korrekte Position zu erreichen.



Positionieren Sie das Gelkissen mittig über der Einstichstelle und glätten Sie den Verband von innen nach außen. Achten Sie darauf, den Verband nicht zu dehnen. Modellieren Sie den Verband rund um die Schlüsselochkerbe und kleben Sie die Enden des Verbands leicht überlappend an.



Entfernen Sie den Applikationsrahmen vorsichtig in flachem Winkel und drücken Sie währenddessen den Verband mit den Fingern der anderen Hand leicht an.



Befestigen Sie den breiten Fixierstreifen unterhalb der Katheterlumen. Modellieren Sie den Fixierstreifen gut an und entfernen Sie den Applikationsrahmen.



Dokumentieren Sie den Verbandwechsel entsprechend der hausinternen Vorschriften und befestigen Sie den Dokumentationsstreifen oberhalb der Katheterlumen.


## Entfernen




Entfernen Sie den Dokumentationsstreifen. Heben Sie die Katheterlumen an und öffnen Sie die Perforation in der Mitte des breiten Fixierstreifens.



Danach können Sie den Verband langsam und in flachem Winkel in Richtung der Einstichstelle entfernen. Stabilisieren Sie dabei den Katheter mit der anderen Hand. Belassen Sie dabei den Restverband oberhalb der Einstichstelle.

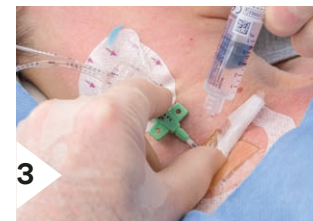

Lösen Sie jetzt den Haltestreifen von den Katheterlumen und nehmen Sie die Katheterlumen aus dem Haltebügel. Entfernen Sie nun langsam den restlichen Verband und stabilisieren Sie dabei den Katheter mit der anderen Hand. Befeuchten Sie das Gelkissen bei Bedarf mit einigen Tropfen Kochsalzlösung, um das Entfernen zu erleichtern.

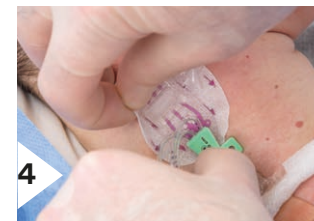

Während Sie den Katheter weiterhin mit einer Hand sichern, können Sie die Fixierplatte vorsichtig entfernen. Sichern Sie die Katheterlumen mit einem Fixierpflaster.