

3M™ Transbond™ Plus Light Cure Band Adhesive



- Indicado para la adhesión de bandas ortodónticas
- Óptimo sellado marginal
- Reducción de desperdicio
- Alta fuerza adhesiva
- Coloración azul para facilitar la remoción de excesos al instalar las bandas y la remoción de residuos al retirarlas



1
Retire los separadores elásticos



2
Profilaxias



3
Lavado




4
Seleccione la banda y pruébela en boca




5
Aisle los dientes y mantenga el campo seco



6
Seque la banda

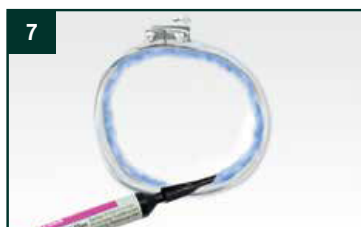

7
Aplique el material en el interior

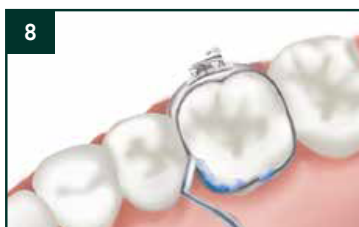

8
Coloque la banda en su sitio y retire el exceso



9
Fotopolimerice