

# 3M™ Transbond™ Plus Light Cure Band Adhesive



- Indicado para la adhesión de bandas ortodónticas
- Óptimo sellado marginal
- Reducción de desperdicio
- Alta fuerza adhesiva
- Coloración azul para facilitar la remoción de excesos al instalar las bandas y la remoción de residuos al retirarlas



1  
Retire los separadores elásticos



2  
Profilaxias



3  
Lavado




4  
Seleccione la banda y pruébela en boca




5  
Aisle los dientes y mantenga el campo seco



6  
Seque la banda

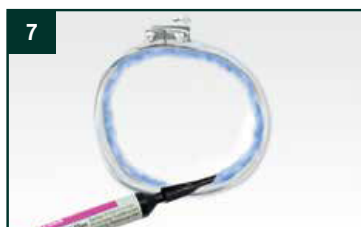

7  
Aplique el material en el interior

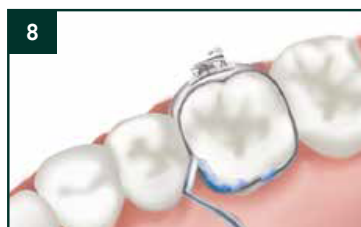

8  
Coloque la banda en su sitio y retire el exceso



9  
Fotopolimerice