

トランスボンド™ プラス セルフエッチング プライマー



20本入り

内容：

- ・トランスボンド™ プラス セルフエッチング プライマー×20本
- ・スタンダード ディスポーザブル アプリケーター×5本

製品番号：712-091

希望医院価格：6,380円



100本入り

内容：

- ・トランスボンド™ プラス セルフエッチング プライマー×100本
- ・スタンダード ディスポーザブル アプリケーター×10本

製品番号：712-090

希望医院価格：21,780円

ボンディングステップの効率化とブラケット脱落減少のために

APC™ Flash-Free 接着材つき アプライアンス システム

独自のテクノロジーにより、ベースに液状の接着材を染み込ませた不織布ファイバーを貼付。
接着材の塗布、そして余剰接着材の除去も不要です。



1. 取り出し



2. ポジショニング



3. 光照射



詳しくはWEBをご覧ください。

Web

Solventum APC



販売名:トランスボンド™ プラスセルフエッチング プライマー 認証番号:219AKBZX00144000 / 販売名:トランスボンド™ XT プライマー 認証番号:219AKBZX00153000
販売名:トランスボンド™ MIP プライマー 認証番号:220AKBZX00053000 / 販売名:トランスボンド™ XT 光重合接着材 認証番号:219AKBZX00119000
販売名:トランスボンド™ プラス カラーチェンジ 光重合接着材 認証番号:219AKBZX00091000 / 販売名:スタンダード ディスポーザブル アプリケーター 届出番号:13B1X10109000247
※掲載の希望医院価格と参データは、2024年6月現在のものです。(価格に消費税は含まれていません)
※仕様等は製品改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※ご使用に際しては、添付文書を必ずお読みください。

Solventumおよびそのロゴ、その製品名等を使用される商標はSolventum及びその関連会社の商標です。3Mおよびそのロゴは3Mおよびその関連会社の商標です。その他の商標はそれぞれの権利者の商標です。



デンタルソリューション事業部

<http://go.3M.com/orthodontics>

3Mのヘルスケア部門はソルベンタムという独立した企業になりました。

Please Recycle. Printed in Japan.
© Solventum 2024. All Rights Reserved.
UTK-063-F(0624)e.

矯正歯科コールセンター


0120-296-303

※受付時間／9:00～17:30 月～金 (土日祝を除く)



トランスボンド™ プラス セルフエッチング プライマー

Transbond™ Plus Self Etching Primer

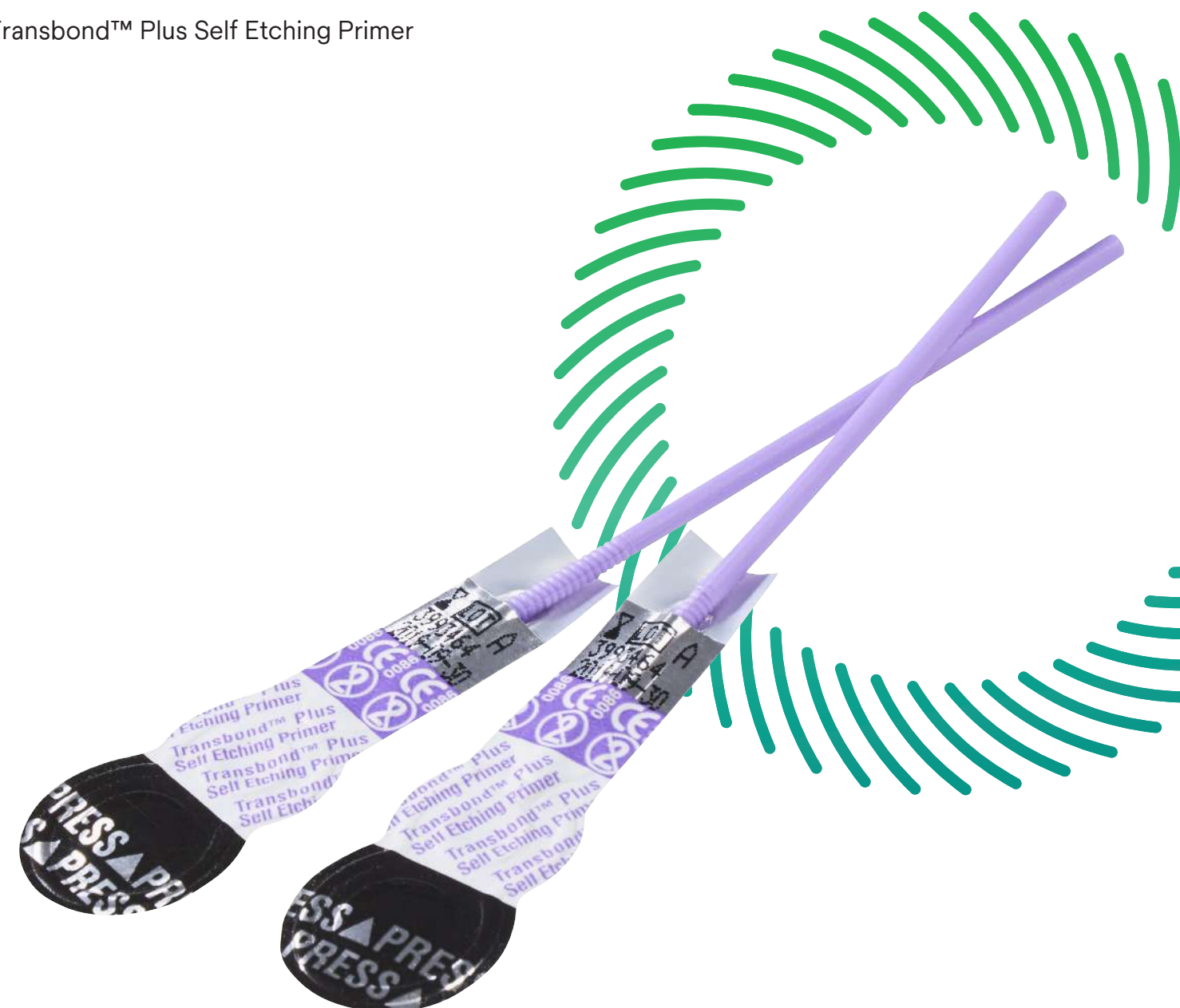

ワンステップのセルフエッチングプライマーです。

3Mのヘルスケア部門はソルベンタムという独立した企業になりました。

エッチングとプライミングが同時に。完全乾燥不要のワンステップ。

使用直前に密閉容器の中で2液を混合し、歯面に塗布するだけ。エッチングとプライミングがワンステップで可能です。
術中のエラーや汚染のリスクを低減する効率的な治療と、患者様の負担軽減が図れるシステムです。


秘密は、1本のブリスターの中に。

エッチング

プライマー

短時間でシンプル操作


スタンダード ディスポーザブル アプリケーターに付着した混合液を歯面にこすりつけるように塗るだけ。わずか5秒でエッチング&プライミングが完了。使用後は捨てるだけ。準備や片づけが簡単です。

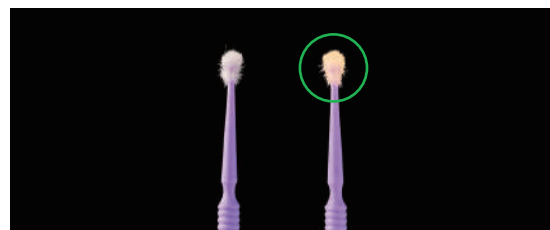


※ スタンダード ディスポーザブル アプリケーターについている液が薄い黄色になっていることを確認してください。

接着力・保持力

37%リン酸エッチングに類似したエッチングパターンを形成します。また、エッチングとプライミングの両方の機能をもつ成分により、エッチング層は光照射後にそのまま樹脂浸透層として接着に寄与します。そのため、エナメル損失を低減させながら、接着強度と保持力を維持することが期待できます。

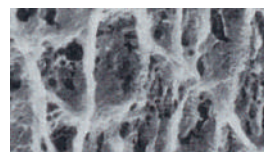


37%のリン酸処理によるエッチングパターン

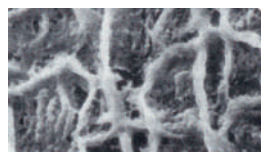

トランスボンド™ プラス セルフエッチングプライマー処理によるエッチングパターン

水洗、完全乾燥不要の親水性タイプ

口腔内の環境に左右されない親水性を実現。湿潤下でも完全防湿の必要がありません。唾液の影響を受けやすい臼歯部にも接着可能です。

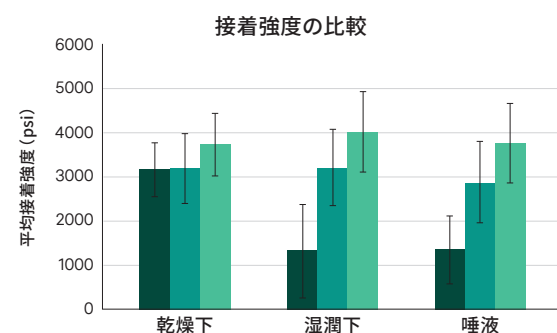

■ トランスボンド™ XT プライマー
■ トランスボンド™ MIP プライマー
■ トランスボンド™ プラス セルフエッチングプライマー
※ボンディング材はすべてトランスボンド™ XT 光重合接着材を使用して比較
※3M ラボデータ

汚染やトラブルのリスク解消

術式がワンステップになることで、治療中の汚染リスクが減少。使用直前に2液を混合するので、新鮮で安定した混合液を使用できます。

患者様ひとりに1本の使い切り

個別包装なので、衛生的に使えて、患者様にも清潔感をアピールできます。1本で上顎または下顎分の容量が入っているので、使いやすく便利です。

効率的な治療を実現。

ボンディングステップの比較

従来のエッチングとプライマー

※当社製品比較




1ステップに!

トランスボンド™ プラス セルフエッチングプライマー



各歯こすりつけるように5秒塗布後、1〜2秒エアをかけてください。

トランスボンド™ プラス セルフエッチング プライマーの使い方

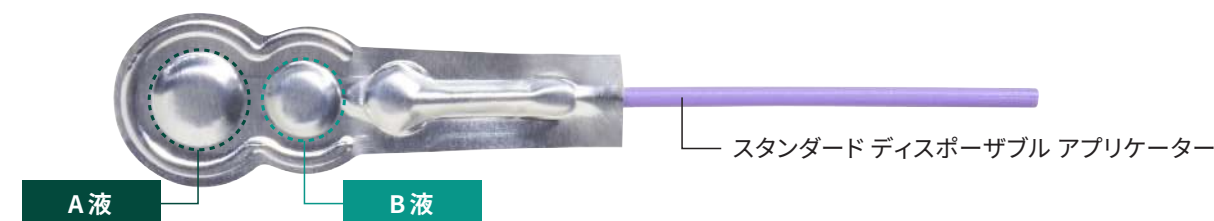

大きいブリスターを押しつぶすようにして、中のA液をB液の入った2番目のブリスターへ押し出す。



A液をB液の入ったブリスターへ完全に移してから、混合液が戻らないようにしっかりと親指と人差し指で押さえながら2つのブリスターの接合部で折り曲げる。



ブリスターを先端から押しつぶしながら、混和液をスタンダードディスポーザブル アプリケーターが差し込まれている一番小さいブリスターへ移動させる。



1. 回転させて5秒間混和。
2. 回転後、引き抜く。
※ スタンダード ディスポーザブル アプリケーターについている液が薄い黄色になっていることを確認してください。